

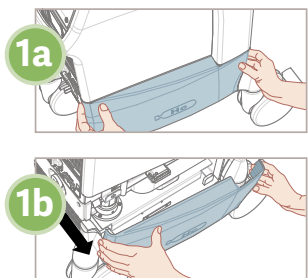



Comment remplacer l'obus d'hélium sur la console Cardiosave

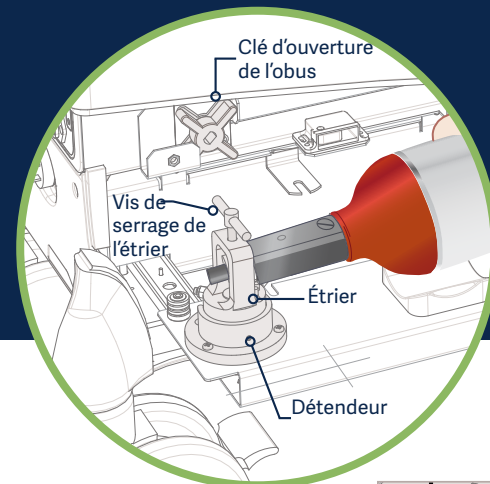


1a Saisir les deux côtés du panneau de l'obus d'hélium et
1b Tirer pour l'ouvrir.

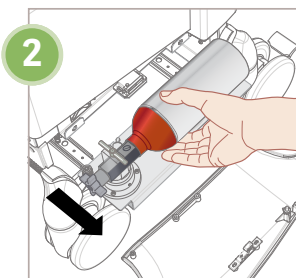


Saisir l'obus et tirer doucement le tiroir vers l'extérieur.

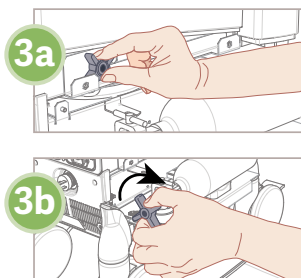


3a Retirer la clé de serrage de l'obus et
3b La poser sur la tête de l'obus et serrer en sens horaire.

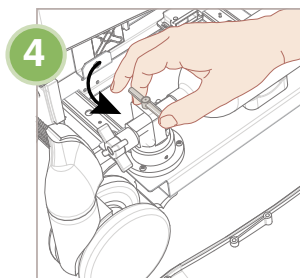


Desserrer lentement la clé en "T" en sens anti-horaire (un peu d'hélium résiduel va s'échapper)

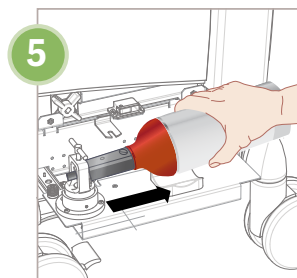


Enlever l'obus.

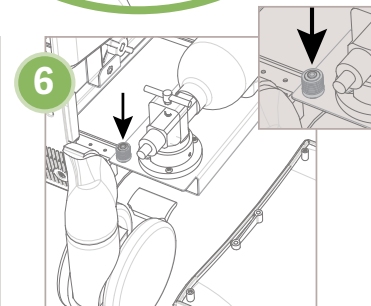


Remplacer le joint, si disponible.

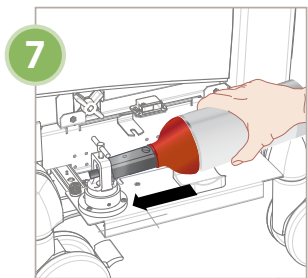


Installer l'obus neuf.

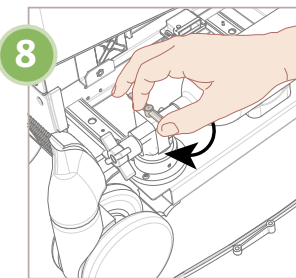

Serrer complètement la clé en "T" en sens horaire.

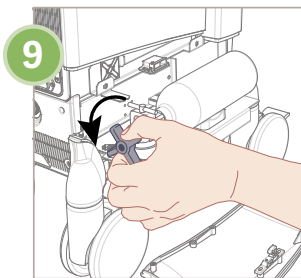

Ouvrez lentement l'obus en sens anti-horaire (écouter si de l'hélium s'échappe).

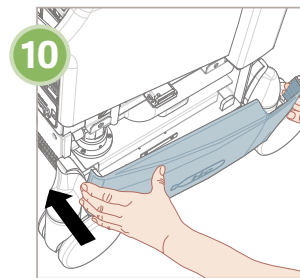

Faire glisser le tiroir de l'obus d'hélium à l'intérieur et remettre en place le cache de l'obus d'hélium.



Vérifier la pleine capacité de l'obus via l'icône à l'écran.