



Getinge Clean Enzymatic Plus

エンザイマティックプラス

4種の酵素・中性・低発泡 一複雑な形のMIS器材もしっかり洗浄

製品概要

Getinge Clean エンザイマティックプラスは、ウォッシャー・ディスインフェクター（以下WD）での洗浄工程をはじめ、超音波／浸漬洗浄や用手洗浄にもご使用いただけます。ISO 15883に準拠したゲティンゲ社製WDにおいて、洗浄試験・適合性を検証済みです。



すべての物品



ロボット手術用器材



洗浄剤

特徴

- プロテアーゼ・リパーゼ・アミラーゼに加えてセルラーゼを含む4種多酵素配合の中性洗剤で、蛋白質や有機物を効果的に分解・除去します。
- 複雑なロボット手術関連器材や、MIS器材（低侵襲手術用器材）の洗浄に効果的です。（*1）
- バイオフィルムの除去にも効果を発揮します。
- 米国Intuitiveサージカル社の指定器材洗浄プログラム（Getinge Aquadis 56シリーズ および Getinge WD 86シリーズによる da Vinciソリューション ※）による検証済洗浄剤です。（*2）
- 低発泡性で、WDによる機械作用を妨げません。

（*1）ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

（*2）インストゥルメントの「自動洗浄の準備」については、Intuitiveサージカル社より発行されている洗浄・滅菌方法の説明書をご参照ください。

（*3）pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

（*4）洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

基本情報

用途	WD、超音波、用手による洗浄
液性	中性（出荷時）
pH	8.6（出荷時の代表値） 8.4（実用液の代表値） （*3）
主成分	スフチリシン（プロテアーゼ） リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ、 非イオン性界面活性剤
外観	薄青色・透明液体
使用量	0.5～8 ml/L（WDの場合） 2～20ml/L（超音波、用手の場合）（*4）
使用温度	25～65℃ （*4）

Getinge Clean エンザイマティックプラス

内容量	5 L	25 L
品番	6002473001	6036008401
JANコード	4582130925386	4582130925393
使用有効期限	製造より24ヶ月	



※欧州の第三者機関で試験し、Intuitiveサージカル社で正式に認証された洗浄ソリューションに採用されている洗浄剤です。
なお、洗浄器の機種によって、プログラム内容は異なります。

※仕様は予告なく変更することがあります。

GETINGE

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp

© 2024 ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 | Getingeおよび GETINGE は、Getinge AB、その子会社または関連会社の商標または登録商標です。 | 2507.000.GGJ/IC-031-04 | All rights reserved.