



Getinge Clean Camber Foam

チャンバーフォーム

シンプルなお手入れで、チャンバー内を清潔に

製品概要

Getinge Clean チャンバーフォームは、洗浄器や滅菌器などのステンレスチャンバーや、ステンレス製のカート、トロリーなどの日常的な清掃にご使用いただけるメンテナンス用洗浄剤です。



メンテナンス

特徴

- 直接スプレーする泡タイプの酸性洗浄剤です。
- ステンレスに付着する水垢、スケールや、ミネラル成分によるスポット、錆などを取り除くことが可能です。
- 洗浄器や滅菌器のチャンバーなどステンレス製品を日常的にお手入れいただくことで、スケール・水垢などの付着を予防しチャンバー内を清潔に保つことが可能です。(*1)
- 酸性洗浄剤特有のにおいを軽減しました。

基本情報

用途	洗浄器や滅菌器のチャンバー内や、ステンレス製品の清掃
液性	酸性
pH	1.0（実用液の代表値）
主成分	リン酸、両性界面活性剤、硝酸、腐食抑制剤
外観	白濁色の液体
使用方法	(PPEを着用してください) 泡を表面にスプレーし、30分程度した後、水で洗い流すか、濡れた布で残っている泡を取り除いてください。 ※詳細は取扱説明書をご参照ください

Getinge Clean チャンバーフォーム

内容量	500 ml × 3 本 / 箱
品番	6002000831
JANコード	4582130925362
使用有効期限	製造より24ヶ月

(*1) ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

※仕様は予告なく変更することがあります。

GETINGE



ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL : 03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp