



Getinge Clean Universal Detergent

ユニバーサル洗剤

米国Intuitive社製X/Xi Endowrist®の再生処理向け専用洗剤

製品概要

Getinge Clean ユニバーサル洗剤は、ウォッシャーディスインフェクター（以下WD）の洗浄工程 および浸漬洗浄、用手洗浄にもご使用いただけます。ISO 15883に準拠したゲティング社製WDにおいて、洗浄試験・適合性を検証済みです。



すべての物品



ロボット手術用器材



洗浄剤

特徴

- プロテアーゼ・リパーゼ・アミラーゼの酵素3種を配合、および弱アルカリ作用（希釈時）により、たん白質や有機物を効果的に分解・除去します。
- 複雑なロボット手術関連器材や、低侵襲手術用器材の洗浄に特化しています。
- 米国Intuitiveサージカル社のX/Xi Endowrist®インストゥルメント専用の洗浄プログラム（da Vinci®ソリューション※）の専用洗剤です。
- 防食性に優れており、耐水性、耐アルカリ性のあるほとんどの材質に使用できます。（*1）

（*1）ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

（*2）Endowrist®インストゥルメントの「自動洗浄の準備」については、Intuitiveサージカル社より発行されている洗浄・滅菌方法の説明書をご参照ください。

（*3）pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

（*4）洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

基本情報

用途	WD、超音波、用手、浸漬による洗浄 (*2)
液性	アルカリ性（出荷時）
pH	11.0（出荷時の代表値） 9.9（実用液の代表値） (*3)
主成分	スフチリシン（プロテアーゼ） リパーゼ（トリアシルグリセロール） アミラーゼ 他
外観	薄黄色・透明液体
使用量	2～10 ml/L (da Vinci®ソリューション使用時：5 ml/L) (*4)
使用温度	45～60℃ (da Vinci®ソリューション使用時：60℃)

Getinge Clean ユニバーサル洗剤

内容量	5 L
品番	6001692431
JANコード	4582130925201
使用有効期限	製造より24ヶ月



※da Vinci®ソリューションは、Intuitiveサージカル社および欧州の第三者機関によって正式に認証された洗浄ソリューションでありゲティング社製ウォッシャーディスインフェクター専用プログラムです。なお、洗浄器機種によってプログラム内容は異なります。

※仕様は予告なく変更することがあります。

GETINGE

ゲティンググループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティングは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティングの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp

© 2024 ゲティンググループ・ジャパン株式会社 | Getingeおよび GETINGE は、Getinge AB、その子会社または関連会社の商標または登録商標です。 | 2507.000.GGJ/IC-028-03 | All rights reserved.