



Getinge Clean Enzymatic Detergent

酵素洗淨劑

器材にも優しい中性酵素成分でタンパク質を分解します

製品概要

Getinge Clean 酵素洗浄剤は、ウォッシャーディスインプェクター（以下WD）による洗浄にご使用いただく洗浄剤です。ステンレス、セラミック、ガラスやプラスチックなど耐水性のある素材での使用に適しています。ISO 15883に準拠したゲティンゲ社製WDにおいて、洗浄試験・適合性を検証済みです。



すべての物品用



洗浄剤

特徴

- プロテアーゼが血液・体液などの蛋白汚れを効果的に分解し、取り除きます。
- 器材へのダメージや環境負荷に考慮した中性洗浄剤です。
- 低発泡仕様で泡切れがよく、洗浄効果や、WDによる機械作用を妨げません。
- 高い酵素安定性で、酵素の活性力が長期間持続されます。
- 防食性に優れており、耐水性のあるほとんどの材質に使用できます。(*1)

(*1) ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

(*2) pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

(*3) 洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

基本情報

用途	WDによる洗浄
液性	中性（出荷時）
pH	7.0～8.0（出荷時・実用液の代表値） (*2)
主成分	タンパク質分解酵素（プロテアーゼ） 金属イオン封鎖剤、界面活性剤 酵素安定剤、防錆剤 他
外観	淡黄色～黄色・透明液体
使用量	2～5 ml/L (*3)
使用温度	30～60℃

Getinge Clean 酵素洗浄剤

内容量	4.5 L	10 L
品番	LJP-D5101	LJP-D5102
JANコード	4582130925232	4582130925249
使用有効期限	製造より24ヶ月	

※仕様は予告なく変更することがあります。

GETINGE



ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp

© 2024 ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 | Getingeおよび GETINGE は、Getinge AB、その子会社または関連会社の商標または登録商標です。 | 2507.000.GGJ/IC-025-02 | All rights reserved.