



Getinge Clean Alkaline Detergent

アルカリ性洗剤

強力なアルカリ成分で頑固な汚れを溶かして落とします

製品概要

Geringe Clean アルカリ性洗浄剤 は、ウォッシャーディスインフェクター（以下WD）の洗浄工程にて使用します。ISO 15883に準拠したゲティンゲ社製WDにおいて洗浄試験・適合性を検証済みです。



一般医療用銅製器材用



洗浄剤

特徴

- アルカリの加水分解作用で医療器具に付着した血液・体液などのタンパク質や脂質を速やかに除去します。
- 実用液(0.5%希釈時)のpHは11以上で、CJD/プリオンの不活性化にも有効です。
- 無発泡仕様で、WDの機械作用を妨げることなく洗浄効果を最大限に発揮します。
- 防食性に優れており、ステンレスはもちろん、セラミック、ガラスおよび耐性プラスチックなど、耐アルカリ性の材質にご使用いただけます。(*1)

(*1) ステンレス以外の金属、および樹脂によっては、変化をきたす場合があるため、使用前に必ずご確認ください。

(*2) pHは、洗浄時に使用する水質と水量に応じて変化します。

(*3) 洗浄時に使用する水質と水量に応じて可変するため、洗浄方法（装置）に応じた調整が必要です。

基本情報

用途	WDによる洗浄	
液性	アルカリ性（出荷時）	
pH	14 以上（出荷時の代表値） 11.7（実用液の代表値）	(*2)
主成分	水酸化ナトリウム、ケイ酸塩 カルボン酸塩 他	
外観	無色〜微黄色・透明液体	
使用量	2〜5 ml/L	(*3)
使用温度	40〜80℃	

Geringe Clean アルカリ洗浄剤

内容量	4.5 L	10 L
品番	LJP-D5201	LJP-D5202
JANコード	4582130925263	4582130925287
使用有効期限	製造より24ヶ月	

※仕様は予告なく変更することがあります。



ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL：03-5463-8313

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp