



# Workflow Offering

製品カタログ



## 器材滅菌のシームレスなワークフローをサポートする製品

感染管理、高い効率性、人間工学に基づいた職場環境を確保するためには、器材の再生処理全体を考慮する必要があります。そのため、ゲティングはウォッシャーディスインフェクターや滅菌器だけでなく、考え抜かれた搬送装置や必要なアクセサリーを備えた器材滅菌をサポートする製品を提供しています。

当社の前洗浄、検査、包装、保管、搬送用アクセサリーは、器材滅菌のでシームレスな流れを提供します。

当社の製品は、CSSD、小規模クリニックや診療所、歯科クリニック、ラボなど、さまざまな用途に適しています。どのようなアクセサリーがどのような用途に適しているかについては、次のページをご覧ください。

 = ウォッシュャブル

1

Instrument reprocessing :  
**汚染ゾーン**

---

2

Instrument reprocessing :  
**清潔ゾーン**

---

3

Instrument reprocessing :  
**滅菌ゾーン**

---


4

**トレイ&バスケット**

---

5

**その他製品**

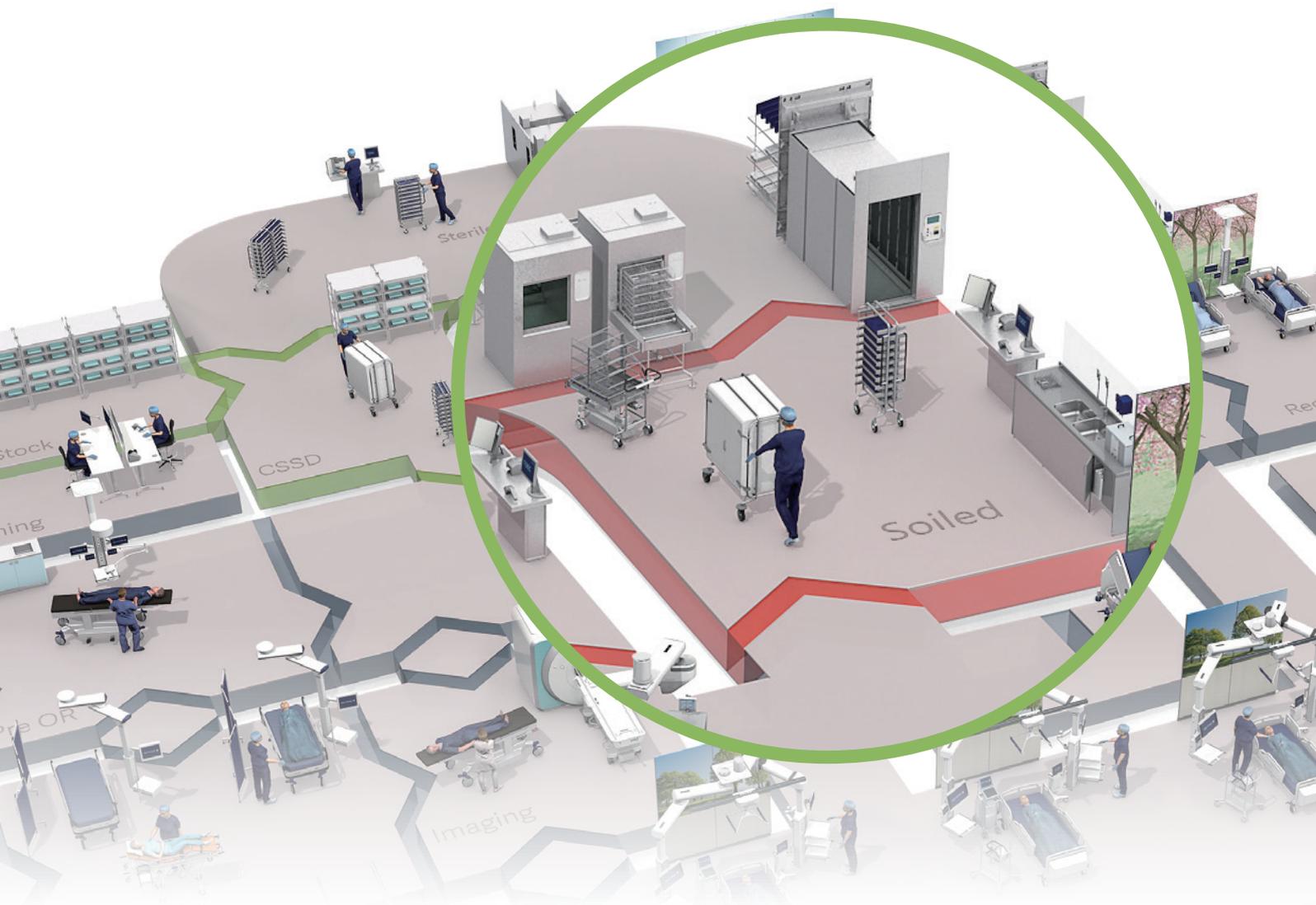

## Instrument reprocessing: 汚染ゾーン

ゲインゲの設計はバリアコンセプトに基づいており、汚染ゾーン、清潔ゾーン、滅菌ゾーンを明確に分離します。各ゾーンはパススルーのウォッシャーディスインフェクターと滅菌器によって仕切られています。次のページでは、汚染ゾーンから順に、各ゾーンに対応するアクセサリについて説明します。

手術室、病棟、外来、その他の部門から搬送される使用済みの器材は、搬入時と同じ器具トレイ、バスケット、容器に入れられ、カバー付き台車またはリフトで受入れエリアに持込まれます。目視検査の後、器材はそのままラックに乗せられ、パススルーのウォッシャーディスインフェクターで洗浄消毒されるか、浸漬、ウォーターガン洗浄、超音波洗浄などの用手工業で洗浄した後、ウォッシャーディスインフェクターで洗浄消毒されます。



### 用手トリロー洗浄具

時間を節約し、衛生的な用手トリロー洗浄用具。壁掛け式スプレーガンユニット、洗剤用ホルダー付き。1/2"チューブまたは強化ゴムホースで温水（最大70℃）に接続。調節可能なスプレーノズルと15mのチューブを装備。通常の水圧で作動可能、また洗浄剤が水流中に自動的に注入されます。

品番	製品名	ホース	接続口	重量
478727501	用手トリロー洗浄具	15m	1/2"	6.5kg



### ゲティンゲ Dina クリーニングキット

8つのねじ込み式アタッチメントを備えたDinaクリーニングガンは、安全で扱いやすいように設計されており、滅菌が可能です。水による洗浄、エアーによる乾燥で、優れた効果を得ることができます。アタッチメントを使用すれば、離れた隅々まで洗浄できます。クリーニングガンは工具を使わずに分解でき、簡単に洗浄できます。高品質の素材と最新の製造技術により、蒸気の浸透を確実にします。クリーニングガンの使用により、人間工学に基づいた作業が可能になります。

- 1.5m強化ポリ塩化ビニールホース、1/2インチ両端開放ホース
- アタッチメント8個セット
- 蒸気滅菌可能（再生処理ガイド参照）

品番	製品名	ノズル	ホルダー
6003000481	Dinaクリーニングキット	8ヶ	○
6003000482	Dinaクリーニングガン	-	-
6003000484	テーブルマウントロゼット、クリーニングガンHelaおよびDina用		



### ゲティンゲ Hela クリーニングキット (SUS)

Helaステンレス・スチール・クリーニング・キットは、6つのねじ込み式アタッチメント付きで、脱塩水用に設計されており、滅菌が可能です。クリーニングガンは工具を使わずに分解でき、簡単に洗浄できます。高品質の素材と最新の製造技術により、蒸気の浸透を確実にします。

クリーニングガンの使用により、人間工学に基づいた作業が可能になります。

- 1.5mステンレスメッシュホース、1/2インチ両端開放ホース
- 脱イオン水や化学洗剤に対して特に耐性があります
- アングルアタッチメントホルダーを含む、6つのねじ込み式アタッチメントが付いたプレミアムセット
- 蒸気滅菌可能（再生処理ガイド参照）

品番	製品名	ノズル	ホルダー
6003000483	Helaクリーニングガンキット (sus)	6ヶ	○
6003000484	テーブルマウントロゼット、クリーニングガンHelaおよびDina用		



# 2

## Instrument reprocessing: 清潔ゾーン

洗浄消毒を行った清潔な（ただし無菌ではない）器材は、仕分け、検査、包装のためのエリアに入ります。このような作業のために、ゲティングはさまざまな要件や容量に対応できる実用的で使いやすい機器を取り揃えています。機動性、効率性、人間工学は、この分野のアクセサリーに不可欠です。仕分け、検査、包装された器材は、パススルー型の滅菌器で滅菌処理されます。

## ゲティンゲ パッキング・テーブル

スマートで人間工学に基づいたデザイン

### お手入れのしやすい表面と 付属品を備えたモダンなデザイン

ゲティンゲの検査・梱包用テーブルは、柔軟性、人間工学、機能性を考慮して設計されています。滑らかなエッジ、ステンレススチール製フレーム、繊細な作業面の相互作用により、清掃性が向上し、ホコリを寄せ付けません。整理整頓されたエレガントなデザインは、当社がトロリーや搬送機器用に開発したスマートコンセプトの一部です。



パッキングテーブルは、そのままでも、固定式でも、高さ調節可能でも使用できますし、弊社のアクセサリを装備して、個別にワークステーションを構成することもできます。設定済みのワークステーションをお選びいただくこともできます：  
Getinge SmartまたはT-DOCパッキングステーション。



### パッキング・テーブル

各種手術器具一式のトレイへの仕分け、検査、梱包などを行う作業用に設計されています。

- テーブル単体で、またはオプションのアクセサリフレームとアクセサリを装着して使用
- オプションの引き出しは、パッキング・テーブルの両側に取り付けることができます。
- シーラーテーブルやサイドテーブルとしても使用可能。

パッキングテーブル 付属品なし	ワークトップ	品番 全長1,200mm	品番 全長1,600mm	品番 全長1,800mm	品番 全長2,000mm
固定高さ900mm	HPコア素材	6003001108	6003001109	6003001110	6003001111
固定高さ900mm	ステンレス	6003001112	6003001113	6003001114	6003001115
高さ調整可能 795-1,295mm,230V / 50-60Hz	HPコア素材	6003001116	6003001117	6003001118	6003001119
高さ調整可能 795-1,295mm,230V / 50-60Hz	ステンレス	6003001120	6003001121	6003001122	6003001123

## 構成済パッキングステーション

ゲティンゲは、フレキシブルなシステムにより、多くの作業方法に対応する実用的な設計のアクセサリを使用して、カスタマイズされたソリューションを提供するパッキングステーションを構成しています。



### スマートパッキングステーション

- 高圧ラミネート (HPL)  
またはステンレス製テーブルトップ、2,000 × 800mm
- 高さ調節可能 (795 ~ 1,295mm)  
または高さ固定 (900mm)
- アクセサリー・フレーム 2,000mm
- 引出しユニット、引出し1杯付き、ステンレス製、前面無垢仕上げ
- 小型トレイ 2個、150 × 220mm
- 中型トレイ 2枚、310 × 220mm
- 大型トレイ 2個、250 × 350mm
- ランプホルダー
- コンピューターホルダー
- スクリーンホルダー

### T-DOCステーション

- 高圧ラミネート (HPL)  
またはステンレス製テーブルトップ、サイズ 2,000 × 800mm
- 高さ調節可能 (795 ~ 1,295mm)  
または高さ固定 (900mm)
- アクセサリー・フレーム 2,000mm
- 引出しユニット、引出し1杯付き、ステンレス製、前面無垢仕上げ
- 小型トレイ、150 × 220mm
- 中型トレイ、310 × 220mm
- 大型トレイ、250 × 350mm
- スキャナーホルダー
- プラスチック製ポケット 10個付き。
- プリンターホルダー、小
- ランプホルダー

製品名	ワークトップ	品番 高さ固定	品番 高さ調整可能
T-DOCステーション	HPコア素材	6003001100	6003001101
T-DOCステーション	ステンレス	6003001102	6003001103
スマートパッキングステーション	HPコア素材	6003001104	6003001105
スマートパッキングステーション	ステンレス	6003001106	6003001107

## アクセサリ

スキャナーやプリンター、バインダーなど、日々の作業に必要なものを置くトレイや棚板は、フレームにフックで取り付けられ、扱いやすく、配置換えも簡単です。スクリーンやインスペクションランプ用のホルダーは、スクリュークランプでフレームに取り付けられ、安全な方法で固定できます。付属品はステンレススチール製で、粉体塗装が施されているため、表面のお手入れが簡単です。



アクセサリフレーム



トレイ S



トレイ M



トレイ L



スクリーンホルダー



トライホールドホルダー



スキャナーホルダー



コンピューターホルダー



プリンターホルダー



ステンレス引き出し



ランプホルダー

	Art. No.	Description
1	6003001130	アクセサリフレーム 1,200mm
1	6003001131	アクセサリフレーム 1,600mm
1	6003001132	アクセサリフレーム 1,800mm
1	6003001133	アクセサリフレーム 2,000mm
2	6003001134	トレイ S 150 × 219mm
3	6003001135	トレイ M 310 × 219mm
4	6003001136	トレイ L 250 × 349mm
5	6003001137	スクリーンホルダー
6	6003001138	トライホールドホルダー (10ポケット付)
7	6003001139	スキャナーホルダー
8	6003001140	コンピューターホルダー
9	6003001141	プリンターホルダー S
10	6003001142	ステンレス引き出し
11	6003001144	ランプホルダー


## リネン検査 & 折りたたみテーブル



リネンの検品・折り畳み用テーブル。天板はソフトなホワイトカラーの高圧 (HP) 芯材を使用し、LED 照明付き点検面を備えています。ゆったりとしたサイズなので、大きなドレッシングシートでも快適に作業できます。立っても座っても快適に作業ができます。フレームはステンレス製。

100-240V / 50/60Hz.

品番	検査パネル	サイズ (L × W × H)
6003000680	900 × 1,000mm	2,000 × 1,250 × 900mm

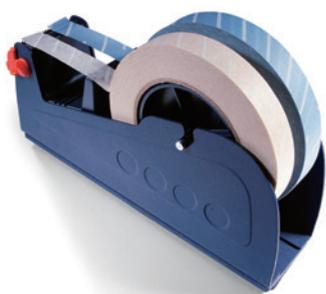

### テープディスペンサー

テープ2巻を収納できる滅菌テープ用ディスペンサー。頑丈な底板には滑り止めラバーが付いており、テープをちぎった際にディスペンサーが滑るのを防ぎます。高品質のコーティングスチール製で、長期間使用できます。

品番	サイズ (L×W×H)
561570701	260 × 60 × 120mm



### ペーパーホルダー

包装ステーションで4種類のサイズの滅菌包装材を保管するための可動式台車。台車はステンレス製で、4個の回転ボールベアリング付きゴム車輪が装備されており、うち2個にはストッパーが付いています。

品番	サイズ (L×W×H)
6003000685	1,416 × 718 × 995mm



### ロールディスペンサー

これらのロール・ディスペンサーは、最大直径が約30cmのロール状の包装材料の保管と切断の両方に使用できます。

220mm。長さは3種類。スライド式カッターは、怪我を防ぐため、ハウジングに完全に組み込まれています。スペアパーツとして予備のカッター(刃)をご用意しています。

品番	製品名	サイズ (L×W×H)
6003000308	ロールディスペンサー W600	600 × 330 × 170mm
6003000309	ロールディスペンサー W900	900 × 330 × 170mm
6003000310	ロールディスペンサー W1200	1,200 × 330 × 170mm
6003000480	HANDLE FOR CUTTING DEVICE	



## 拡大鏡ジオプター 3,5,8

クランプ付きLED拡大鏡は、視覚的な作業向けに設計されています。最適な倍率と、広範囲にわたる強力で均一な照明による検査を実現します。検査ランプは、病院や診療所のCSSDまたはその他の小型の滅菌部門での作業に最適です。ランプにはフレキシブルアームがあり、電源ユニットが付属しています。

一般用検査ランプ、ジオプター3。①

高倍率用検査ランプ、ジオプター5。①

検査ランプ、ジオプター8は、小さなものを扱う場合に適しています。非常に高い倍率です。  
②

品番	製品名	拡大率	レンズサイズ	電源	電源ユニット (V Dc)
6003000696	拡大鏡ジオプター3	x1.75 (175%)	150mm	220-230V / 50Hz	24V 12Watt
6003000697	拡大鏡ジオプター5	x2.25 (225%)	150mm	220-230V / 50Hz	24V 12Watt
6003000698	拡大鏡ジオプター8	x2.75 (275%)	127mm	220-230V / 50Hz	20V 10Watt



## フレキシブル・ストレージ・トロリー & アクセサリ

あらゆる施設に適した、便利でフレキシブルな保管用トロリーです。各トロリーは、あらゆる特別なニーズに合わせて組合せでき、しかもニーズの変化にも柔軟に対応します。3種類のトロリーモデルから1つを選択し、多くのオプションアクセサリの中から好きなものを選んでトロリーに引っ掛けるだけです。これで、台車に荷物を載せて、便利な保管場所として使用したり、使用場所まで移動したりすることができます。

1. バスケットやストレージシェルフを運搬・収納するためのフック付き片面移動式モジュラートロリー。8個のフックで4個のアクセサリを収納できます。このトロリーはステンレス製で、ブ4個の回転車輪（2個はストッパー付）を装備しています。
2. バスケットやストレージシェルフを運搬・保管するためのモジュラートロリー。トロリーは2つの側面にフックを備えており、積載物に両側面からアクセスできます。16個のフックで8個のアクセサリを収納できます。ステンレス製で、4個の回転車輪（2個はストッパー付）を装備。
3. バスケット、アクセサリ、コンテナを収納できる中央コンパートメント付き両面トロリー。このトロリーは、モジュラーアレンジのための多くの可能性を提供します。中央コンパートメントには、アクセサリ8個収納可能な16個のフックと5段の棚が付いています。ステンレス製で、4個の回転車輪（2個はストッパー付）を装備しています。

	品番	製品名	サイズ (L × W × H)
1	5618618	ストレージトロリー シングル	600 × 480 × 1,550mm
2	5618615	ストレージトロリー ダブル	600 × 600 × 1,550mm
3	5618625	ストレージトロリー ダブル (棚付)	600 × 1,150 × 1,550mm




	品番	製品名	サイズ (L × W × H)
1	5618488	プラスチックボックス 3L 青	235 × 145 × 130mm
2	5618489	プラスチックボックス 1L 赤	165 × 105 × 75mm
3	5618430	プラスチックボックス用シェルフ、2段式 容量：下段4 × 3L 上段6 × 1L	600 × 200 × 300mm
4	5618435	プラスチックボックス用シェルフ、容量：6 × 1L	600 × 180 × 150mm
5	5618649	ワイヤーバスケット	600 × 400 × 150mm
6	5618652	フロントオープンバスケット	600 × 400 × 300mm
7	5618418	シューズラック 容量：6足	600 × 230 × 170mm
8	5618416	ストレージシェルフ	600 × 300 × 150mm
9	5618638	ワイヤーバスケット	600 × 150 × 150mm
10	5618648	ワイヤーバスケット	600 × 300 × 300mm
11	5618411	ワイヤーシェルフ	600 × 300 × 150mm



## 滅菌バスケット用ディスペンサー

高品質ステンレス製の衛生的なディスペンサー。ベースプレートは四方折り込み式。高さ調節可能なクローズドプラットフォームと連続アップスタンド、ボールベアリングプラットフォームガイドを備えたクローズドスプリングケースを上部に設置。手動調整可能なステンレス製テンション・スプリング・システムにより、安定した出力高さを実現。4つの巨大なポリマーコーナーバンパー（構造体の上部コーナーに2つ）がバンパーとして機能し、人間工学に基づいた形状のプッシュバーが一体化され、建物側の壁を損傷から守ります。ディスペンサーは4個の回転キャスターで走行、うち2個はストッパー付、φ4.9"（125mm）。耐荷重：約120kg。）

品番	製品名	サイズ (L×W×H)
6003000205	滅菌バスケット用ディスペンサー	802×715×899mm

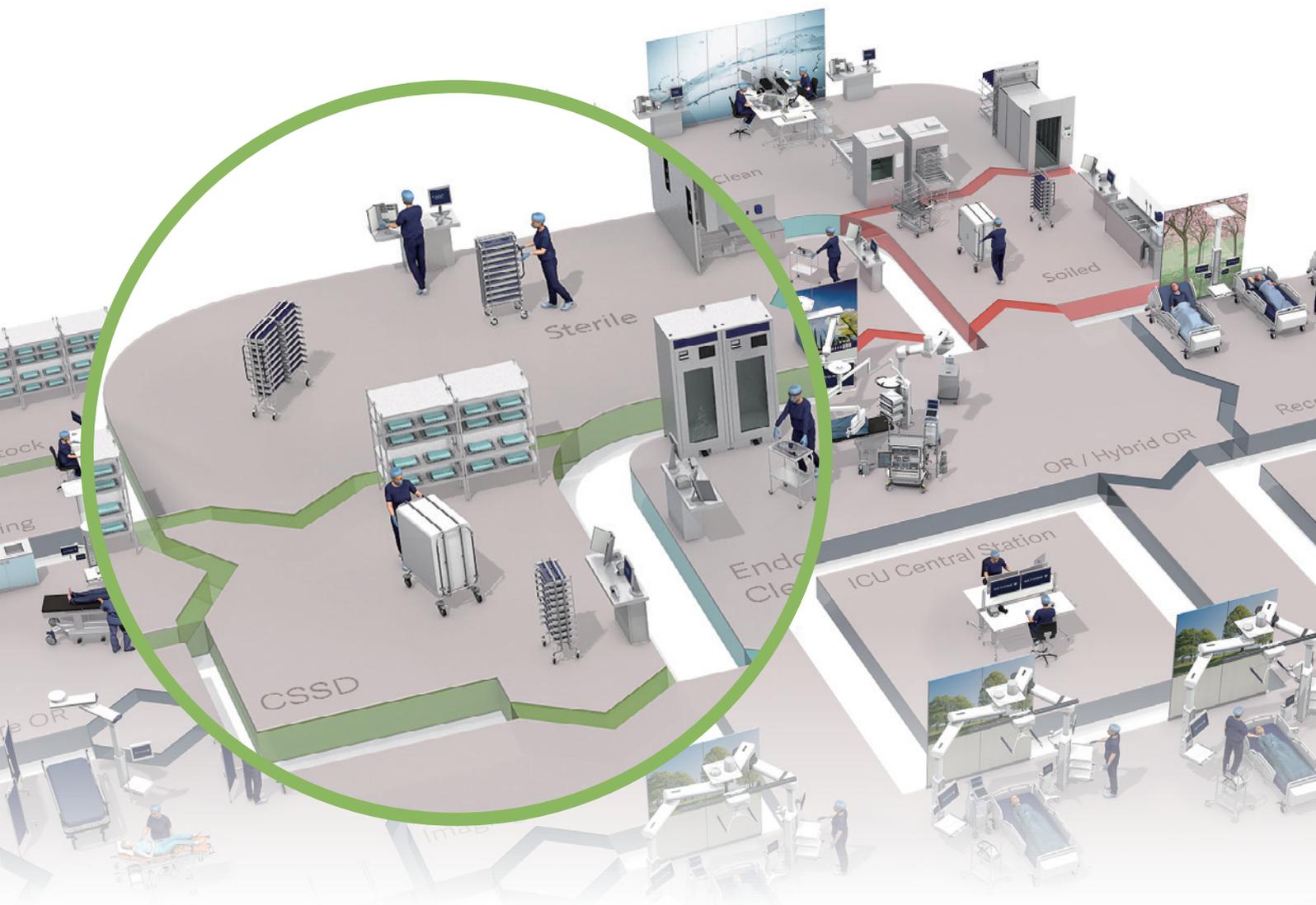

# 3

## Instrument reprocessing: 滅菌ゾーン

滅菌プロセスが完了すると、人間工学に基づいた使いやすい機器を使って器材を搬出します。その後、器材はさらに無菌保管庫に搬送されるか、使用場所に直接搬送されます。ゲティンゲではどのようなタイプの搬送・輸送であっても、適切な機器を用意しています。



## バスケットラック

SPRI

ゲティンゲのSPRI モジュラーワイヤーバスケット用のシングルまたはダブルバスケットラックです。このラックは、滅菌物の通気性を促進し、保管品の検査をできるだけ容易にするため、オープンユニットとして設計されています。バスケットの積み下ろしは、50×20mmのステンレス製水平ガイドレール上をスライドさせることで行います。シングルラックは自立式で、7個のバスケットを収納できます。ダブルラックは、2つのシングルセクションを背中合わせにしたもので、14個のバスケットを収納できます。

シングルラック			ダブルラック		
品番	区画	サイズ (L×D×H)	品番	区画	サイズ (L×D×H)
470467271	2×7	1,245×425×1,775mm	470467371	2×2×7	1,245×425×1,775mm
470467272	3×7	1,840×425×1,775mm	470467372	3×2×7	1,840×425×1,775mm
470467273	4×7	2,440×425×1,775mm	470467373	4×2×7	2,440×425×1,775mm
470467274	5×7	3,035×425×1,775mm	470467374	5×2×7	3,035×425×1,775mm
470467275	6×7	3,630×425×1,775mm	470467375	6×2×7	3,630×425×1,775mm



## ワイヤーストレージシェルフ

清潔なリネン類、器具、包装材料、滅菌済み物品（ディスポーザブルを含む）を保管するための、モジュール式の独立型シェルフユニットです。各ユニットには5つの棚板があり、ワイヤー構造になっているため、空気の循環がよく、同時に器材の点検も容易です。ワイヤー棚は特殊スチール製で、クロムメッキ後、透明エポキシワニスで表面処理されています。特殊な仕上げにより、お手入れも簡単です。シェルフユニットは現場での組み立てが簡単で、すべてのパーツがセットで決まります。オプションのφ125mmキャスターを取り付ければ、移動式収納ユニットとしても使用できます。

奥行：455mm・基本モジュール 棚板5枚		奥行：610mm・基本モジュール 棚板5枚	
品番	サイズ (W×D×H)	品番	サイズ (W×D×H)
478728870	610×455×1,895mm	561737570	610×610×1,895mm
478728871	914×455×1,895mm	561737571	914×610×1,895mm
478728872	1,220×455×1,895mm	561737572	1,220×610×1,895mm
478728873	1,524×455×1,895mm	561737573	1,524×610×1,895mm
478728874	1,830×455×1,895mm	561737574	1,830×610×1,895mm

品番	製品名
464010580	キャスター ロックなし1個
464010581	キャスター ロック可能1個



## スマートディストリビューショントロリー オープン (DTO)



ゲティンゲ DTO は、オープンタイプの搬送台車であると同時に、ワイヤーバスケットやコンテナ用の移動式保管ユニットでもあります。オープン設計のため、個々のパックの確認やピッキングが容易です。積載物は台車の両側から出し入れできます。棚やバスケットは半分まで引き出せるので、簡単に出し入れでき、台車は容易に固定できるので安全に搬送できます。

ゲティンゲのスマートディストリビューショントロリーオープンは、各モデルにシングルバージョンとダブルバージョンがあります。さらに、個別構成が可能なベースモデルが1つあり、棚やバスケットの混載の各顧客の個別構成に合わせてガイドレールを指定し、個別に注文可能です。サポートガイドと棚板の柔軟な配置は、DTOの利用を最大化します。

高品質の回転式キャスター（2つはロック可能）は、トロリーに積載物を満載した状態で移動や操縦を容易にします。これらのトロリーは、ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄・消毒が可能のように設計されています。

### DTO シングル

積載タイプ	製品名	品番	最大積載量	サイズ (L×W×H)
バスケット	DTO シングル SPRI, 10 浅型 or 5 深型	564718170	85kg	736 × 429 × 1,577mm
ミックス	DTO シングル 2 SPRI 型 / 3 シェルフ	564718370	85kg	736 × 429 × 1,577mm
シェルフ	DTO シングル, 5 シェルフ	564718570	85kg	736 × 429 × 1,577mm
個別設定	DTO シングル ベース (ガイドなし)	564718070	85kg	736 × 429 × 1,577mm

### DTO ダブル

積載タイプ	製品名	品番	最大積載量	サイズ (L×W×H)
バスケット	DTO ダブル SPRI, 20 浅型 又は 10 深型	564718770	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm
ミックス	DTO ダブル 4 SPRI 深型 6 シェルフ	564718870	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm
シェルフ	DTO ダブル, 10 シェルフ	564718970	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm
個別設定	DTO ダブル ベース (ガイドなし)	564718670	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm

### オプション

製品名	品番	最大積載量	サイズ (L×W×H)
SPRI 用ガイドペア	564718171	18kg	30 × 425 × 50mm
ISO 用ガイドペア	564718271	18kg	30 × 425 × 50mm
シェルフおよびガイドペア	564718571	18kg	30 × 425 × 50mm
外部輸送ロック	564718470		
ディスプレイカバーラック	560181301		
ディスプレイカバー透明カバー, 50pcs/roll	560125070		
リユースカバー DTO シングル, ブルー	6003000052		
リユースカバー DTO シングル, グリーン	6003000059		
リユースカバー DTO ダブル, ブルー	6003000053		



### 保護カバー

オープンディストリビューショントrolley DTOには、搬送中や保管中に積載物を保護するカバーを取り付けることができます。使い捨てのプラスチックカバーと再利用可能な布製カバーがあります。布製カバーには2つのコーナーにジッパーが付いており、長辺の一方を開くことで簡単に積載物にアクセスできます。

品番	製品名
6003000052	リユースブルカバー DTO シングル、ブルー
6003000059	リユースブルカバー DTO シングル、グリーン
6003000053	リユースブルカバー DTO ダブル、ブルー
560125070	ディスプレイブル透明カバー ,50pcs/roll



### ディスプレイブルカバーラック

移動式ラックにより、ディスプレイブルカバー (560125070) をトrolleyに簡単にかぶせることができます。高品質のステンレス製です。すべての車輪にロックが付いており、取り扱いが便利です。ラックには壁掛けタイプもあります。ディスプレイブル透明カバーは別途ご注文ください。

品番	製品名	サイズ (L×W×H)
560181301	ディスプレイブルカバーラック	700 × 1,000 × 1,940mm
560181302	ディスプレイブルラック壁掛け用	
560125070	ディスプレイブル透明カバー ,50pcs/roll	



### スマートディストリビューショントロリー ハードカバー (DTHC)

W SPRI DIN ISO

このトロリーでは、滅菌コンテナやバスケットを、器具、リネン、ディスポーザブル、麻酔材料と一緒にまとめて、院内の手術部門や外部の病院や保管施設に搬送することができます。ハードカバーは、搬送中の埃や損傷から滅菌物品を保護します。ドアは260度開き、開いた位置で固定できるため、積載物の出し入れの際にも大変便利です。ドアハンドルにはロック装置が付いています。DTHCトロリーは2つのロック可能な旋回キャスターと2つのロック可能な固定キャスターを装備しています。キャスターの直径は160mmです。DTHCトロリーは、棚板を2枚追加することで、DIN STU ½サイズを15個収納できます。標準では3枚の棚板が付属していますが、オプションで棚板を追加することも可能です。各棚には2枚の仕切り板が付属しており、搬送中に積載物を定位置に保つことができます。オプションのピンと牽引バーを使用すれば、牽引も可能です。

品番	製品名	最大積載量	サイズ (L × W × H)
564719070	ディストリビューショントロリーハードカバー (DTHC)	145kg	1,286 × 699 × 1,502mm
564719071	ワイヤシェルフ (仕切2付)		
564719075	ピン&バー (×2)		




### クローズドトロリー

W SPRI DIN ISO

18/10ステンレス鋼の完全溶接された丈夫な構造。  
容量：9STU、3段 (3 × 3STU)、4段 (3 × 3STU) のフレキシブルな棚板。固定キャスター2個、ブレーキ付き回転キャスター2個付き。キャビネットはウォッシャーに適した18/10ステンレス製ハウジング。ホイール寸法160mm。ドアは最大270°まで開きます。

品番	製品名	外寸 (L × W × H)	内寸 (L × W × H)
561720202	クローズドトロリー	1,220 × 735 × 1,450mm	994 × 640 × 1,075mm

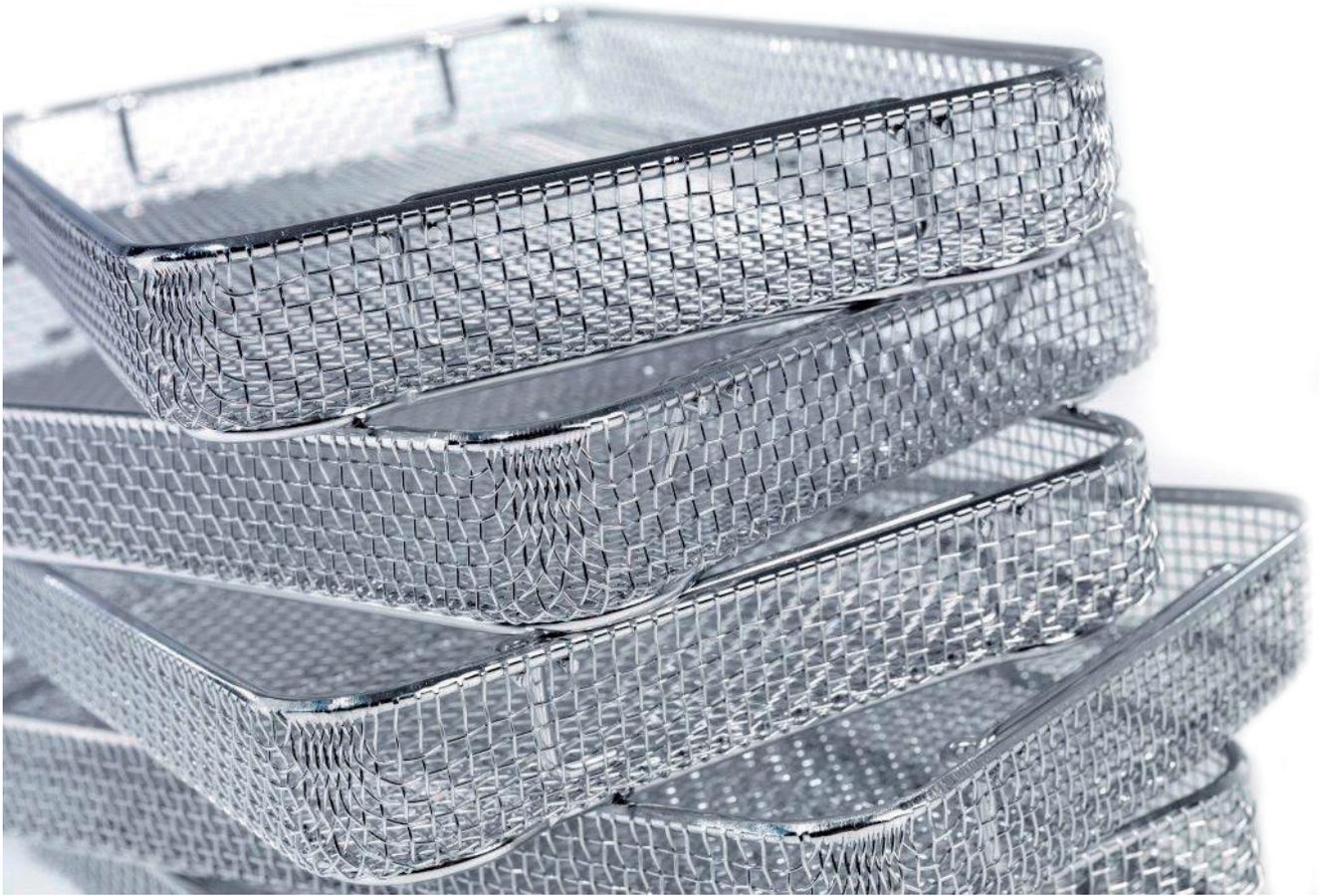

# 4

## トレイ&バスケット

滅菌フローでは、標準化されたモジュール式搬送車がワイヤーバスケットやコンテナの形で、手術室から器具を運び、洗浄、消毒、検査、滅菌を終えて再び手術室へ運ばれます。衛生的に設計されたトレイやバスケットの幅広いラインアップは、ゲティンゲの一貫したシステムの重要な一部を形成しています。扱いやすく、洗浄が簡単で、現代の病院やその他の用途の要求に完璧に適合する、柔軟性のある設計です。



### ワイヤーバスケット



ステンレス製のモジュラーワイヤーバスケットです。ゲティンゲのウォッシュャーディスインフェクター、コンベア、搬入/搬出装置、滅菌装置、保管ラック、トランスポートトrolleyに適しています。積み重ね可能で、空の状態で重ねて保管可能です。

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
561620001	585 × 395 × 195mm	ワイヤーバスケット SPRI 585 × 395 × 195mm
561620101	585 × 395 × 100mm	ワイヤーバスケット SPRI 585 × 395 × 100mm



### ワイヤーバスケット用蓋 SPRI 555 × 385mm



バスケットやコンテナの混載に最適。蓋付きバスケットの上に容器を積み重ねることができ、内容物を傷つける心配がありません。滅菌器へのセット時、保管・輸送時の両方において、柔軟性とスペースの有効活用が可能になります。蓋は電解研磨ステンレス製。

品番	サイズ (L × W)
561685301	555 × 385mm



### ワイヤーバスケット



高品質ステンレススチール製のモジュラーワイヤーバスケット。バスケットは滑らかな仕上げで、連続ワイヤーの大きなメッシュループが付いています。バスケットは積み重ね可能で、扱いやすいように取っ手が付いています。

サイズは1/2STUと1STUがあります。

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
5619247	575 × 280 × 135mm	ワイヤーバスケット 1/2STU 575 × 280 × 135mm
5619248	575 × 280 × 265mm	ワイヤーバスケット 1STU 575 × 280 × 265mm



### ファインメッシュバスケット



このふた付きバスケットは、小型で鋭利な器具の洗浄・消毒工程に最適です。バスケットはステンレス製で、メッシュサイズは1.5mm。

品番	サイズ (L × W × H)
499363700	100 × 100 × 60mm
499363701	60 × 60 × 45mm
499363702	120 × 60 × 45mm
499363703	150 × 60 × 45mm

### ファインメッシュインナーバスケット

**W** **SPRI** **DIN** **ISO**



モジュール式滅菌・処理バスケットおよび器具トレイ用に設計されたファインメッシュ滅菌・処理バスケット。デリケートな器具の洗浄・消毒、超音波洗浄、滅菌の全工程に対応。メッシュサイズ：1.6mm。表面は清潔で、ワイヤー端は露出していません。  
材質：ステンレススチール

ファインメッシュインナーバスケット		
品番	サイズ (L × W × H)	蓋品番
932895	210 × 150 × 40mm	932896
932894	310 × 210 × 40mm	476944000
705300	420 × 310 × 40mm	705320

### 器材用バスケット

**W** **DIN**



機器処理のすべての段階で使用できるモジュール式器材用バスケット。深成型浸漬バスケットとして製造されているため、正確な寸法と不注意な取り扱いに対する安定性が得られます。ステンレス製のワイヤーネット製で、内側に2つのドロップハンドルが装備されています。

品番	サイズ (L × W × H)
LJP-H7501689	480 × 250 × 50mm
6003000621	240 × 250 × 50mm

### 器材用バスケットSPRI

**W** **SPRI** **ISO**



標準サイズの積み重ね可能な器材用バスケットで、器具処理のすべての段階で使用できます。ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄と消毒が容易で、自己乾燥が早いように設計されています。空気と水の流れを良くするのに十分な大きさでありながら、機器の損傷を防ぐのに十分な小ささを備えたメッシュサイズ (6.5mm) のステンレス鋼の電解研磨ワイヤーで作られています。

トレイを最大限に活用するために、2種類の蓋から選択してください。  
蓋はスナップ式ロック。  
トレイの内側に置くための取っ手付き蓋。洗浄消毒中、小さな器具を所定の位置に保ちます。

器材用バスケットSPRI			
品番	サイズ (L × W × H)	蓋品番	取手付蓋品番
6003000701	450 × 340 × 70mm	477345200	498816902
6003000702	340 × 250 × 70mm	477345300	498816901
6003000703	250 × 170 × 70mm	498637400	498816900



### パンチングバスケット



平らなワイヤーベースと穴のあいた側壁で、器具処理のあらゆる段階で使用できます。穴のあいた側壁は、小さな器具や梱包材を損傷から守ります。ステンレススチール製。内側に2つのドロップハンドルを装備。

品番	サイズ (L × W × H)
6003000237	480 × 250 × 60mm
6003000238	240 × 250 × 60mm 販売終了



### 内視鏡用バスケット



内視鏡器具の洗浄、滅菌、保管、輸送に適しています。ワイヤーの先端が開いたり、鋭利な突起物がない構造。特殊な開閉装置付きの取り外し可能な蓋。シリコン製ホルダーが器具をしっかりと保持。

材質：ステンレススチール

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
561620701	290 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット1セット用
561620702	290 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット2セット用
561620801	460 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット1セット用
561620802	460 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット2セット用
561620901	670 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット1セット用



### 識別タグ



滅菌保管のバスケットに使用。

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
561585401	85 × 45mm (+15mm loop)	識別タグ プラスチックポケット付き



## 器具固定システム



一般器具、バヨネット型器具、ロングシャンク型器具を器材用バスケットに安全に収納します。DIN 58952-2に準拠したSTU規格のすべての器材用バスケットおよびSPRIバスケットに適合。必要に応じて、器材バスケットにしっかりと固定できます。収納する機器に合わせて無段階に調整可能。洗浄、滅菌、インスツルメンテーションなど、インスツルメントサイクルの全工程で使用可能。



品番	バスケット長 240mm	サイズ (L × W × H)
1	561958001 マイクロ器材ホルドシステム	231 × 227 × 50mm
2	561958101 マイクロ器材ホルドシステム	231 × 227 × 50mm
3	561958501 マイクロ器材ホルドシステム	214 × 240 × 50mm
バスケット長 480mm		サイズ (L × W × H)
4	561958201 マイクロ器材ホルドシステム	406 × 231 × 52mm
5	561958301 マイクロ器材ホルドシステム	406 × 231 × 52mm
6	561958401 マイクロ器材ホルドシステム	406 × 231 × 52mm



# 5

## その他製品

### 洗剤管理

多くの滅菌供給部門（CSSD）では、用手洗浄エリアで計量カップで目視にて洗剤を計量し投入していることから、人によって計量に誤差が生じています。ゲティングは、用手洗浄エリアにおいても一貫した結果を得るための製品をご提供しています。



## CSD DoseTech 洗剤管理システム

CSD DoseTechは、シンプルで使いやすく、正確な量の洗剤をシンクに供給する洗剤投入システムで、ボトルに取り付けるポンプのようなばらつきをなくします。

CSD DoseTech 洗剤管理システムは、プレウォッシュシンクに正確な量の浸漬用洗剤を投入するためのディスペンシングシステムです。この洗剤投入システムは、電子制御のペリスタルティックポンプを使用して洗剤を注入します。フルシンクおよびハーフシンクレベルの特定の汚染条件に合わせて複数の注入レベルをプログラムすることができ、自動汚染除去工程の前に最適な洗浄結果を提供します。システムは、主制御／ポンプユニット、水温モニター、錘とフィルター付き洗剤供給ライン、逆止弁付き洗剤吐出ライン、および取り付け金具で構成されています。このシステムは、爆発の危険性がある環境では使用できません。

品番	製品名	備考
6003001000	CSD DoseTech フローメーター	USBポート、温度センサー、電源アダプター付き
6003001012	フットペダルコントロールユニット	
6003001013	レベルセンサー 11 (280mm)	280mm (11インチ)
6003001014	レベルセンサー 14 (355mm)	355mm (14インチ)
6003001375	シンクトップ取付キット	
503662700	LEVEL SENSOR L=800MM	スペアパーツ







Getingeは、すべての人と地域社会が最善のケアを受け得ることを願い、病院やライフサイエンス関連施設に、臨床結果の向上と最適なワークフローの実現を適える製品・ソリューションを提供しています。その領域は、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理、ライフサイエンスといった多様な領域にわたります。Getingeは、世界で10,000人以上の従業員を擁し、製品・ソリューションは135か国以上の国で使用されています。

## ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

サージカルワークフローズ事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL : 03-5463-8313 FAX : 050-3000-1988

第一種医療機器製造販売業許可番号 : 13B1X00176

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

[www.getinge.com/jp](http://www.getinge.com/jp)