



사용지침

Maquet Rolite XL 시리즈

저작권

모든 권리 보유. 저작권법에 따라 허용되는 경우를 제외하고 사전 서면 동의 없이 본 문서를 무단 복제, 각색 또는 번역하는 것은 금지되어 있습니다.

© Copyright 2024

Maquet SAS

기술 발전에 따라 변경 가능

이 설명서에 제시된 그림과 기술 사양은 향후 제품 개발에 따라 실제 제공되는 제품과 다소 다를 수 있습니다.

V09 04.08.2025



목차

1	서론	7
1.1	서문	7
1.2	책임의 한계	7
1.3	본 제품과 관련된 기타 문서	7
1.4	문서에 대한 정보	7
1.4.1	약어	8
1.4.2	문서에 사용된 기호	8
1.4.2.1	참조	8
1.4.2.2	숫자	8
1.4.2.3	조치 및 결과	8
1.4.2.4	메뉴 및 버튼	8
1.4.2.5	위험 수준	9
1.4.2.6	표시	9
1.4.3	정의	9
1.4.3.1	사람 그룹	9
1.4.3.2	조명의 종류	10
1.5	제품과 포장에 사용된 기호	10
1.6	제품 개요	11
1.6.1	부품	13
1.6.1.1	라이트헤드	13
1.6.2	옵션	17
1.6.2.1	Maquet PowerLED II 옵션	17
1.6.2.2	Volista 옵션	17
1.6.3	부속품	19
1.6.3.1	OHDII FHD QL AIR05 무선 시스템 카메라(Volista 라이트헤드에만 해당)	19
1.6.3.2	QL+ 핸들 브래킷(Maquet PowerLED II에만 해당)	19
1.6.3.3	QL 핸들 브래킷(Volista에만 해당)	20
1.6.3.4	LMD (Maquet PowerLED II / Volista VSTII에만 해당)	21
1.6.3.5	전원 케이블	21
1.7	장치 식별 라벨	22
1.8	관련 규격	23
1.9	사용 목적에 관한 정보	27
1.9.1	사용 목적	27
1.9.2	대상 사용자	27
1.9.3	부적절한 사용	28
1.9.4	금기사항	28
1.10	필수 성능	28
1.11	임상적 이점	28
1.12	보증	28
1.13	제품 수명	28
1.14	환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 지침	29



2	안전 관련 정보	30
2.1	환경 조건	30
2.2	안전 지침	30
2.2.1	제품의 안전한 사용	30
2.2.2	전기적	32
2.2.3	광학	32
2.2.4	감염	32
2.3	제품에 안전 라벨 부착	33
3	제어 인터페이스	34
3.1	라이트헤드 키패드	35
3.2	터치 스크린	36
4	사용	39
4.1	사용 전 일일 점검	39
4.2	조명 제어	42
4.2.1	조명 켜기/끄기	42
4.2.1.1	이동형 조명장치 작동	42
4.2.1.2	벽면 키패드에서	43
4.2.1.3	터치 스크린에서	43
4.2.2	조명 조정	44
4.2.2.1	벽면 키패드에서	44
4.2.2.2	터치 스크린에서	45
4.2.3	주변 조명	46
4.2.3.1	벽면 키패드에서	46
4.2.3.2	터치 스크린에서	47
4.2.4	AIM AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT*	48
4.2.4.1	라이트헤드 키패드에서(Maquet PowerLED II에만 해당)	48
4.2.4.2	터치 스크린에서	49
4.2.5	Volista VisioNIR* (VSTII에만 해당)	50
4.2.6	컴포트 라이트*(이 옵션은 Maquet PowerLED II에서만 사용할 수 있음)	51
4.2.7	LMD* (Maquet PowerLED II / Volista VSTII에만 해당)	52
4.2.8	즐거찾기	53
4.2.8.1	즐거찾기 선택/저장	53
4.2.8.2	공장 사전 설정값	54
4.3	조명장치의 위치 설정	56
4.3.1	이동형 조명장치 이동	56
4.3.2	멀균 재사용 핸들 장착	58
4.3.2.1	라이트헤드의 STG PSX 멀균 재사용 핸들 설치 및 제거	58
4.3.2.2	라이트헤드의 STG HLX 멀균 재사용 핸들 설치 및 제거	59
4.3.2.3	DEVON®/DEROYAL®** 핸들 설치 및 제거	60
4.3.2.4	STG PSX VZ 멀균 재사용 핸들 설치 및 제거	61
4.3.3	라이트헤드 조작	62
4.3.4	위치 설정 보조 레이저(Maquet PowerLED II에만 해당)	64
4.3.4.1	라이트헤드 키패드에서	64
4.3.4.2	터치 스크린을 사용하여	65
4.3.5	사전 위치 설정의 예	65



4.3.6	이동형 조명장치의 보관	66
4.4	QL+ 장치 설치/제거	67
4.4.1	Maquet PowerLED II 라이트헤드에 장치 장착	67
4.4.2	장치 분해.....	68
4.5	QL 장치 설치/제거	69
4.5.1	장치의 위치 사전 설정.....	69
4.5.1.1	카메라와 LMD QL에	69
4.5.1.2	라이트헤드에서	70
4.5.2	라이트헤드에 장치 장착	70
4.5.3	장치 분해.....	71
4.5.4	Quick Lock 핸들 브래킷	72
4.6	카메라 사용	73
4.6.1	무선 비디오 시스템(Volista 라이트헤드에만 해당).....	73
4.6.2	카메라 제어	75
4.6.2.1	라이트헤드 키패드에서	75
4.6.2.2	터치 스크린에서	75
4.6.3	카메라의 방향 조정	78
4.7	설정 및 기능.....	79
4.7.1	화면 밝기.....	80
4.7.2	날짜, 시간 및 스톱워치/타이머 기능.....	80
4.7.3	TILT 핸들	81
4.7.4	정보	83
4.8	비상 배터리.....	84
4.8.1	표시등	84
4.8.2	배터리 시험 실시.....	85
4.8.2.1	터치 스크린에서	85
5	문제 해결.....	86
5.1	알람 표시등	86
5.1.1	라이트헤드 및 벽면 키패드의 표시등	86
5.1.2	터치 스크린의 표시등.....	86
5.2	가능한 이상 및 고장	87
6	7 - 세척/소독/멸균	89
6.1	장치의 세척 및 살균	89
6.1.1	기기 세척.....	89
6.1.2	기기 소독.....	90
6.1.2.1	사용 가능한 소독제.....	90
6.1.2.2	허용된 활성성분	90
6.2	Maquet Sterigrip 멸균 재사용 핸들의 세척 및 살균	91
6.2.1	세척 준비.....	91
6.2.2	수동 세척 시	91
6.2.3	세척소독기를 이용한 세척 시	91
6.2.4	Maquet Sterigrip 핸들의 살균.....	92
7	유지보수.....	93



8	기술적 특성	94
8.1	광학 특성	94
8.1.1	Maquet PowerLED II 라이트헤드의 광학 특성	94
8.1.2	VSTII 라이트헤드의 광학 특성	96
8.1.3	VCSII 라이트헤드의 광학 특성	98
8.2	전기적 특성	100
8.2.1	Maquet PowerLED II	100
8.2.2	Volista VSTII	100
8.2.3	Volista VCSII	100
8.3	기계적 특성	101
8.3.1	Maquet PowerLED II	101
8.3.2	Volista	101
8.4	카메라와 수신기의 기술적 특성	101
8.5	기타 특성	102
8.6	전자파 적합성(EMC) 선언	103
8.6.1	FCC PART 15(미국에만 해당)	104
9	폐기물 관리	105
9.1	포장 제거	105
9.2	제품	105
9.3	전기 및 전자 부품	105

1 서론

1.1 서문

귀 병원은 Getinge의 혁신적인 의료 기술을 선택했습니다. 귀 병원의 신뢰에 감사드립니다.

Getinge는 수술실, 하이브리드 수술실, 유도실, 집중치료실, 환자 수술을 위한 세계 최고의 의료 장비 공급업체 중 하나입니다. Getinge는 제품을 개발할 때 항상 의료진과 환자의 요구를 최우선으로 고려합니다. Getinge는 안전, 효율성 또는 경제의 측면에서 병원의 제약에 대해 솔루션을 제공합니다.

Getinge는 수술조명장치, 천장걸이형 디스펜서 암 및 멀티미디어 솔루션 분야의 노하우를 바탕으로 환자와 의료진에서 최상의 서비스를 제공하기 위해 품질과 혁신을 무엇보다 중시합니다. Getinge 수술조명장치의 디자인과 혁신은 세계적으로 유명합니다.

1.2 책임의 한계

제품 변경

Getinge의 사전 승인 없이 제품을 변경할 수 없습니다.

기기의 올바른 사용

Getinge는 본 사용 설명서의 지시를 따르지 않아 발생한 직·간접적인 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

설치 및 유지보수

설치, 유지보수 및 해체 작업은 Getinge에서 교육을 받은 공인된 직원이 수행해야 합니다.

장치에 대한 교육

Getinge의 공인된 직원이 직접 장치에서 교육을 제공해야 합니다.

다른 의료기기와의 호환성

호환성에 대한 정보는 기술적 특성 [▶ 페이지 94] 장에 자세히 설명되어 있습니다.

호환되는 부속품은 관련 장에 자세히 설명되어 있습니다.

사고 발생 시

장치와 관련하여 발생하는 모든 심각한 사고는 제조사와 사용자 및/또는 환자가 속한 회원국의 관할 기관에 통보해야 합니다.

1.3 본 제품과 관련된 기타 문서

- 설치 설명서(참조번호: ARD01834)
- 유지보수 설명서(참조번호: ARD01830)
- 수리 설명서(참조번호: ARD01832)
- 제거 설명서(참조번호: ARD01835)

1.4 문서에 대한 정보

이 사용 설명서는 일상적으로 제품을 취급하는 사용자, 병원의 인사 담당자 및 관리자를 위한 것입니다. 설명서의 목적은 사용자에게 제품의 설계, 안전 및 작동에 익숙해지도록 하는 데 있습니다. 설명서는 여러 장으로 구성되어 있습니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 제품을 처음 사용하기 전에 사용 설명서를 전체적으로 주의 깊게 읽으십시오.
- 항상 사용 설명서에 포함된 정보에 따라 진행하십시오.
- 이 사용 설명서를 장비 가까이에서 보관하십시오.

1.4.1 약어

AIM	AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT
EMC	전자파 적합성
FSP*	유량 안정성 프로그램(Flux Stability Program)
HD	고해상도(High Definition)
IFU	사용 설명서(Instruction For Use)
K	Kelvin
LED	발광 다이오드(Light Emitting Diode)
LMD	휘도관리장치
lx	lux
해당 없음	해당 사항 없음
QL(+)	Quick Lock(+)
SF	단일 포크(Single Fork)
WB	화이트 밸런스(White Balance)

1.4.2 문서에 사용된 기호

1.4.2.1 참조

설명서에서 다른 페이지에 대한 참조는 "»" 기호로 표시됩니다.

1.4.2.2 숫자

그림과 텍스트의 숫자는 사각형 1 안에 있습니다.

1.4.2.3 조치 및 결과

사용자가 수행할 작업은 숫자로 순서가 지정되어 있으며 "➤" 기호는 작업의 결과를 나타냅니다.

예:

전제 조건:

- 멸균 재사용 핸들은 제품과 호환됩니다.
1. 핸들을 브래킷에 설치합니다.
 - “딸깍” 소리가 납니다.
 2. 다시 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 핸들을 돌려서 잠급니다.

1.4.2.4 메뉴 및 버튼

메뉴와 버튼의 이름은 굵게 표시됩니다.

예:

1. 저장 버튼을 누릅니다.
 - 변경 사항이 저장되고 **즐거찾기** 메뉴가 표시됩니다.

1.4.2.5 위험 수준

안전 지침의 텍스트는 위험의 유형과 위험을 방지하는 방법을 설명합니다. 안전 지침은 다음 세 가지 수준으로 분류됩니다.

기호	위험도	의미
	위험!	치명적이거나 사망으로 이어질 수 있는 심각한 부상을 초래할 수 있는 직접적이고 즉각적인 위험을 나타냅니다.
	경고!	부상, 건강상의 위험 또는 부상으로 이어지는 심각한 물질적 피해를 초래할 수 있는 잠재적 위험을 나타냅니다.
	주의!	물질적 피부를 초래할 수 있는 잠재적 위험을 나타냅니다.

도표 1: 안전 지침의 위험 수준

1.4.2.6 표시

기호	표시의 성격	의미
	지침	부상 또는 물질적 피해의 위험이 없는 추가 지원 또는 유용한 정보.
	환경	폐기물 재활용 또는 적절한 처리에 대한 정보.

도표 2: 문서에 사용된 표시의 유형

1.4.3 정의

1.4.3.1 사람 그룹

사용자

- 사용자란 자격을 갖추었거나 공인된 사람으로부터 교육을 장치를 사용할 권한이 있는 사람을 말합니다.
- 사용자는 장치를 원래 의도된 용도대로 안전하게 사용할 책임이 있습니다.

자격을 갖춘 직원:

- 자격을 갖춘 직원이란 의료 기술 분야의 전문 교육을 통해 지식을 습득하였거나 수행한 작업으로 안전 규칙에 대해 전문적 경험과 지식을 습득한 직원을 말합니다.
- 의료 기술 전문직에 자격증을 요구하는 국가에서 자격을 갖춘 직원이 되려면 허가를 받아야 합니다.

1.4.3.2 조명의 종류

수술조명장치

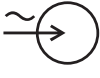
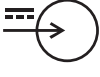
외과 수술에 조명을 제공하기 위해 광선을 방출하고 다른 광선과 독립적으로 방향을 지정할 수 있는 조명입니다. 수술조명장치가 하나밖에 없는 경우에는 고장 발생 시 그 자체로 안전할 수 없습니다. 하지만 다른 수술조명장치와 함께 사용하는 경우에는 어느 한 조명장치에 고장이 발생하더라도 수술 조명 시스템은 안정적으로 작동합니다.

수술 조명 시스템

치료 및 진단 작업을 용이하게 하고 수술실에서 사용하도록 설계된 다양한 수술 조명의 조합. 수술 조명 시스템은 첫 번째 결함이 발생한 경우에도 환자의 신체를 국부적으로 비출 수 있도록 고장에 대비한 안전장치를 갖추고 적절한 중앙 조명을 제공해야 합니다.

예: 수술 조명 시스템은 이동형 조명장치 2개 또는 이동형 조명장치 1개와 함께 사용되는 다른 수술조명장치(간단한 천장걸이형 또는 벽걸이형 수술조명장치) 1개로 구성됩니다.

1.5 제품과 포장에 사용된 기호

	사용 지침(IEC 60601-1:2012)을 준수하십시오		CE 마크(유럽)
	사용 지침(IEC 60601-1:2005)을 준수합니다		UL 마킹(캐나다 및 미국)
	사용 지침(IEC 60601-1:1996)을 준수합니다		일반 폐기물과 함께 버리지 말 것
	제조업체 + 제조년월일		의료기기 마킹(MD)
	제품 참조		의료기기 고유 식별 코드(UDI)
	제품 일련번호		포장 방향
	AC 입력		깨지기 쉬움, 취급 주의
	DC 입력		비를 피할 것
	DC 출력		보관 온도 범위
	대기		보관 습도 범위
	레이저 방사		보관 대기압 범위
	등전위 플러그		사용 위치에서 스위블 피트 잠금

	위험: 제품 내부에 절연되지 않은 전압이 존재합니다		전환 위험: 바퀴를 고정시킨 상태에서 이동형 조명장치를 밀거나 위에 기대지 마십시오.
 	경사진 지형에서 옮길 때는 몸을 라이트헤드 쪽에 오도록 합니다. 경사진 지형에서만 당겨서 옮길 수 있습니다. 배터리는 경사의 아래쪽으로 향해야 합니다.	 	ROLITE 이동형 조명장치는 밀어서 옮깁니다. 당겨서 옮기면 안 됩니다. ROLITE 이동형 조명장치는 라이트헤드 암을 접은 상태에서 옮겨야 합니다.
	해당 국가의 법적 대표		

1.6 제품 개요

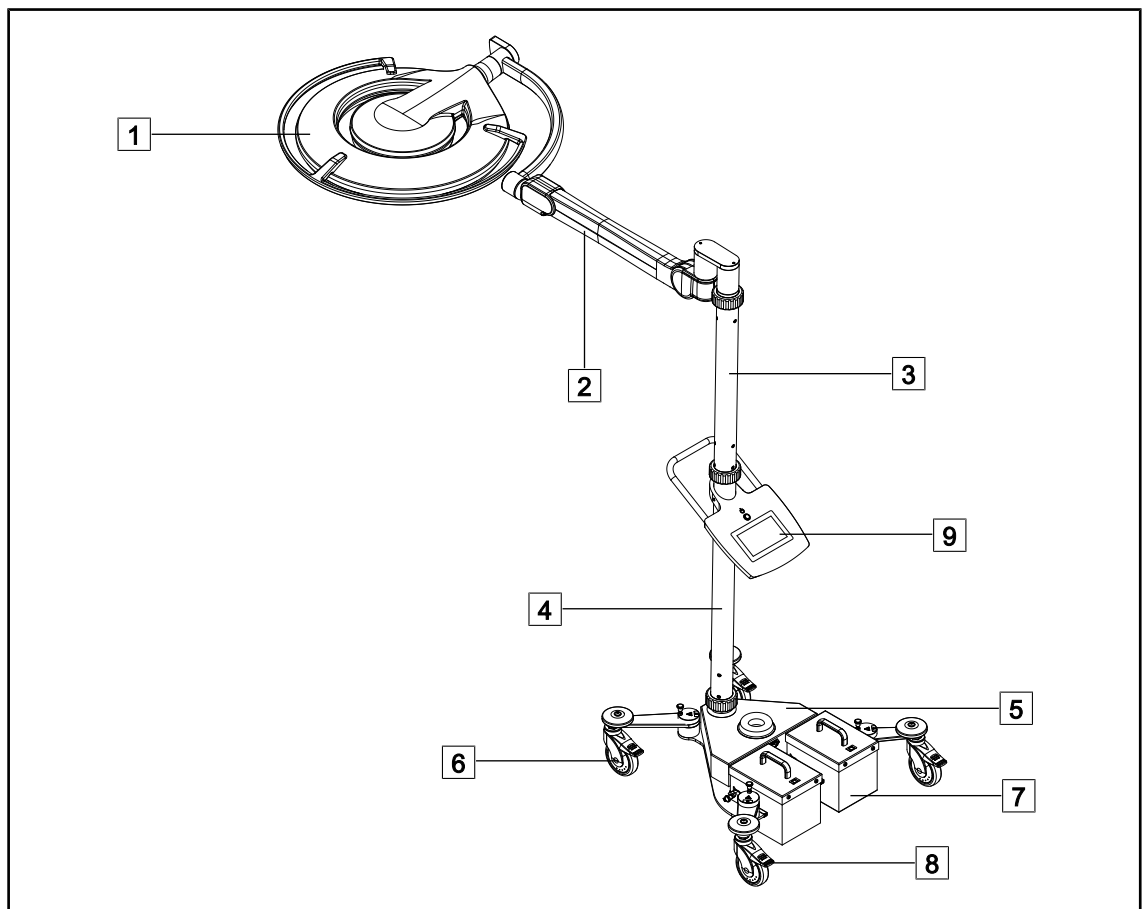


그림 1: Maquet Rolite PowerLED II 개요

- | | |
|---|--|
|  라이트헤드 |  스윙블 캐스터 |
|  스프링 암 |  배터리 |
|  상부 폴 |  캐스터 브레이크 |
|  하부 폴 |  제어 인터페이스 |
|  받침대 | |

기능	Volista VCSII	Volista VSTII	Maquet PWDII
부스트 모드	✓	✓	✓
초점 직경 변경	✓	✓	✓
주변 조명	✓	✓	✓
AIM 모드	✗	✓	✓
레이저 포지셔닝 시스템	✗	✗	✓
라이트헤드 키보드 향균 필름	✗	✗	✓
주문 시 색온도 선택	✗	✗	✓
가변 색온도	✓	✓	✗
Volista VisioNIR	✗	✓	✗
컴포트 라이트*	✗	✗	✓
무선 시스템 카메라	✓	✓	✗
TILT 장착형 QL+ 핸들 브래킷	✗	✗	✓
TILT 장착형 QL 핸들 브래킷	✓	✓	✗
멸균 재사용 핸들	✓	✓	✓
LMD	✗	✓	✓
전원 케이블	✓	✓	✓

도표 3: 다양한 라이트헤드에서 사용할 수 있는 기능 및 액세서리

1.6.1 부품

1.6.1.1 라이트헤드

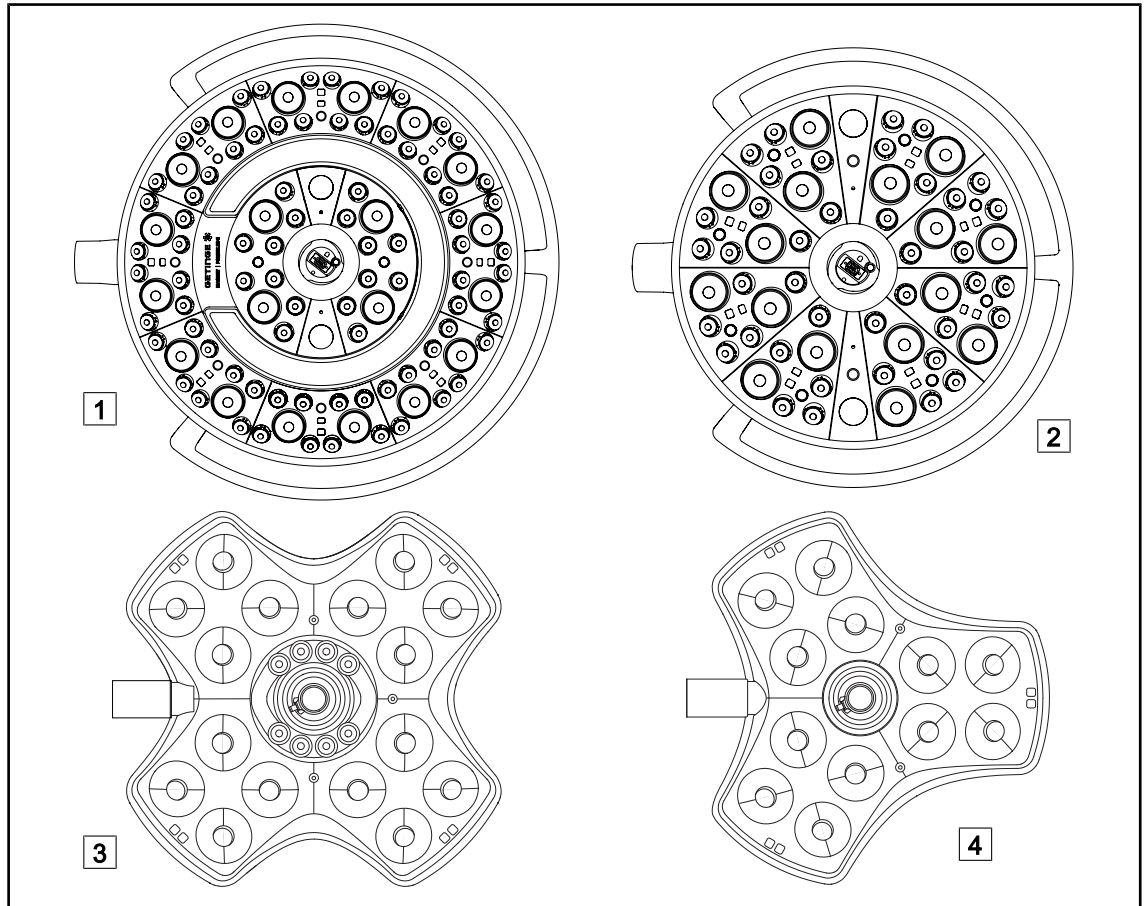


그림 2: Maquet Rolite 라이트헤드

- 1 Maquet PowerLED II 700 라이트헤드
- 2 Maquet PowerLED II 500 라이트헤드

- 3 Coupole Volista VSTII/VCSII 600
- 4 Coupole Volista VSTII/VCSII 400

부스트 모드

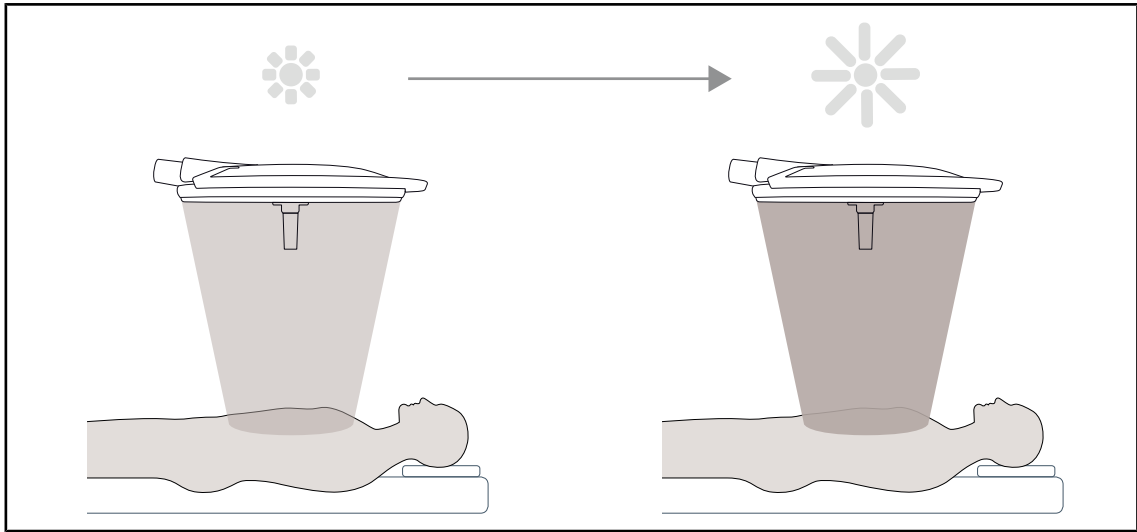


그림 3: 부스트 모드

부스트 모드(예비 추가 전원)는 수술 조건에 따라 필요한 경우 조명을 최대한 높일 수 있습니다. 표준 조건 하에서는 불필요하며, 필요한 경우에만 활성화되어 광출력을 강화합니다.

초점 직경 변경

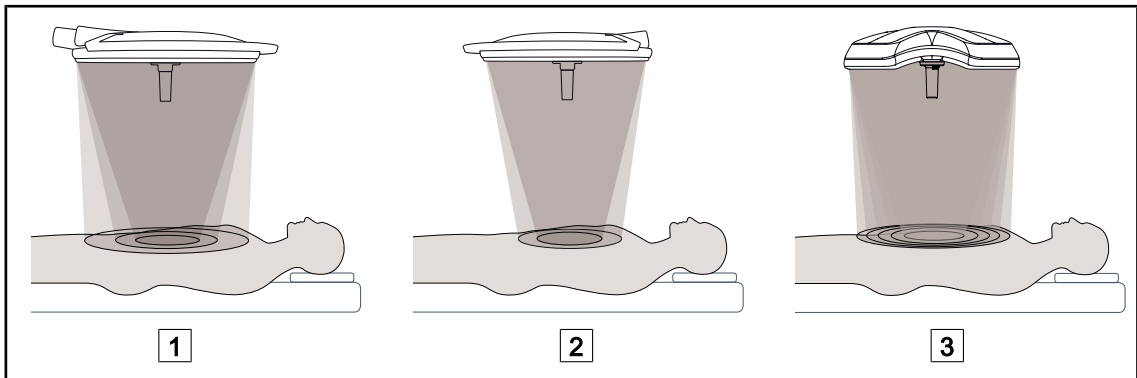


그림 4: 초점 직경 변경

1 Maquet PowerLED II 700

3 Volista VSTII/VCSII 400/600

2 Maquet PowerLED II 500

초점 직경을 변경하면 절개 크기에 맞게 시술야의 크기를 조정할 수 있습니다. Maquet PowerLED II 조명 시스템을 사용하면 Maquet PowerLED II 700에 대해서는 이 직경을 3단계(소형, 중형 및 대형)로 조정할 수 있고, PowerLED II 500 패키지에 대해서는 2단계(소형 및 중형)로 조정할 수 있습니다. Volista 조명 시스템은 초점 직경을 5단계로 조정할 수 있습니다.

AIM 모드 (Maquet PowerLED II / Volista VSTII에만 해당)

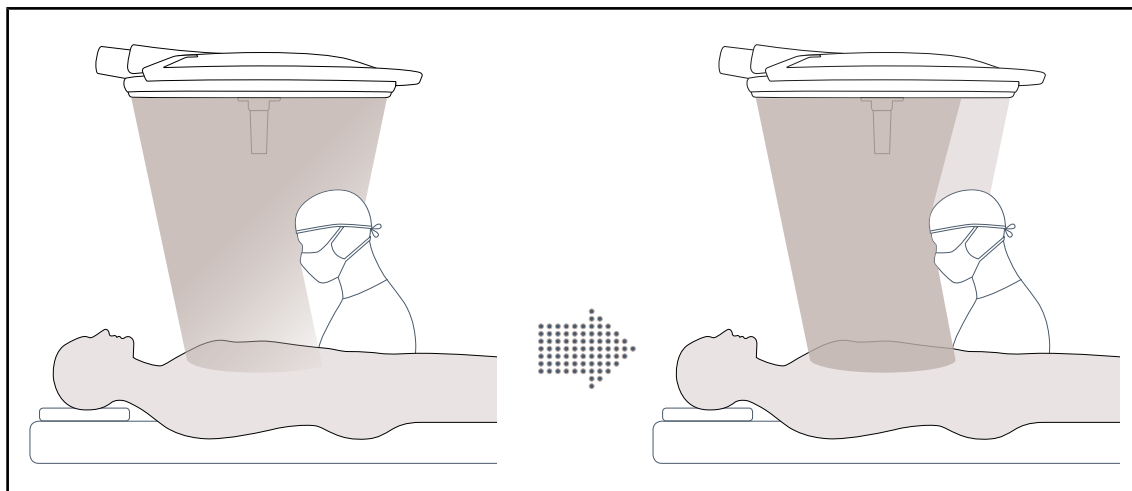


그림 5: 의사 1~2명

이 기능은 라이트헤드와 시술야 사이에 장애물(머리, 의사의 어깨)가 위치할 때 발생하는 조명 손실을 자동으로 보정합니다. 가려진 LED의 조명이 희미해지고 다른 LED의 조명이 밝아지면서

- 시술야에 대한 안정된 조명이 확보되고
- 의사의 움직임이 완전히 자유로워져
- 시술환경이 개선됩니다

주변 조명

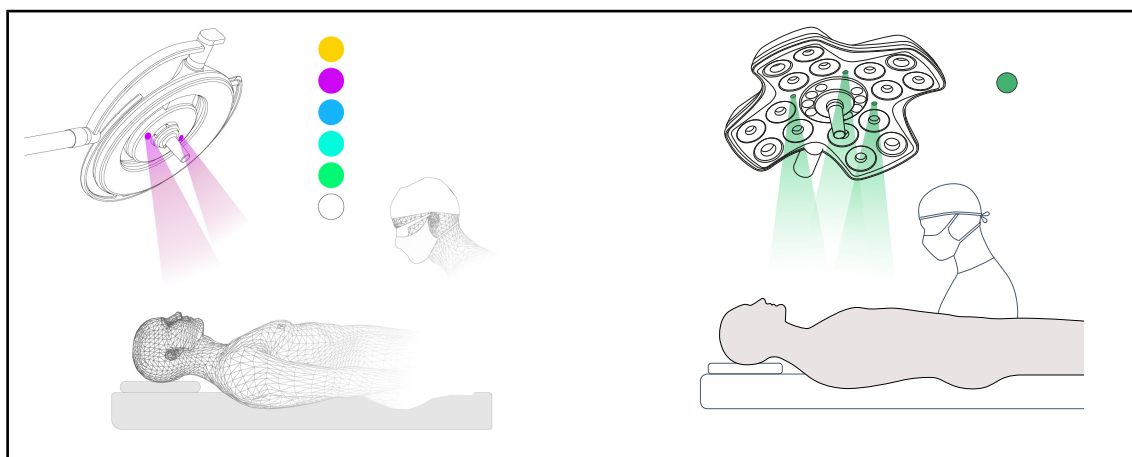


그림 6: 주변 조명

주변 조명은 최소 절개 수술 과정에서 화면이 보다 선명하게 잘 보이게 대비를 강화하도록 설계되었습니다. 주변 조명은 최소 절개 수술 과정에서 수술진과 마취사에게 최소한의 조명을 제공합니다. 또한 평온한 분위기를 조성하여 환자를 맞이할 때 스트레스를 줄여 줍니다.

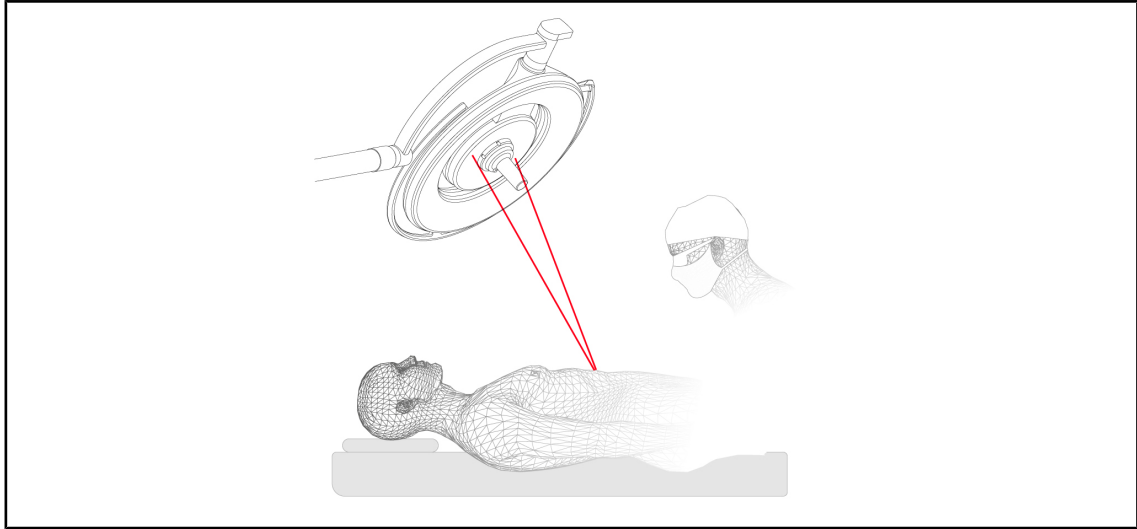
위치 설정 보조 레이저 기능(Maquet PowerLED II에만 해당)

그림 7: Maquet PowerLED II의 위치 설정 보조 레이저

이 기능은 절개 수술과 관련하여 수술조명장치를 이상적인 위치에 배치할 수 있도록 해줍니다. 관심 영역에 최대 조명이 보장되므로 의사가 최적의 조건에서 작업을 할 수 있습니다.

**경고!****부상 위험**

눈이 레이저에 장시간 노출되면 눈 부상을 입을 수 있습니다.

환자의 눈을 보호하지 않은 상태에서 레이저 빔이 환자의 눈을 향하도록 하지 마십시오. 사용자는 레이저를 직접 쳐다보지 말아야 합니다.

라이트헤드 키보드 항균 필름(Maquet PowerLED II에만 해당)

라이트헤드에서 가장 많이 사용하는 영역(키보드, 외부 핸들)에 PVC 필름과 은이온이 들어 있는 페인트를 적용하여 두 세척 작업 간의¹ 효과를 보장합니다. 세척 작업 중에는 물론 수분이 있는 상태에서도 은이온이 방출됩니다. 은이온은 박테리아와 접촉하여 신진 대사를 차단하고 증식 메커니즘을 방해하여 박테리아를 파괴합니다.

¹ ISO 22196: 2011 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*) 및 대장균의 감소량이 LOG 2보다 큼니다.

1.6.2 옵션

1.6.2.1 Maquet PowerLED II 옵션

컴포트 라이트*

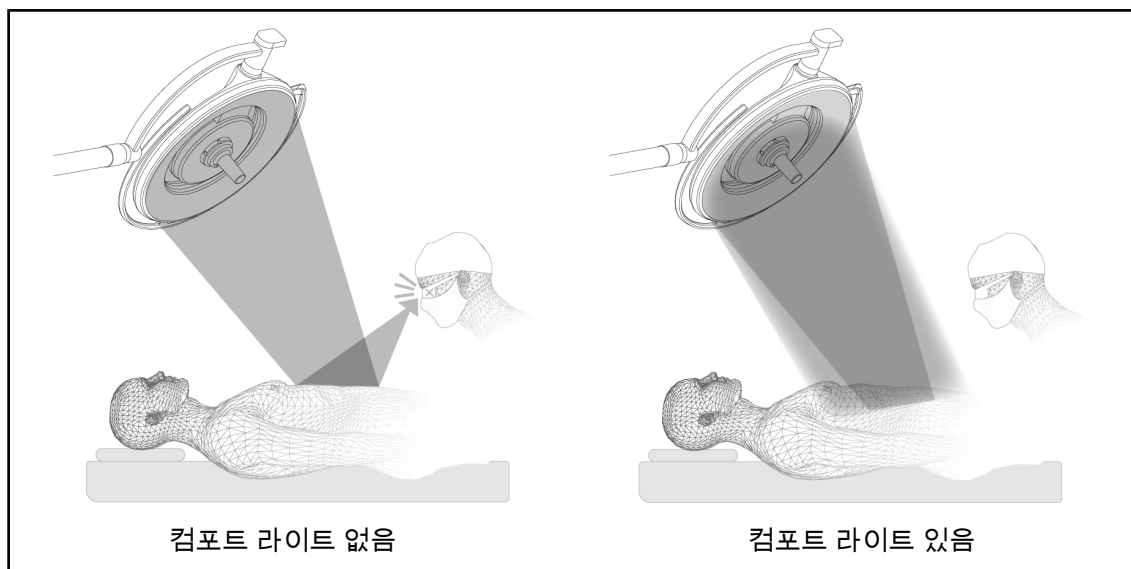


그림 8: 컴포트 라이트

이 기능은 주요 수술 영역 주변에 낮은 강도의 광초점을 형성합니다. 주변 조명으로 인해 명암 대비가 감소됨에 따라 특히 눈부심을 완화시켜 수술진의 편안함과 시각적 성능이 향상됩니다.

색온도

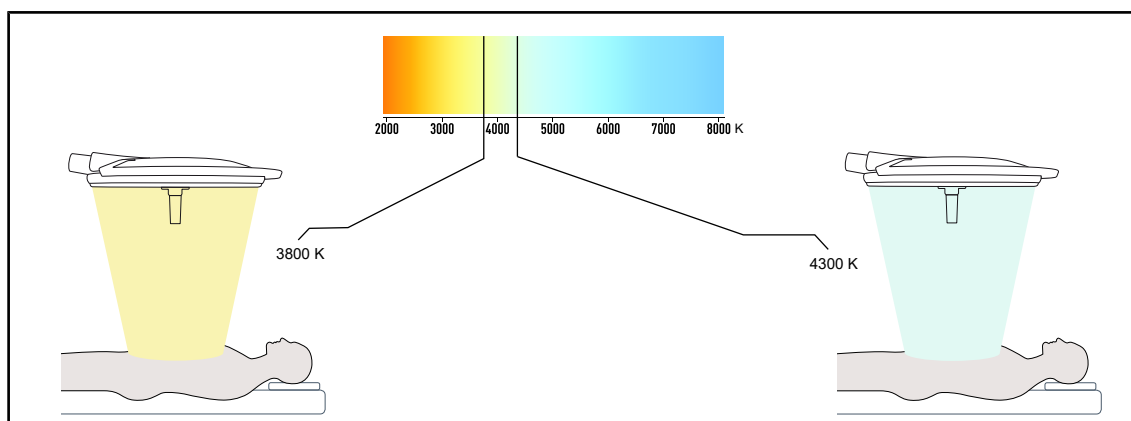


그림 9: 3800K 및 4300K의 색온도

Maquet PowerLED II 수술조명장치는 다음 두 가지 색온도 버전으로 제공됩니다: 3800K 및 4300K.

1.6.2.2 Volista 옵션

가변 색온도

VSTII 수술조명장치에는 다음 3가지 색온도가 있습니다: 3,900K, 4,500K & 5,100K. VCSII 수술조명장치에는 다음 3가지 색온도가 있습니다: 3,900K, 4,200K & 4,500K.

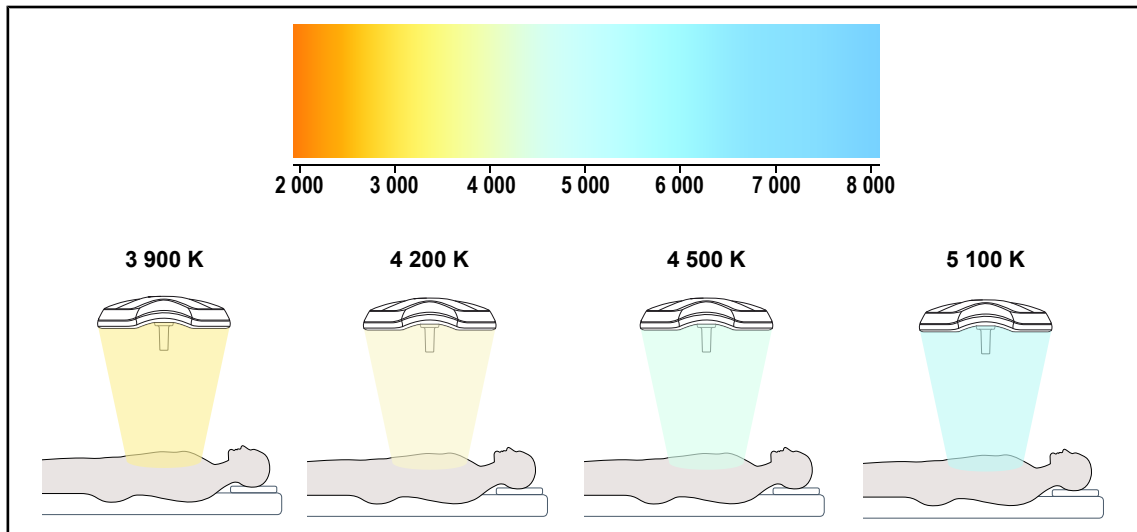


그림 10: 색온도

Volista VisioNIR(VSTII에만 해당)

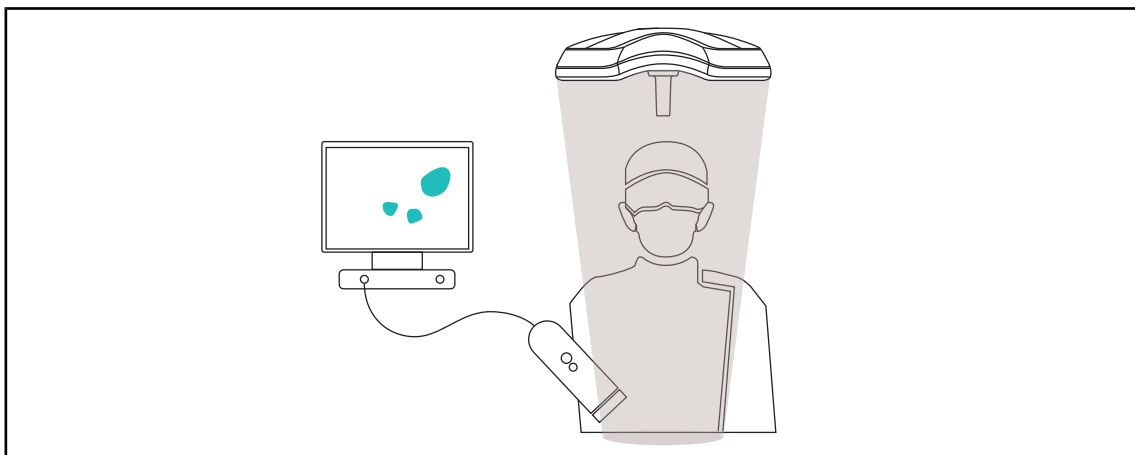


그림 11: Volista VisioNIR 기능

Volista VisioNIR 기능은 LED 스펙트럼에서 나오는 잔류 근적외선을 필터링하여 매우 낮은 수준으로 유지합니다. Volista VisioNIR는 화면에 전송되는 신호를 방해하지 않아 근적외선 카메라 사용에 적합합니다. Volista VisioNIR는 ICG(인도시아닌그린)를 사용하는 수술과 자극을 받으면 형광을 방출하는 특정 조직의 자연적 특성(자가 형광)을 사용하는 수술에서 모두 사용할 수 있습니다. 그러기 위해서는 형광 카메라의 감지 영역이 740nm 이상의 파장에 있어야 합니다(표 35 참조).



지침

Volista VisioNIR 기능을 사용하여 NIR 이미징 시스템과 형광 염료를 미리 테스트하여 설정을 최적화하는 것이 좋습니다.

1.6.3 부속품

1.6.3.1 OHDII FHD QL AIR05 무선 시스템 카메라(Volista 라이트헤드에만 해당)

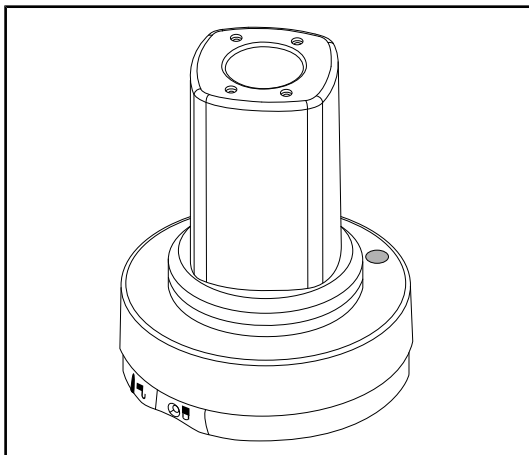


그림 12: OHDII FHD QL AIR05 카메라

이 카메라는 Quick Lock 시스템을 사용해 다른 수술실로 옮길 수 있어 수술진에게 정말 도움이 됩니다. 교육 과정에서 수술 부위를 자유롭게 하고 의사의 움직임을 보다 잘 모니터링하고 요구 사항을 보다 잘 예측할 수 있어 수술의 원활한 진행을 향상시킵니다.

1.6.3.2 QL+ 핸들 브래킷(Maquet PowerLED II에만 해당)

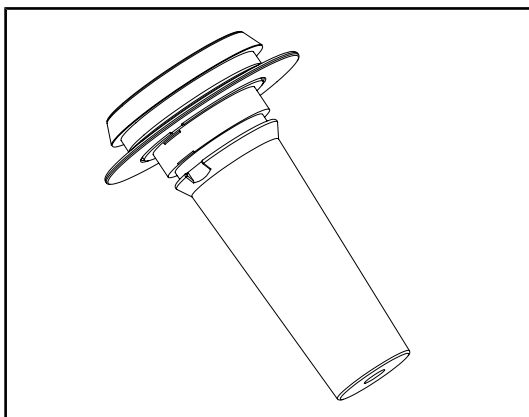


그림 13: STG PSX 멸균 재사용 핸들 브래킷

이 핸들 브래킷은 QL 시스템을 통해 라이트헤드 중앙에 위치합니다+. STG PSX 멸균 재사용 핸들을 끼울 수 있도록 설계되었습니다.

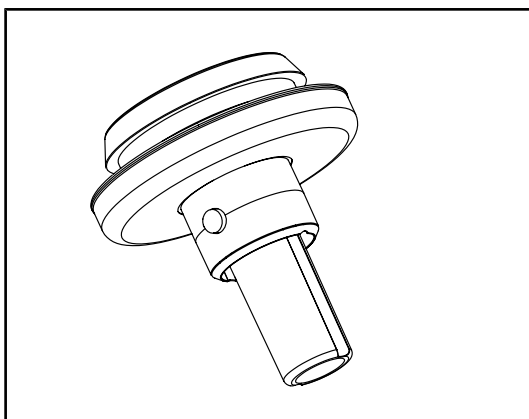


그림 14: STG HLX 멸균 재사용 핸들 브래킷

이 핸들 브래킷은 QL 시스템을 통해 라이트헤드 중앙에 위치합니다+. STG HLX 멸균 재사용 핸들을 끼울 수 있도록 설계되었습니다.

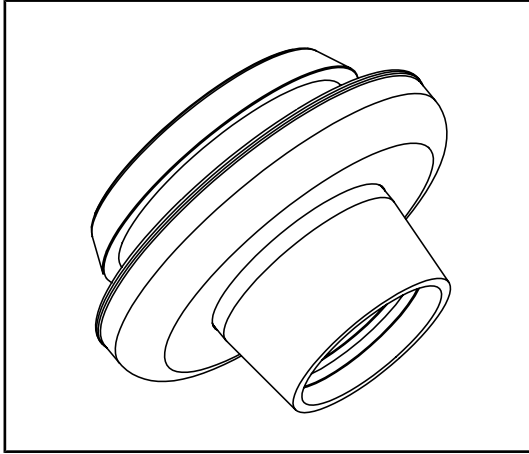


그림 15: DEVON/DEROYAL® 핸들 어댑터

이 DEVON/DEROYAL 핸들용 어댑터는 QL+ 시스템을 통해 라이트헤드의 중앙에 오도록 합니다. Devon® 또는 Deroyal® 일회용 핸들을 끼울 수 있도록 설계되었습니다. 다음 두 가지 버전으로 제공됩니다. TILT(핸들로 초점 직경 변경) 장착형 또는 미장착형

1.6.3.3 QL 핸들 브래킷(Volista에만 해당)

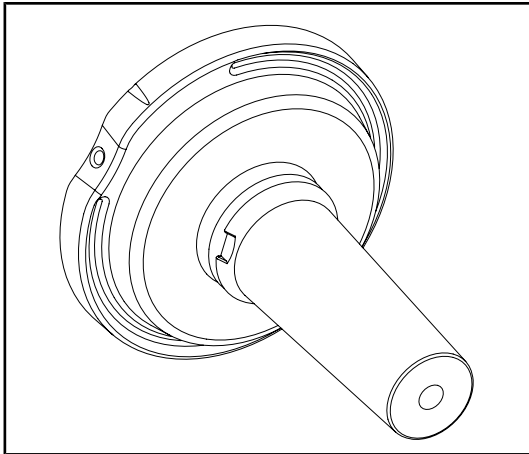


그림 16: STG PSX 멸균 재사용 핸들 브래킷

이 핸들 브래킷은 QL 시스템을 통해 라이트헤드의 중앙에 오도록 합니다. STG PSX 멸균 재사용 핸들을 끼울 수 있도록 설계되었습니다.

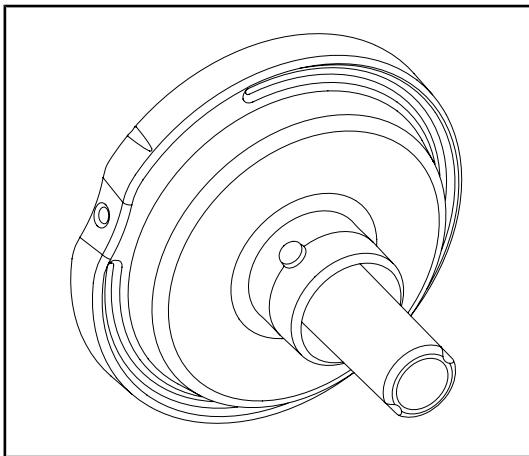


그림 17: STG HLX 멸균 재사용 핸들 브래킷

이 핸들 브래킷은 QL 시스템을 통해 라이트헤드의 중앙에 오도록 합니다. STG HLX 멸균 재사용 핸들을 끼울 수 있도록 설계되었습니다.

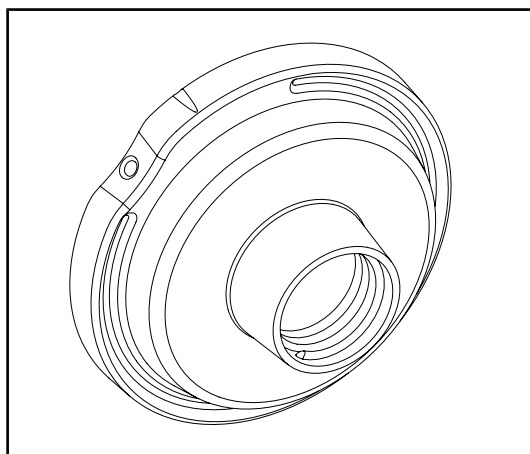


그림 18: TILT 장착형 일회용 핸들 어댑터

이 일회용 핸들 어댑터는 QL 시스템을 통해 라이트헤드의 중앙에 오도록 합니다. Devon® 또는 Deroyal® 일회용 핸들을 끼울 수 있도록 설계되었습니다.

1.6.3.4 LMD (Maquet PowerLED II / Volista VSTII에만 해당)

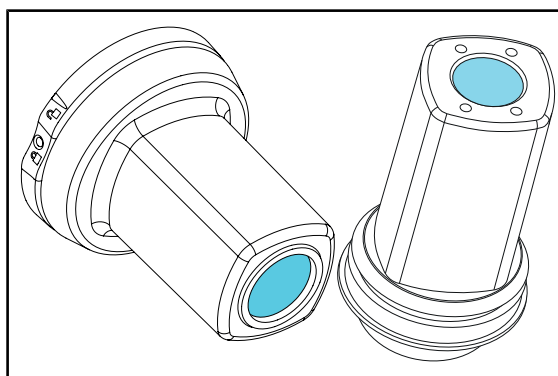


그림 19: LMD 모듈

LMD(휘도관리장치) 시스템은 의사의 눈으로 감지되는 조명을 조절합니다. 이 혁신적인 시스템은 시력을 최적 상태로 유지하고 밝기가 변경되는 경우 시력을 적응해야 하는 문제가 발생하지 않도록 설계되었습니다. 의사가 밝은 조직과 어두운 구멍을 볼 때 동일한 수준의 조명이 보장됩니다.

1.6.3.5 전원 케이블

품목	명칭	참조번호	길이
POWER CORD C13 EUR	유럽 전원 케이블	5 686 04 960	4m
POWER CORD C13 GBR	영국 전원 케이블	5 686 04 961	4m
POWER CORD C13 US	미국 전원 케이블	5 686 04 967	4m
POWER CORD C13 BRA	브라질 전원 케이블	5 686 04 963	4m
POWER CORD C13 CHE	스위스 전원 케이블	5 686 04 965	4m
POWER CORD C13 AUS	호주 전원 케이블	5 686 04 964	4m
POWER CORD C13 ITA	이탈리아 전원 케이블	5 686 04 962	4m
POWER CORD C13 ARG	아르헨티나 전원 케이블	5 686 04 968	2.5m

도표 4: 전원 케이블



지침

다른 전원 케이블을 사용하는 경우 100mΩ의 임피던스를 초과하지 않아야 합니다.

1.7 장치 식별 라벨

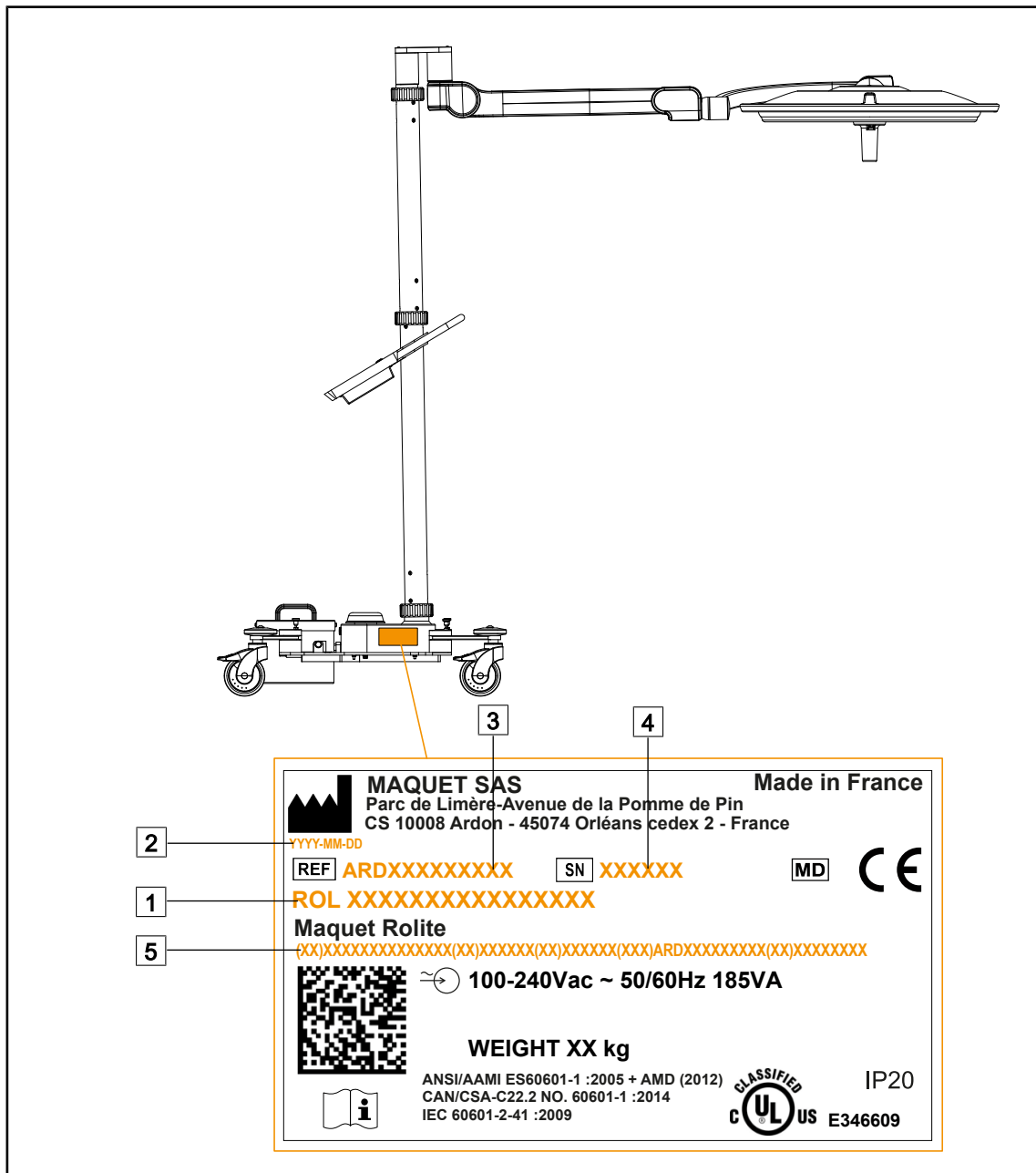


그림 20: 장치 식별 라벨의 위치

- | | | | |
|---|-------|---|--------------------|
| 1 | 제품명 | 4 | 일련번호 |
| 2 | 제조일자 | 5 | 고유한 제품 식별 코드(UPIC) |
| 3 | 제품 참조 | | |

1.8 관련 규격

이 장치는 다음 규격 및 지침의 안전 요구 사항을 준수합니다.

참조번호	제목
IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14/A2:22	의료용 전기 장비 - 제1부: 기본 안전 및 필수 성능에 대한 일반 요구 사항
IEC 60601-2-41:2021	의료용 전기 장비 - 제2~41부: 수술용 및 진단용 조명장치의 안전에 대한 특정 요구 사항
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2:2014/A1:2021 CSA C22.2 No. 60601-1-2:16 (R2021) EN IEC 60601-1-2:2015/A1:2021	의료용 전기 장비 - 제1~2부: 안전에 대한 일반 요구 사항 - 부가 규격: 전자파 방해 - 요구 사항 및 시험
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020	의료용 전기 장비 - 제1~6부: 기본 안전 및 필수 성능에 대한 일반 요구 사항 - 부가 규격: 사용 적합성
IEC 60601-1-9:2007+AMD1: 2013+AMD2:2020	의료용 전기 장비 - 제1~9부: 기본 안전 및 필수 성능에 대한 일반 요구 사항 - 부가 규격: 친환경 설계 요건
IEC 62366-1:2015+AMD1:2020	의료기기 - 제1부: 의료기기에 대한 사용 적합성 엔지니어링 적용
IEC 62311:2019	전자기장(0Hz – 300GHz)에 대한 인체 노출 제한과 관련된 전자 및 전기 장비의 평가
IEC 62304:2006+AMD1:2015	의료기기 소프트웨어 - 소프트웨어의 수명 주기 프로세스
EN 62471:2008	램프와 램프를 사용하는 장치의 광생물학적 안전성
IEC 60825-1:2014* EN 60825-1:2014+A11:2021*	레이저 장치의 안전성 - 제1부: 재료 및 요구 사항 분류
ISO 20417:2020	의료기기 - 제조사가 제공하는 정보
ISO 15223-1:2021*	의료기기 - 제조사가 제공하는 정보에 사용되는 기호 - 제1부: 일반 요건
21 CFR Part 1040*	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter J -- Radiological Health Part 1040 – Performance standards for light-emitting products

도표 5: 제품 규격 준수

*Maquet PowerLED II 라이트헤드에만 해당

품질 관리:

참조번호	연도	제목
ISO 13485	2016	ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
ISO 14971	2019	ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices
ISO 14001	2024	ISO 14001:2015/A1:2024 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
21 CFR Part 11	2023	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter A -- General PART 11 - Electronic records, electronic signatures
21 CFR Part 820	2020	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter H -- Medical Devices PART 820 - Quality System Regulation

도표 6: 품질 관리 기준 적합성

환경 기준 및 규정:

국가	참조번호	버전	제목
EU	ROHS 지침	2011	DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
		2015	COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015, amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances
		2016	COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2016/585 of 12 February 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead, cadmium, hexavalent chromium, and polybrominated diphenyl ethers (PBDE) in spare parts recovered from and used for the repair or refurbishment of medical devices or electron microscopes
		2017	DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
전 세계	IEC 63000	2022	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EU	REACH Regulation	2006	REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and REACH - Restriction of Chemicals (REACH), amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
USA _ California	US California proposition 65 Act	1986	HEALTH AND SAFETY CODE - HSC DIVISION 20. MISCELLANEOUS HEALTH AND SAFETY PROVISIONS CHAPTER 6.6. Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
중국	SJ/T 11365-2006	2006	ACPEIP - Administrative Measure on the Control of Pollution caused by Electronic Information Products Chines RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

도표 7: 환경 기준 및 규정

국가	참조번호	연도	제목
아르헨티나	Dispocision 2318/2002	2002	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - Registro de productos Medicas - Reglamento
호주	TGA 236-2002	2021	Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002. Statutory Rules No. 236, 2002 made under the Therapeutic Goods Act 1989
Bosnia and Herzegovina	Act	2008	Medicinal products and medical devices act of Bosnia and Herzegovina ("Official Gazette of BiH, No. 58/08)
브라질	RDC 665/2022	2022	Resolution RDC n°665, 30 March 2022, Provides for the Good Manufacturing Practices for Medical Devices and Medical devices for In Vitro Diagnostis
브라질	RDC 751/2022	2022	RDC No. 751, of September 15, 2022, which provides for risk classification, notification and registration regimes, and labeling requirements and instructions for use of medical devices.
브라질	Ordinance 384/2020	2020	INMETRO Certification - Compliance Assessment Requirements for Equipment under Health Surveillance Regimen - Consolidated.
캐나다	SOR/98-282	2024	Medical Devices Regulations
중국	Regulation n°739	2021	Regulation for the Supervision and Administration of Medical Devices
콜롬비아	Decree 4725	2005	DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26) por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
EU	Regulation 2017/745/EU	2017	REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC
인도	Rule	2017	Medical Device Rules, 2017
인도네시아	Regulation 62	2017	Regulation of the minister of health of the republic of Indonesia number 62 of 2017 on product license of medical devices, in vitro diagnostic medical devices and household health products
이스라엘	Law 5772-2012	2012	The Medical Equipment Law, 5772-2012
일본	MHLW Ordinance: MO n °169	2021	Ministerial Ordinance on Standards for Manufacturing Control and Quality Control for Medical Devices and In-Vitro Diagnostics
케냐	Act	2002	The Pharmacy and Poisons Act, Cap 244 of the Laws of Kenya

도표 8: 시장 표준 준수

국가	참조번호	연도	제목
말레이시아	Act 737	2012	Medical Device Act 2012 (Act 737)
Montenegro	Law 53/09	2009	Law of Montenegro on Medical Devices (2009)
모로코	Law 84-12	2012	Law n°84-12 relative to medical devices
뉴질랜드	Regulation 2003/325	2003	Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003 (SR 2003/325)
사우디 아라비아	Regulation	2017	"Medical Device Interim Regulation" issued by the Board of Directors of the Food and Drug Authority (1-8-1429) dated 29/12/1429 H and amended by Saudi Food and Drug Authority Board of Directors decree No. (4-16-1439) dated 27/12/2017
세르비아	Law 105/2017	2017	Law on Medicinal Products and Medical Devices, "Official Gazette of the Republic of Serbia," No. 105/2017
대한민국	법률 제14330호	2016	의료기기법
대한민국	법령 제27209호	2016	의료법 시행령
대한민국	규칙 제1354호	2017	의료법 시행규칙
스위스	RS (Odim) 812.213	2020	Medical Devices Ordinance (MedDO) of 1 July 2020
대만	법	2020	Taiwanese Medical Device Act
태국	Act 2562	2019	Medical Device Act (No. 2) B.E. 2562(2019)
영국	Act	2021	Medical Devices Regulations 2002 n°618
미국	21CFR Part 7	2023	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter A -- General PART 7 - Enforcement policy
미국	21CFR Subchapter H	-	Title 21--Food And Drugs Chapter I--Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services Subchapter H -- Medical Devices
베트남	Decree 98/2021	2021	Decree No. 98/2021/ND-CP November 8, 2021 of the Government on the management of medical equipment

도표 8: 시장 표준 준수

1.9 사용 목적에 관한 정보

1.9.1 사용 목적

Maquet Rolite 는 수술, 진단 또는 치료 도중 환자의 환부를 비추기 위한 용도로 사용됩니다.

1.9.2 대상 사용자

- 이 기기는 사용 설명서를 숙지한 의료진만이 사용할 수 있습니다.
- 기기는 반드시 자격을 갖춘 직원이 세척해야 합니다.

1.9.3 부적절한 사용

- 위험 여부에 관계없이 환자에게 행하는 모든 수술에 대해 주 조명 시스템(라이트헤드 2개 또는 3개 장착)으로 사용.
- 손상된 제품 사용(예: 유지보수 없음).
- 전문 의료 기관이 아닌 다른 환경(예: 재택 간호)에서의 사용.
- 수술 중 또는 진단을 위해 카메라를 보조 장치로 사용.

1.9.4 금기사항

이 제품에는 금기사항이 없습니다.

1.10 필수 성능

Maquet Rolite 수술조명장치의 기본 성능은 시술야에 조명을 전달하고 그로 인해 발생하는 열 에너지 제한하는 것입니다.

1.11 임상적 이점

수술 및 검사용 조명장치는 침습적 및 비침습적 치료나 진단을 보완하는 것으로 간주되며, 의사와 의료진에게 최적의 시야를 제공하는 데 필수적입니다.

수술 및 검사 중에 제공되는 지원은 간접적인 임상적 이점을 보여줍니다. LED 기반 수술조명장치는 다른 기술(예: 백열등)에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.

장치를 올바르게 사용하면 다음과 같은 것이 가능합니다.

- 의사와 의료진이 필요로 하는 곳에서 빛을 공급하고 발열을 감소시켜 작업 공간의 쾌적함과 시각적 성능을 향상시킵니다.
- 의료진이 수술이나 진단에 집중할 수 있도록 음영 관리 기능을 제공합니다.
- 장치의 수명이 연장되고 수술 중 부분 소등의 위험이 감소됩니다.
- 사용하는 동안 일정한 조명을 제공합니다.
- 조명이 비춰진 다양한 조직에 대한 정확한 연색을 제공합니다.

1.12 보증

제품의 보증 조건에 대해서는 현지 Getinge 대리점에 문의하십시오.

1.13 제품 수명

제품의 예상 수명은 10년입니다.

멸균 재사용 핸들과 같은 소모품에는 이 수명이 적용되지 않습니다.

10년의 수명은 Getinge에서 교육을 받은 공인된 직원이 정기적으로 연례 점검을 실시하는 경우에 만 유효합니다. 이 기간이 지난 후에도 계속 기기를 사용하는 경우 기기의 안전을 보장하기 위해 Getinge에서 교육을 받은 공인된 직원이 검사를 수행해야 합니다.

1.14 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 지침

환경에 미치는 영향을 제한하면서 장치를 최적 상태로 사용하려면 따라야 할 몇 가지 규칙이 있습니다.

- 장치를 사용하지 않을 때는 에너지 소비를 줄이기 위해 장치를 끄십시오.
- 잘못된 배치를 조명의 출력을 높여 보상하지 않도록 장치를 올바르게 배치하십시오.
- 환경에 미치는 영향을 최저 수준으로 유지하기 위해 정해진 유지보수 일정을 따르십시오.
- 폐기물 처리 및 장치 재활용과 관련된 문제는 폐기물 관리 [▶ 페이지 105] 장을 참조하십시오.
- 에너지를 불필요하게 사용하지 않도록 다양한 옵션을 현명하게 사용하십시오.

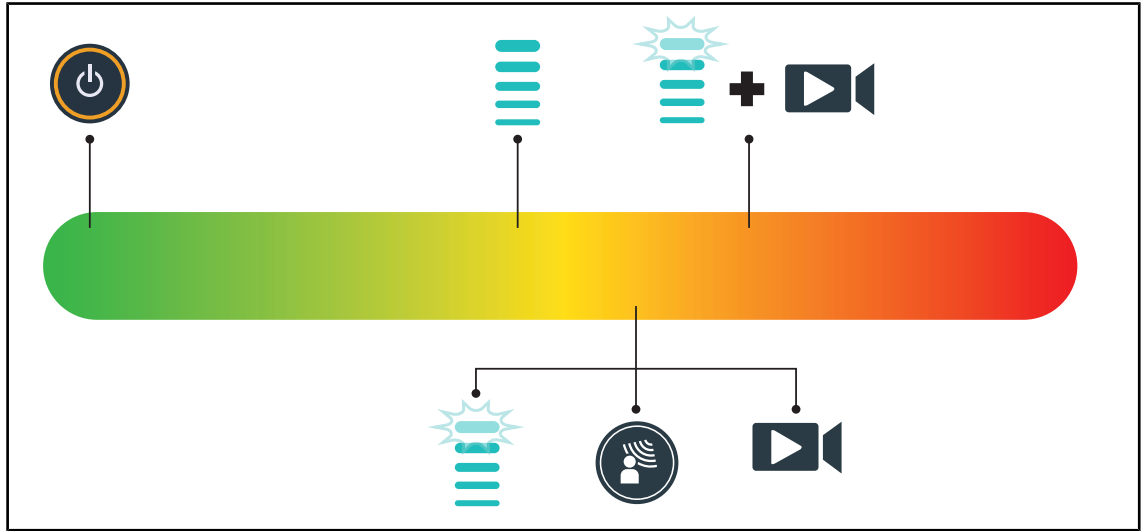


그림 21: 장치 사용 시 전력 소모량



지침

장치의 에너지 소비는 9.2장의 전기적 특성에 표시되어 있습니다.
이 장치에는 RoHS 지침(표 5 참조) 및 Reach 규정에 따라 위험 물질이 포함되어 있지 않습니다.

2 안전 관련 정보

2.1 환경 조건

운송 및 보관을 위한 주변 조건

주변온도	1 0 °C + 6 0 °C
상대습도	20~75%
대기압	500 hPa ~ 1060 hPa

도표 9: 운송/보관 주변 조건

주변 사용 조건

주변온도	1 0 °C + 4 0 °C
상대습도	20~75%
대기압	500 hPa ~ 1060 hPa

도표 10: 주변 사용 조건

2.2 안전 지침

2.2.1 제품의 안전한 사용



경고!
부상 위험
강한 자기장은 조명장치의 고장과 갑작스러운 이동을 유발할 수 있습니다.
MRI 촬영실에서는 사용하지 마십시오.



경고!
화상 위험
이 장치는 폭발 방지 처리가 되지 않았습니다. 불꽃은 정상시에 아무런 위험이 없지만 산소가 풍부한 대기에서는 화재를 일으킬 수 있습니다.
인화성 가스 또는 산소가 많은 환경에서 장치를 사용하지 마십시오.



경고!
부상/감염 위험
손상된 장치를 사용하면 사용자가 부상을 당하거나 환자가 감염될 위험이 있습니다.
손상된 장치를 사용하지 마십시오.



경고!
감전 위험
플러그를 잘못 뽑으면 전원 케이블이 손상되어 충전부가 드러날 수 있습니다.
전원 플러그를 당겨서 뽑지 마십시오.



경고!

부상 위험

이동형 조명장치는 잘못 조작하면 넘어질 수 있습니다.

이동형 조명장치는 밀어서 옮깁니다. 지형이 경사지지 않은 한 절대 당겨서 옮기지 마십시오.



경고!

부상 위험

이동형 조명장치는 그 위에 몸을 기대면 넘어질 수 있습니다.

절대로 이동형 조명장치에 몸을 기대지 마십시오.



경고!

감염/조직 반응 위험

조명은 에너지의 한 형태이므로 방출되는 파장에 따라서 일부 병상에 적합하지 않을 수 있습니다.

사용자는 자외선 및/또는 적외선에 알레르기 반응을 보이는 사람과 광선에 과민한 반응을 보이는 사람에게 조명을 사용할 때의 위험에 대해 알고 있어야 합니다. 사전에 조명이 이러한 유형의 병리와 호환되는지 확인합니다.



경고!

조직 건조 또는 화상 위험

조명은 특히 다수의 라이트헤드로부터 조사된 광빔이 중첩되거나 수술이 길어지는 경우 환자에게 부상(예: 조직 건조, 망막 화상)을 일으킬 수 있는 에너지입니다.

사용자는 벌어진 상처가 지나치게 강한 광원에 노출될 때의 위험에 대해 알고 있어야 합니다. 특히 장시간 수술일수록 사용자는 이 점에 각별히 유의하여 수술의 종류와 해당 환자의 상태에 따라 조명의 세기를 조절해야 합니다.



경고!

부상 위험

배터리가 너무 빨리 방전되면 수술 중에 라이트헤드가 꺼질 수 있습니다.

배터리의 자율성을 평가하기 위한 자율성 시험을 매월 실시합니다. 고장 발생 시 Getinge 기술 서비스에 문의합니다.

2.2.2 전기적

**주의!****기기의 오작동 위험**

이 장치의 제조업체가 제공하거나 지정한 것이 아닌 부속품, 변환기 및 케이블을 사용하는 경우 전자기 방출이 증가하거나 장치의 내성이 저하되어 부적절한 작동이 발생할 수 있습니다.

제조업체가 공급 또는 지정한 부속품과 케이블만 사용하십시오.

**경고!****감전 위험**

설치, 유지보수, 수리 또는 제거 작업에 익숙하지 않은 사람은 부상 또는 감전 위험에 노출됩니다.

장치 또는 구성 부품의 설치, 유지보수, 수리 및 제거는 Getinge 기사 또는 Getinge에서 교육을 받은 서비스 기사가 실시해야 합니다.

**경고!****감전 위험**

장치가 주전원에 연결되어 있지 않은 경우 사용자가 감전될 수 있습니다.

조명장치가 주전원에 연결되지 않은 경우 장치의 등전위 플러그를 방에 있는 등전위 플러그에 연결합니다.

2.2.3 광학

**경고!****부상 위험**

이 제품은 유해할 수 있는 광방사선을 방출합니다. 안구 손상이 발생할 수 있습니다.

사용자는 수술조명장치에서 방출되는 빛을 응시해서는 안 됩니다. 수술 중 환자의 얼굴을 덮어 눈을 보호해야 합니다.

2.2.4 감염

**경고!****감염 위험**

유지보수 또는 세척 작업 시 시술야가 오염될 수 있습니다.

환자가 있는 곳에서는 유지보수 또는 세척 작업을 하지 마십시오.

2.3 제품에 안전 라벨 부착

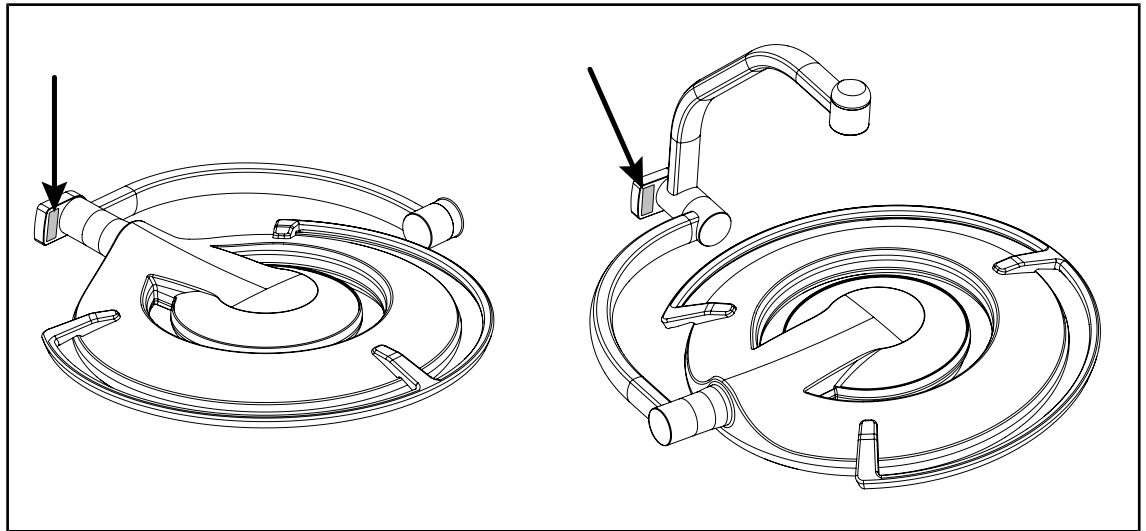


그림 22: 레이저 라벨 위치

라벨	의미
	레이저 방사(Maquet PowerLED II에만 해당) 빔을 바라보지 마십시오 클래스 2 레이저 장치
	레이저 방사(Maquet PowerLED II에만 해당) 빔을 바라보지 마십시오 클래스 2 레이저 장치
	전환 위험 바퀴를 고정시킨 상태에서 이동형 조명장치를 밀거나 위에 기대지 마십시오.
	ROLITE 이동형 조명장치는 밀어서 옮깁니다. 당겨서 옮기면 안 됩니다. ROLITE 이동형 조명장치는 라이트헤드 암을 접은 상태에서 옮겨야 합니다.
	경사진 지형에서 옮길 때는 몸을 라이트헤드 쪽에 오도록 합니다. 경사진 지형에서만 당겨서 옮길 수 있습니다. 배터리는 경사의 아래쪽으로 향해야 합니다.

도표 11: 제품에 안전 라벨 부착

3 제어 인터페이스

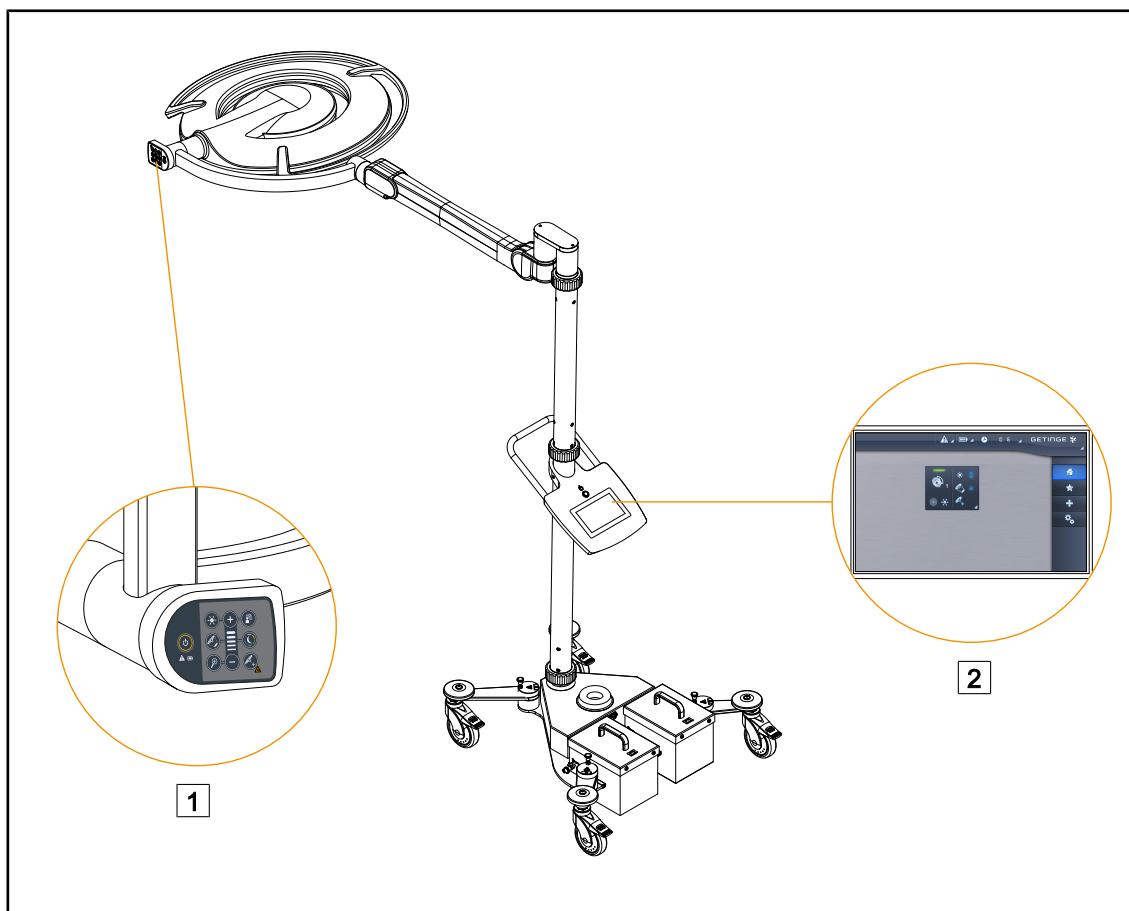


그림 23: 제어 인터페이스

1 라이트헤드의 키패드

2 터치 스크린

3.1 라이트헤드 키패드

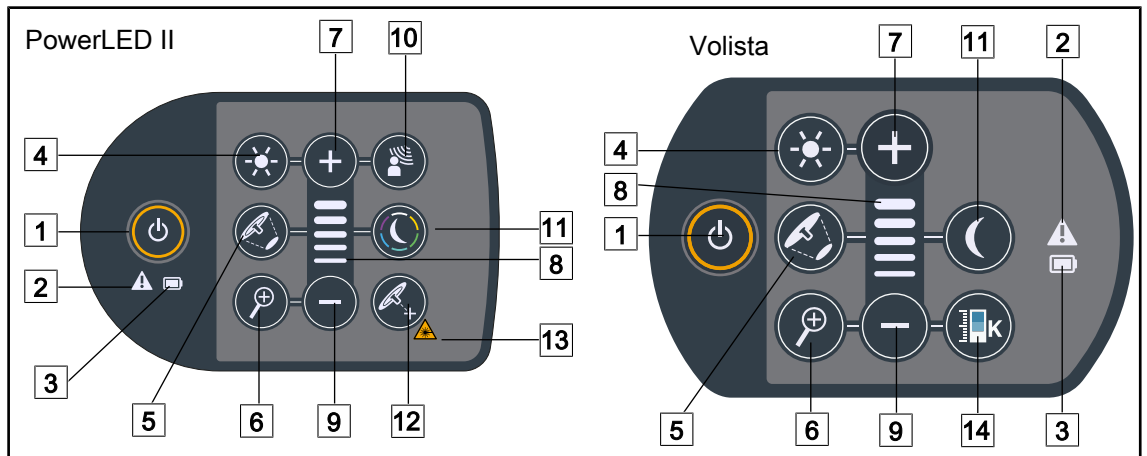


그림 24: 라이트헤드의 포크에 위치한 키패드

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 커짐/꺼짐 | 8 레벨 표시기 |
| 2 경고 표시등 | 9 마이너스(레벨 감소) |
| 3 배터리 표시등 | 10 AIM 모드 |
| 4 조명 조정 | 11 주변 조명 모드 |
| 5 초점 직경 변경 | 12 레이저 포지셔닝 모드* |
| 6 카메라 줌(PowerLEDII에서는 작동하지 않음) | 13 레이저 안전 기호 |
| 7 플러스(레벨 증가) | 14 색온도 변화 |

3.2

터치 스크린

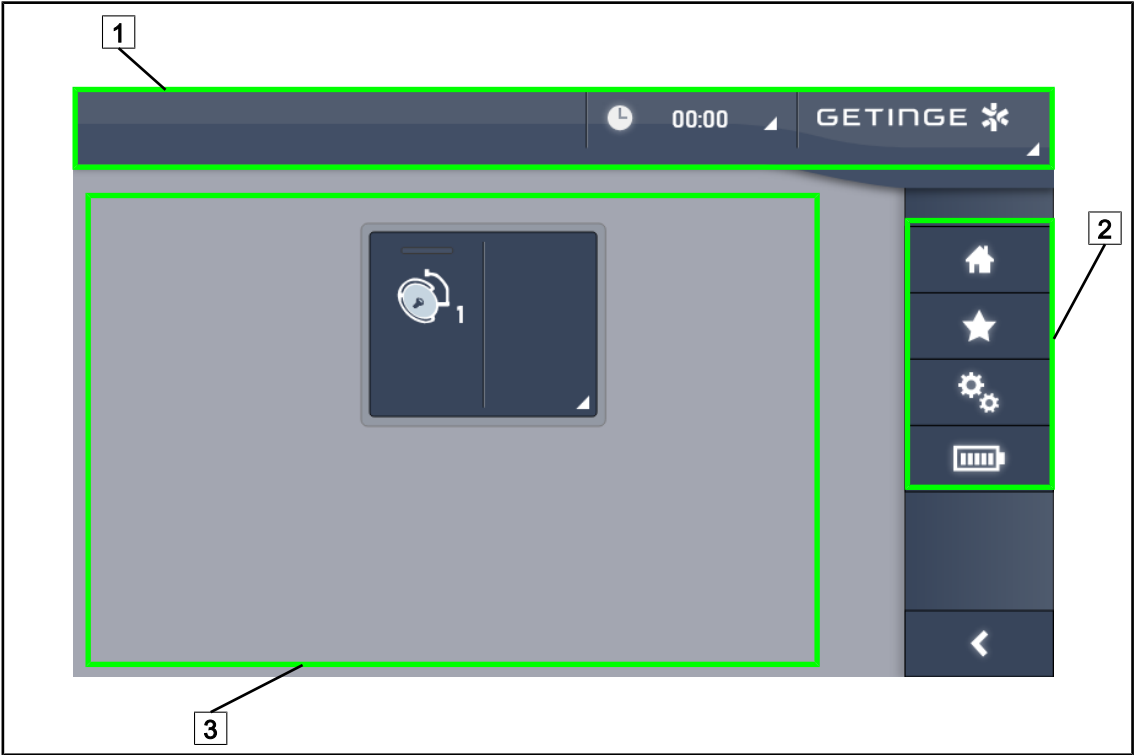


그림 25: 터치 컨트롤 화면

- 1

상태 표시줄
- 2

메뉴 모음
- 3

활성 영역

번호	명칭
1	결함 표시기, 배터리 표시기, 시간, Getinge 로고 및 고객 로고가 표시되는 화면 영역.
2	다음과 같은 다양한 메뉴로 이동할 수 있는 화면 영역: 홈, 즐겨찾기, 기능 및 매개변수 페이지.
3	장치를 제어할 수 있는 화면 영역.

도표 12: 터치 스크린 정보

상태 표시줄

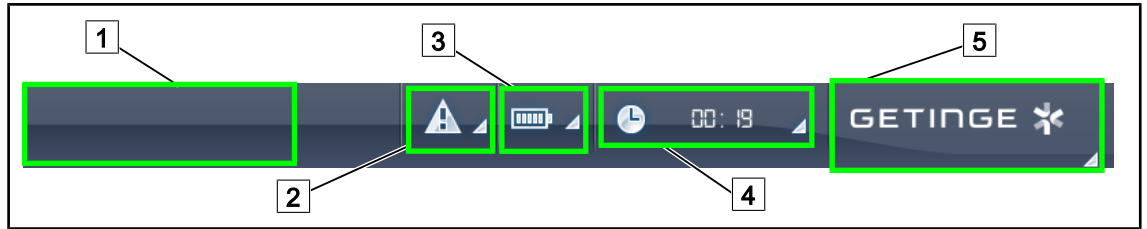


그림 26: 터치 스크린 상태 표시줄

- | | | | |
|---|--------------|---|------------|
| 1 | 고객 로고 위치(옵션) | 4 | 시계 |
| 2 | 결함 표시기 | 5 | Getinge 로고 |
| 3 | 배터리 표시기 | | |

번호	명칭	가능한 조치
1	고객 로고	고객은 이 위치에 자신이 속한 기관의 로고를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 기술 서비스에 문의하십시오.
2	- 시스템 결함을 나타냅니다. - 시스템에 결함이 있는 경우에만 나타납니다.	결함을 표시하려면 결함 표시기 를 누릅니다.
3	- 배터리 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 터치 스크린의 표시등 [▶ 페이지 86] 장을 참조하십시오. - 비상전원 공급장치를 사용하는 경우에만 나타납니다(예: 전원 콘센트에 연결되지 않음).	여러 배터리의 상태를 표시하려면 배터리 표시기 를 누릅니다.
4	시간을 나타냅니다	날짜 및 시간 조정으로 이동하려면 시계 를 누릅니다.
5	Getinge 로고	- 제품의 유지보수 정보로 이동하려면 Getinge 로고를 누릅니다. Getinge 로고를 두 번 눌러 Getinge 기술자 또는 유자격자를 위한 전용 메뉴로 이동합니다. 사람 그룹 참조.

도표 13: 터치 스크린 상태 표시줄 정보

메뉴 바

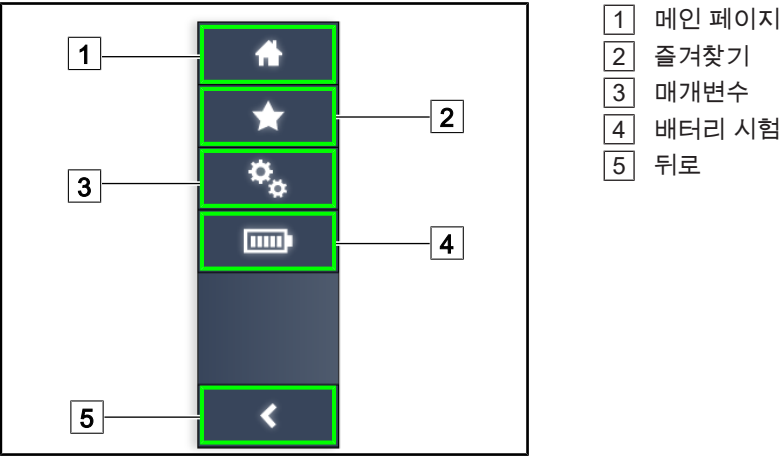


그림 27: 터치 스크린 메뉴 바

번호	명칭	가능한 조치
1	모든 명령과 정보에 접속할 수 있는 페이지입니다.	메인 페이지 를 누르면 메인 페이지로 돌아갑니다.
2	사용자가 설정한 즐겨찾기.	즐거찾기 를 누르면 미리 저장된 전체 목록 페이지로 이동합니다.
3	구성 가능한 설정, 배터리 시험 및 구성 정보	설정 을 누르면 설정, 비상전원 공급장치 시험 및 구성 정보 페이지로 이동합니다.
4	배터리 시험	배터리 시험 을 누르면 비상전원 공급장치 시험 페이지로 이동합니다.
5	뒤로	뒤로 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

도표 14: 터치 스크린 상태 표시줄 정보

4 사용

4.1 사용 전 일일 점검



지침

제품의 올바른 사용을 보장하기 위해 숙련된 기사를 통해 매일 육안 검사와 기능 검사를 실시해야 합니다. 검사를 실시한 날짜와 해당 기사 서명을 포함하여 검사 결과를 기록하는 것이 좋습니다.

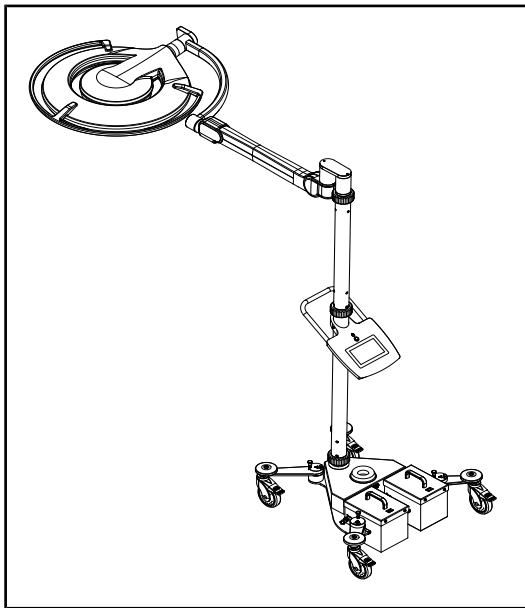


그림 28: 장치의 무결성

장치의 무결성

1. 장치가 충격을 받았거나 손상되지 않았는지 확인합니다.
2. 광택이 없거나 페인트가 벗겨졌는지 확인합니다.
3. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.

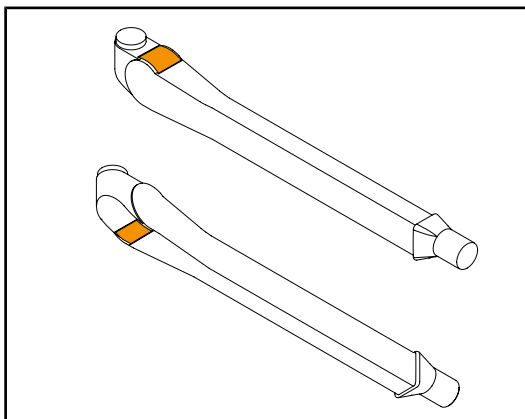


그림 29: 스프링 암의 탭 검사

스프링 암의 탭

1. 스프링 암의 탭이 하우징 안에 있는지 확인합니다.
2. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.

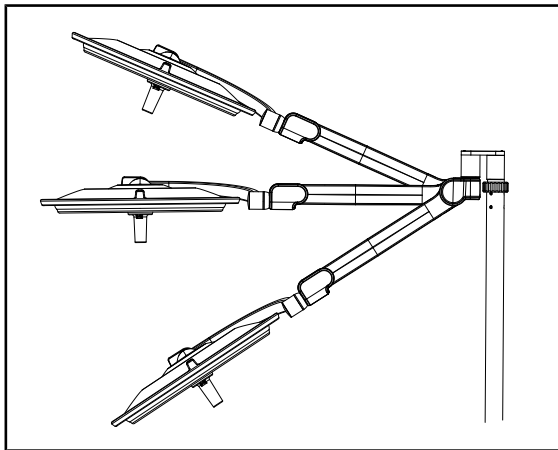


그림 30: 스프링 암 홀더

스프링 암 홀더

1. 스프링 암을 로워 스토퍼에 수평으로 놓은 다음 어퍼 스토퍼에 놓습니다.
2. 스프링 암이 이 모든 위치에서 고정되었는지 확인합니다.
3. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.

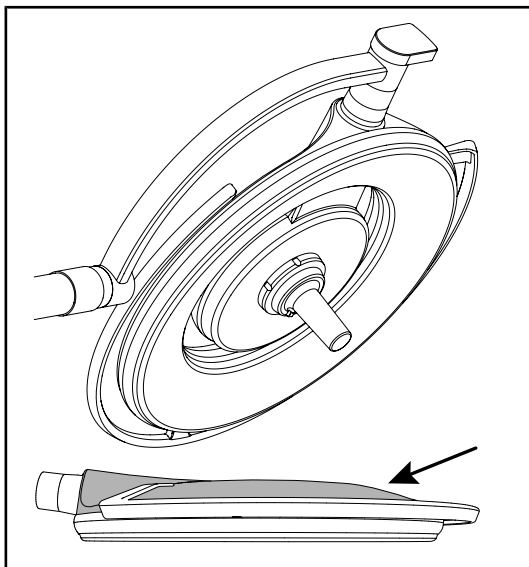


그림 31: 덮개판 및 덮개 검사

라이트헤드의 실리콘 덮개판 및 덮개

1. 라이트헤드 덮개판의 위치와 상태가 올바른지 확인합니다.
2. 라이트헤드 덮개의 위치와 상태가 올바른지 확인합니다.
3. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.

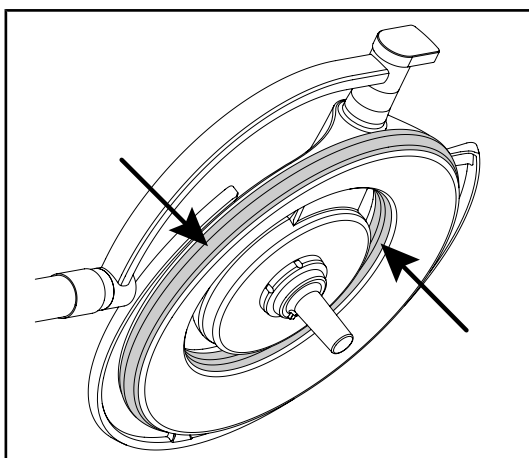


그림 32: 라이트헤드 접합부 검사

라이트헤드 접합부

1. 스프링 암 덮개의 위치와 상태가 올바른지 확인합니다.
2. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.

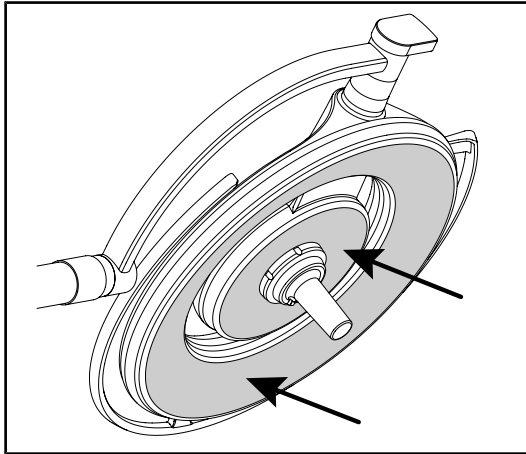


그림 33: 하면 검사

라이트헤드 하면

1. 하면이 손상(긁힘, 얼룩 등)되지 않았는지 확인합니다
2. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.



그림 34: 라이트헤드 키패드 상태

라이트헤드의 키패드

1. 라이트헤드 키패드의 상태와 위치가 올바른지 확인합니다.
2. ON/OFF 버튼을 5초 동안 누릅니다.
➤ 모든 키와 경고 표시등에 백라이트가 켜집니다.
3. 이상이 있는 경우 기술 부서에 문의하십시오.

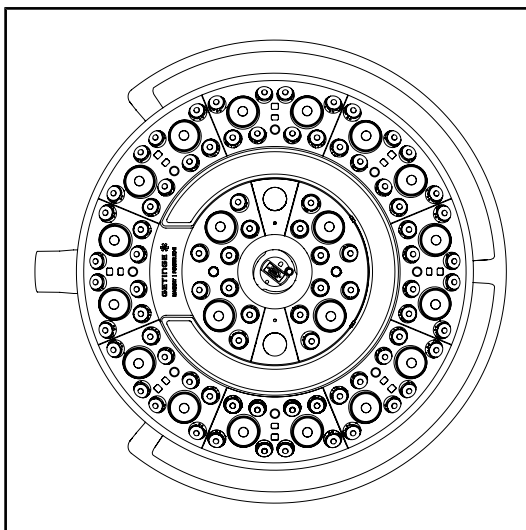


그림 35: LED 작동

LED 작동

1. 라이트헤드 키패드의 ON/OFF 버튼을 눌러 조명을 켭니다.
2. 라이트헤드의 조도를 최소에서 최대로 조정하여 라이트헤드가 키패드의 명령에 제대로 반응하는지 확인합니다.
➤ 광도는 선택한 수준에 따라 달라집니다.
3. 가장 큰 초점 직경(모든 LED가 켜짐)을 선택하여 조명을 켭니다. 조명을 조정합니다. 조명 조정 [▶ 페이지 44].
4. 모든 LED가 작동하는지 확인합니다.

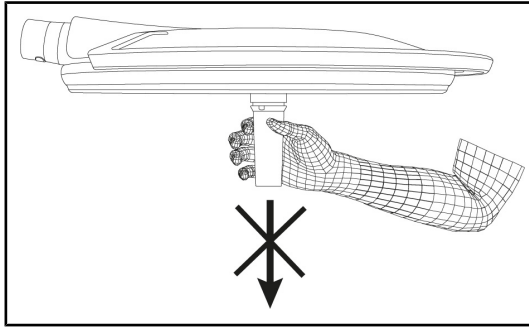


그림 36: 핸들 브래킷 유지보수

라이트헤드 핸들 인터페이스

1. 설치된 핸들 브래킷을 제거합니다(장치 분해).
 - 제거가 아무런 문제 없이 이루어졌는지 확인합니다.
2. 라이트헤드에 핸들 브래킷을 다시 설치합니다(라이트헤드에 장치 장착).
 - 설치가 아무런 문제 없이 이루어졌고 핸들 브래킷이 제대로 설치되었는지 확인합니다.

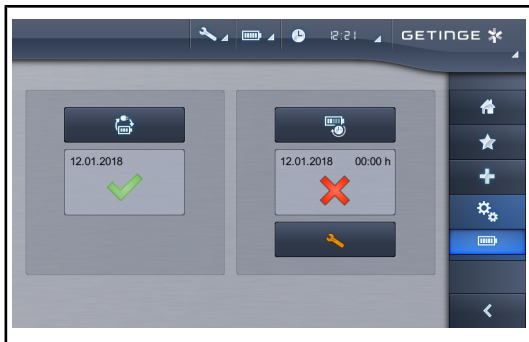


그림 37: 배터리 시험

비상전원 공급장치 전환 시험

1. (터치 스크린에서) 터치 컨트롤 디스플레이를 통해 비상전원 공급장치 전환 시험을 실시합니다.
2. 시험에 실패하면 기술지원부에 문의하십시오.

4.2 조명 제어

4.2.1 조명 켜기/끄기

4.2.1.1 이동형 조명장치 작동

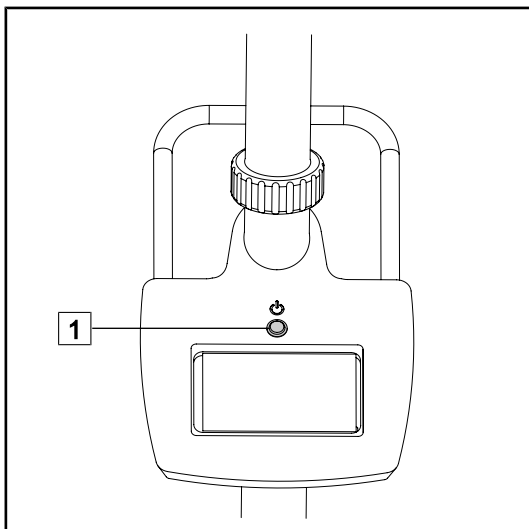


그림 38: 조명장치 작동

1. 이동형 조명장치를 켜려면 작동 버튼 **1**을 누릅니다.

4.2.1.2 벽면 키패드에서

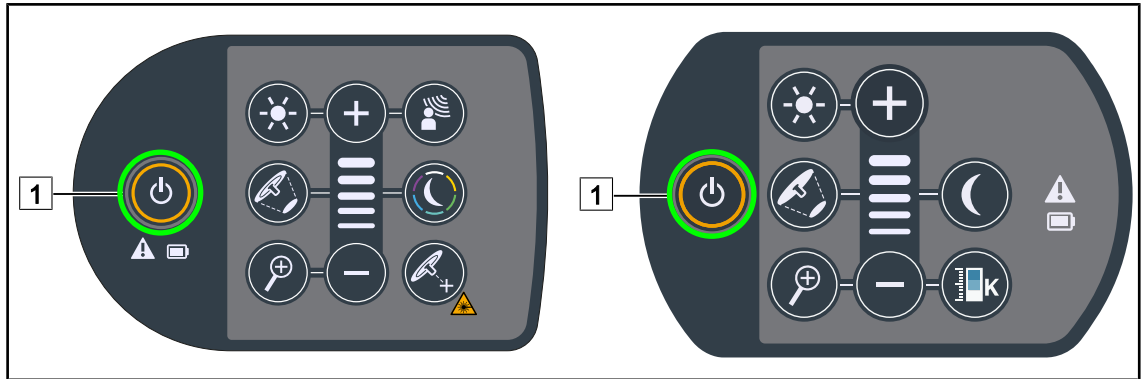


그림 39: 라이트헤드 키패드로 조명 끄기

1. 라이트헤드를 켜려면 **ON/OFF** [1]를 누릅니다.
 - LED가 연속적으로 켜지고 조명을 마지막으로 끌 때 사용된 값에 따라 조도가 설정됩니다.
2. 키패드가 꺼질 때까지 **ON/OFF** [1]를 다시 누릅니다.
 - 누른 손을 놓으면 라이트헤드가 꺼집니다.

4.2.1.3 터치 스크린에서

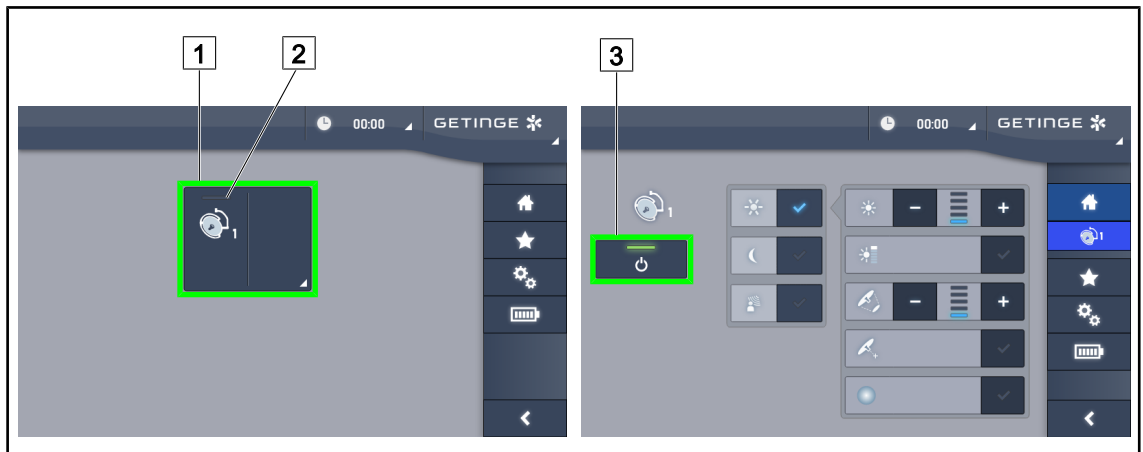


그림 40: 터치 스크린을 통한 조명 켜기/끄기

조명 켜기

1. 라이트헤드 활성 구역 [1]을 누릅니다.
 - 전원 표시등 [2]이 활성화되고 라이트헤드가 켜집니다.

조명 끄기

1. 라이트헤드 활성 구역 [1]을 누릅니다.
 - 라이트헤드 제어 페이지가 표시됩니다.
2. 라이트헤드 **ON/OFF** [3]를 누릅니다.
 - 라이트헤드와 라이트헤드의 전원 표시등이 꺼집니다.
 - 조명이 꺼집니다.

4.2.2 조명 조정

4.2.2.1 벽면 키패드에서

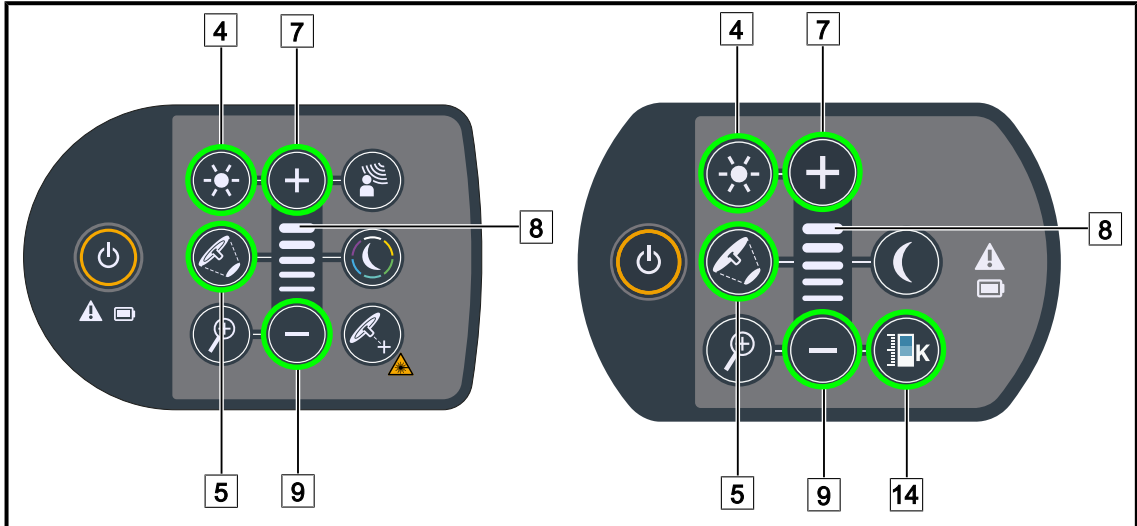


그림 41: 키패드를 통한 조명 조정

광도 조정

1. 광도 조정 [4]를 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.
2. 라이트헤드의 광도를 높이려면 플러스 [7]를 누릅니다.
3. 라이트헤드의 광도를 낮추려면 마이너스 [9]를 누릅니다.

부스트 모드 활성화/비활성화

1. 광도가 100%에 도달하면 수준 표시기 [8]의 마지막 LED가 깜박일 때까지 플러스 [7]를 길게 누릅니다.
 - 이제 부스트 모드가 활성화되었습니다.
2. 부스트 모드를 비활성화하려면 마이너스 [9]를 누릅니다.
 - 이제 부스트 모드가 비활성화되었습니다.

초점 직경 조정

1. 초점 직경 변경 [5]을 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.
2. 라이트헤드의 초점 직경을 증가시키려면 플러스 [7]를 누릅니다.
3. 라이트헤드의 초점 직경을 감소시키려면 마이너스 [9]를 누릅니다.

색온도 조정

1. 색온도 [14]를 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.
2. 더 따뜻한 색온도를 선택하려면 플러스 [7]를 누릅니다.
3. 더 차가운 색온도를 선택하려면 마이너스 [9]를 누릅니다.

4.2.2.2 터치 스크린에서

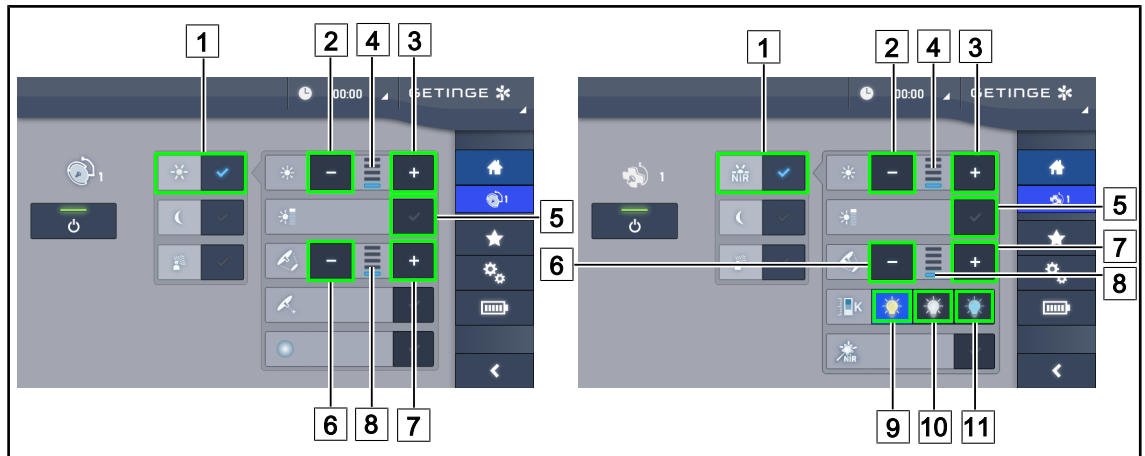


그림 42: 터치 스크린을 통한 조명 조정

광도 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 **표준 모드** [1]을 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. 라이트헤드의 광도를 높이려면 **광도 증가** [3]를 누릅니다.
3. 라이트헤드의 광도를 낮추려면 **광도 감소** [2]를 누릅니다.

부스트 모드 활성화

1. 라이트헤드 페이지에서 **표준 모드** [1]을 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. **부스트 모드** [5]를 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어오고 조도 표시기 [4]의 마지막 막대가 깜박입니다. 라이트헤드에서 부스트 모드가 활성화됩니다.

초점 직경 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 **표준 모드** [1]을 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. 라이트헤드 [8]의 초점 직경을 증가시키려면 직경 증가 [7]를 누릅니다.
3. 라이트헤드 [8]의 초점 직경을 감소시키려면 직경 감소 [6]를 누릅니다.

색온도 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 원하는 색온도를 선택하려면 **노란색 전구** [9], **흰색 전구** [10] 또는 **파란색 전구** [11]를 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어오고 선택한 색온도가 라이트헤드에 적용됩니다.

4.2.3 주변 조명

4.2.3.1 벽면 키패드에서

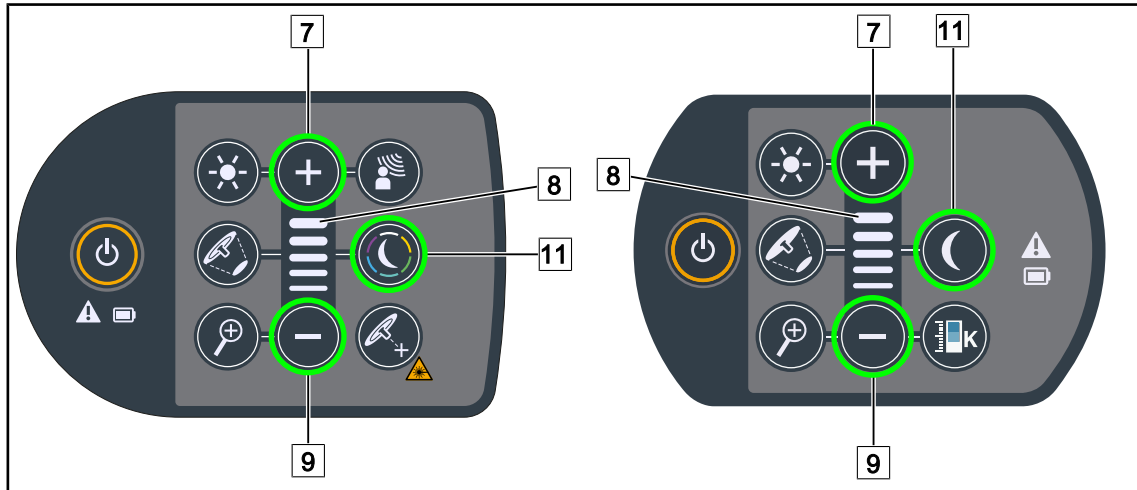


그림 43: 터치 스크린으로 주변 조명 설정

Maquet PowerLED II

주변 조명 색상 선택

1. 주변 조명 모드 [11]를 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.
2. 주변 조명 모드 [11]를 다시 눌러 원하는 색상을 선택합니다. 색상 주기는 다음과 같습니다. 흰색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색 및 보라색.

주변 조명의 광도 조정

1. 주변 조명 모드 [11]를 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.
2. 라이트헤드 [8]의 광도를 높이려면 플러스[7]를 누릅니다.
3. 라이트헤드 [8]의 광도를 낮추려면 마이너스[9]를 누릅니다.

Volista의 경우

주변 조명 모드 활성화

1. 주변 조명 모드 [11]를 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.

주변 조명의 조도 조정

1. 주변 조명 모드 [11]를 누릅니다.
 - 키패드에서 버튼에 백라이트가 켜집니다.
2. 플러스 [7]를 누르면 라이트헤드[8]의 조명을 증가시킬 수 있습니다.
3. 마이너스 [9]를 누르면 라이트헤드[8]의 조명을 감소시킬 수 있습니다.

4.2.3.2 터치 스크린에서

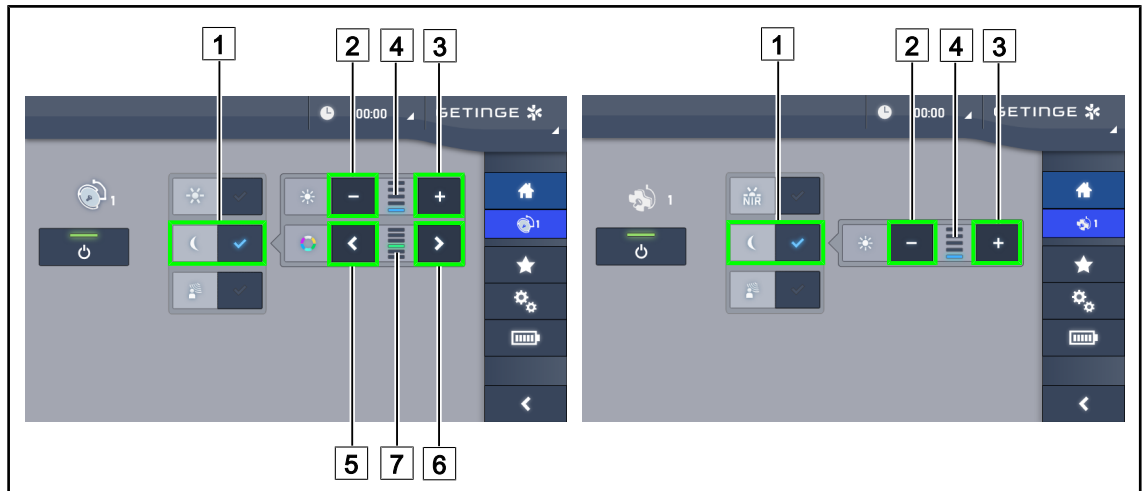


그림 44: 터치 스크린으로 주변 조명 설정

Maquet PowerLED II의 경우

주변 조명 색상 선택

1. 라이트헤드 페이지에서 **주변 조명 모드** [1]를 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. **이전** [5] 또는 **다음** [6]을 눌러 원하는 색[7]을 선택합니다. 색상 주기는 다음과 같습니다. 흰색, 노란색, 녹색, 청록색, 파란색 및 보라색.

주변 조명의 광도 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 **주변 조명 모드** [1]를 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. 라이트헤드 [4]의 광도를 증가시키려면 **플러스** [3]를 누릅니다.
3. 라이트헤드 [4]의 광도를 감소시키려면 **마이너스** [2]를 누릅니다.

Volista의 경우

주변 조명 모드 활성화

1. 라이트헤드 페이지에서 **표준/주변 조명** [1]을 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.

주변 조명의 광도 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 **표준/주변 조명** [1]을 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. 라이트헤드 [4]의 광도를 증가시키려면 **플러스** [3]를 누릅니다.
3. 라이트헤드 [4]의 광도를 감소시키려면 **마이너스** [2]를 누릅니다.

4.2.4 AIM AUTOMATIC ILLUMINATION MANAGEMENT*

4.2.4.1 라이트헤드 키패드에서(Maquet PowerLED II에만 해당)

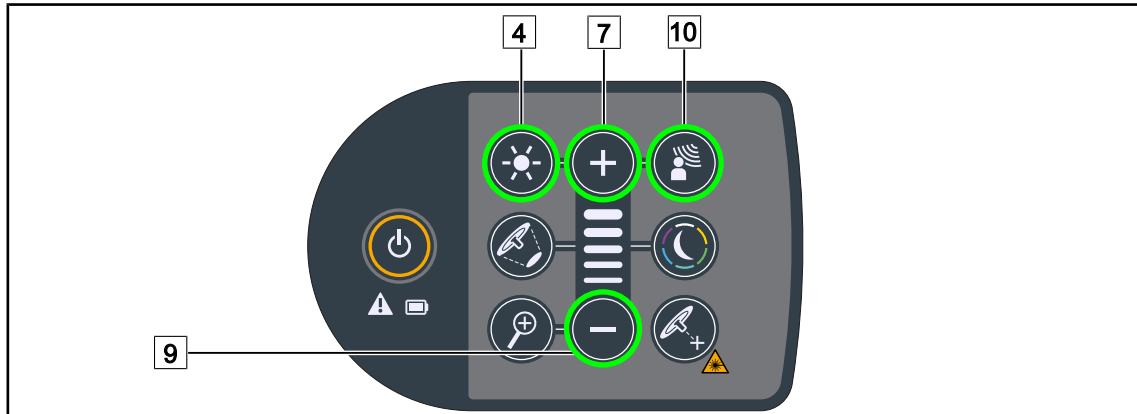


그림 45: 키패드를 통한 AIM 모드

AIM 모드 활성화/비활성화

1. **AIM 모드** [10]를 눌러 AIM을 활성화합니다.
 - 키패드에서 **AIM 모드** [10] 및 **조명 조정** [4] 버튼에 백라이트가 켜지며 AIM 모드가 활성화됩니다.
2. **AIM 모드** [10]를 눌러 AIM을 비활성화합니다.
 - 키보드에서 **AIM 모드** [10] 키에 더 이상 백라이트가 켜지지 않고 AIM 모드가 비활성화됩니다.

AIM으로 광도 조정

1. AIM이 활성화된 상태에서 라이트헤드의 광도를 증가시키려면 **플러스** [7]를 누릅니다.
2. AIM이 활성화된 상태에서 라이트헤드의 광도를 감소시키려면 **마이너스** [9]를 누릅니다.



지침

AIM 모드가 활성화되면 부스트 모드를 사용할 수 없고 10단계 조도로 조명을 사용할 수 있습니다.

4.2.4.2 터치 스크린에서

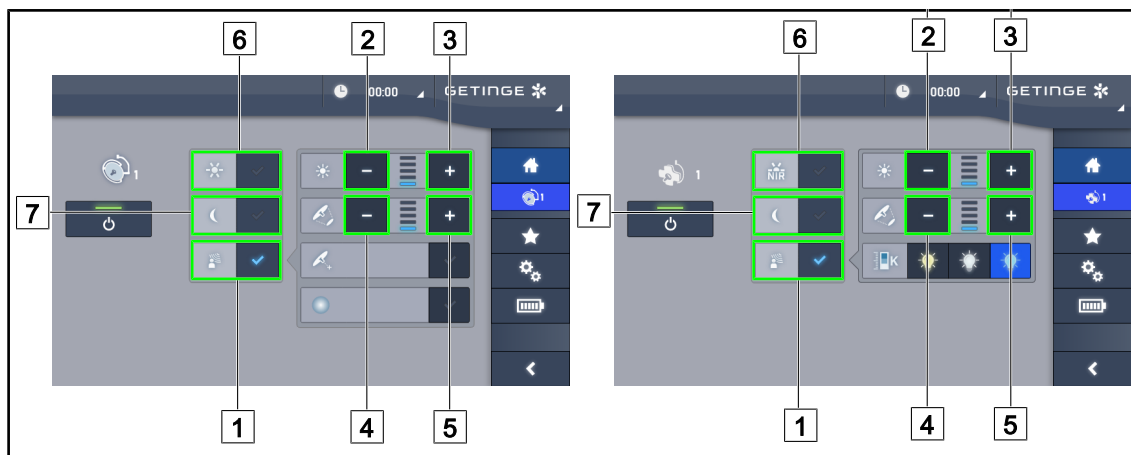


그림 46: 터치 스크린을 통한 AIM 모드

AIM 모드 활성화/비활성화

1. **AIM 모드** [1]를 눌러 AIM을 활성화합니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 라이트헤드에서 AIM 모드가 활성화됩니다.
2. **조명 조정** [6] 또는 **주변 조명 모드** [7]를 눌러 AIM 기능을 비활성화합니다.
 - AIM 키가 꺼지고 선택한 모드의 키에 백라이트가 켜집니다. 라이트헤드에서 AIM 모드가 비활성화됩니다.

AIM으로 광도 조정

1. 라이트헤드의 광도를 증가시키려면 **광도 증가** [3]를 누릅니다.
2. 라이트헤드의 광도를 감소시키려면 **광도 감소** [2]를 누릅니다.



지침

AIM 모드가 활성화되면 부스트 모드를 사용할 수 없으며, Maquet PowerLED II는 10단계, Volista는 5단계의 조도로 조명을 사용할 수 있습니다.

AIM으로 초점 직경 조정

1. 라이트헤드의 초점 직경을 증가시키려면 **직경 증가** [5]를 누릅니다.
2. 라이트헤드의 초점 직경을 감소시키려면 **직경 감소** [4]를 누릅니다.

4.2.5 Volista VisioNIR* (VSTII에만 해당)

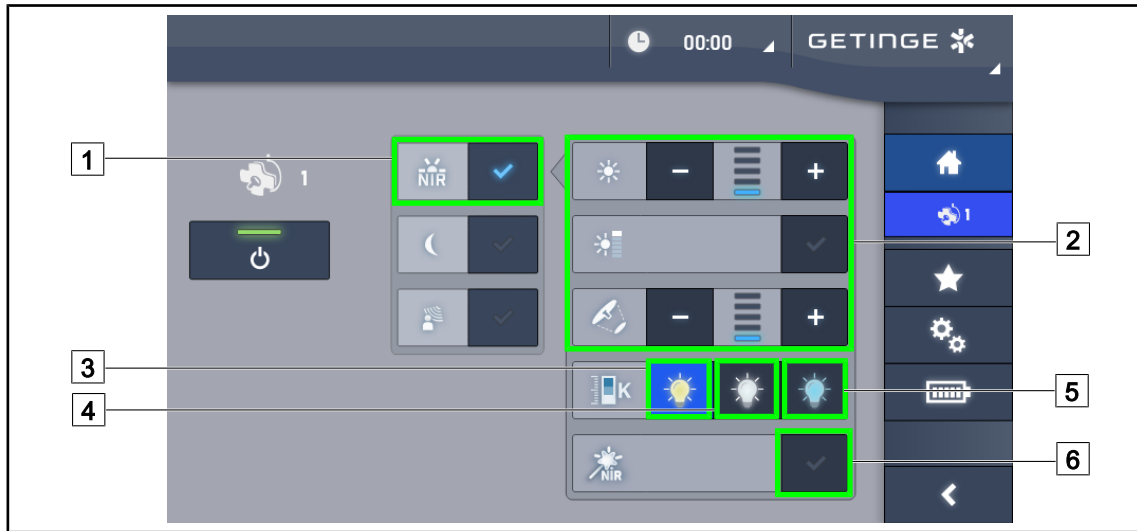


그림 47: VisioNIR

Volista VisioNIR 모드에서 라이트헤드의 조명 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 **표준 조명 모드** [1]을 누릅니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. 부스트 모드를 활성화하고, 표준 모드 [2]와 동일한 방식으로 광도 또는 초점 직경을 조정합니다
조명 조정.

색온도 조정

1. 라이트헤드 페이지에서 **3900K** [3], **4500K** [4] 또는 **5100K** [5]를 눌러 원하는 색온도를 선택합니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어오고 선택한 색온도가 라이트헤드에 적용됩니다.

VisioNIR Boost 기능 활성화/비활성화

1. **VisioNIR Boost** [6]를 눌러 VisioNIR Boost 기능을 활성화합니다.
➤ 버튼에 파란색 불이 들어옵니다.
2. **VisioNIR Boost** [6]를 눌러 VisioNIR Boost 기능을 비활성화합니다.



지침

형광 카메라를 인도시아닌그린과 함께 사용하는 대부분의 경우 Volista VisioNIR 라이트헤드의 표준 모드에서는 형광 신호의 교란이 거의 없습니다. 신호가 약한 경우 또는 화면의 대비를 개선하기 위해 VisioNIR Boost 기능을 사용하여 설정을 최적화할 수 있습니다(표 35 참조). 그러면 라이트헤드가 자동으로 5100K 색온도로 설정되고, Volista 600의 중앙 링 LED가 꺼집니다.

4.2.6 컴포트 라이트*(이 옵션은 Maquet PowerLED II에서만 사용할 수 있음)



그림 48: 컴포트 라이트

전제 조건:

- 표준 모드 또는 AIM 모드가 활성화됩니다 [1].
- 1. **컴포트 라이트 모드** [2]를 누릅니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 라이트헤드에서 컴포트 라이트가 활성화됩니다.
- 2. 컴포트 라이트 모드가 활성화되면 **컴포트 라이트 모드** [2]를 눌러 비활성화합니다.
 - 버튼이 꺼지고 해당 라이트헤드에서 컴포트 라이트 모드가 비활성화됩니다.

4.2.7 LMD* (Maquet PowerLED II / Volista VSTII에만 해당)

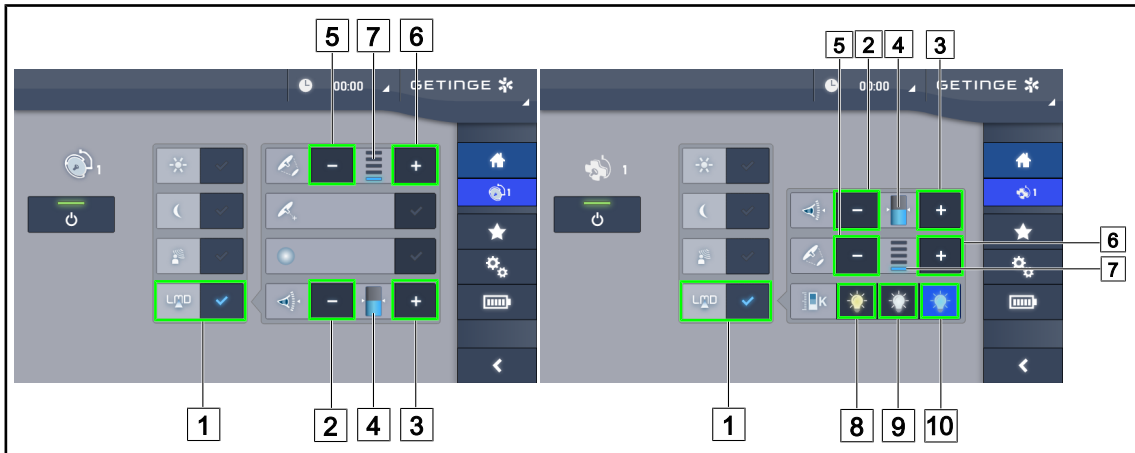


그림 49: LMD

LMD 모드 활성화/비활성화

1. 의사에게 편안한, 원하는 광도 조정.
2. 그런 다음 **LMD** [1]를 누릅니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 LMD가 활성화됩니다.
3. LMD가 활성화되면 **LMD** [1]를 눌러 비활성화합니다.
 - 버튼이 꺼지고 LMD가 비활성화됩니다.

휘도 설정값 조정

1. 라이트헤드의 휘도[3]를 증가시키려면 **휘도 증가** [4]를 누릅니다.
2. 라이트헤드의 휘도[4]를 감소시키려면 **광도 감소** [2]를 누릅니다.

LMD로 초점 직경 조정

1. 라이트헤드[7]의 초점 직경을 증가시키려면 **직경 증가** [6]를 누릅니다.
2. 라이트헤드[7]의 초점 직경을 감소시키려면 **직경 감소** [5]를 누릅니다.

LMD가 활성화된 상태에서 색온도 조정

1. LMD가 활성화되면 **3900K** [8], **4500K** [9] 또는 **5100K** [10]를 눌러 원하는 색온도를 선택합니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 선택한 색온도가 라이트헤드에 적용됩니다.



지침

라이트헤드가 최대값에 있으면 휘도를 높일 수 없으며, **플러스** [3] 버튼이 회색으로 바뀌고 비활성화됩니다.
라이트헤드가 최소값에 있으면 휘도를 낮출 수 없으며, **마이너스** [2] 버튼이 회색으로 바뀌고 비활성화됩니다.

휘도 수준 표시기[4]를 통해 저장된 휘도값이 유지되고 있는지 육안으로 확인할 수 있습니다.

	설정값에 도달했습니다.
	라이트헤드가 최저값에 있고 반사된 휘도가 설정값 보다 높습니다(주황색 게이지가 기준값 보다 높은 경우).
	라이트헤드가 최고값에 있고 반사된 휘도가 설정값 보다 낮습니다(주황색 게이지가 기준값 보다 낮은 경우).

도표 15: 휘도 수준

4.2.8 즐겨찾기

4.2.8.1 즐겨찾기 선택/저장

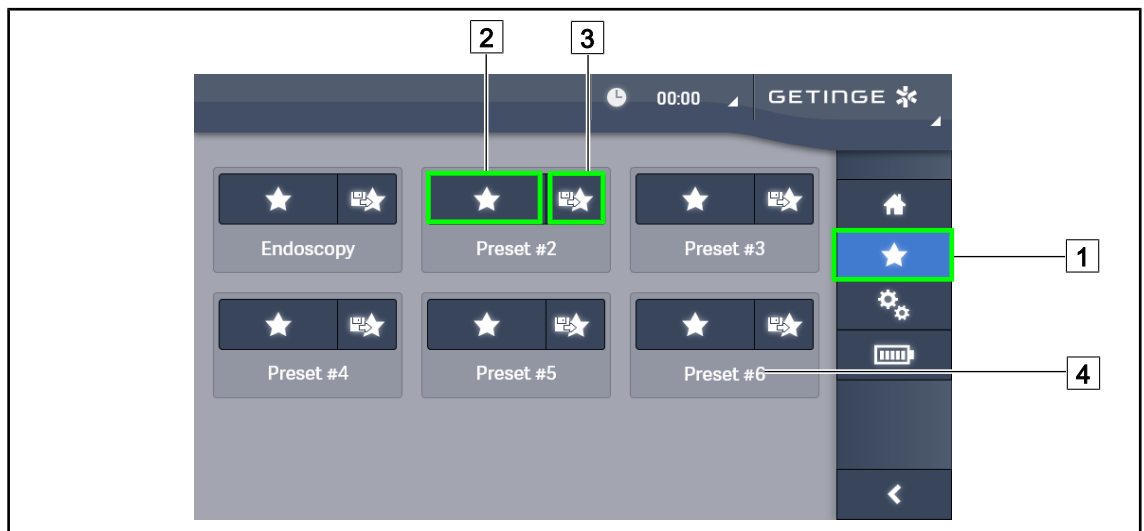


그림 50: 즐겨찾기 페이지

즐거찾기 적용

1. 즐겨찾기 페이지로 이동하려면 즐겨찾기 [1]를 누릅니다.
 - 즐겨찾기 페이지가 화면에 나타납니다.
2. 저장된 6개의 즐겨찾기 중 원하는 즐겨찾기 [4]의 이름에 따라 즐겨찾기 적용 [2]을 누릅니다.
 - 선택한 즐겨찾기가 적용됩니다.



그림 51: 즐겨찾기 저장

즐거찾기 저장

1. 즐겨찾기에 대해 원하는 구성에 따라 조명을 설정합니다.
2. 즐겨찾기 저장 [3]을 누릅니다.
 - 즐겨찾기 입력 창이 열리고(위 참조) 선택한 즐겨찾기 [5]를 표시합니다.
3. 키패드 [8]을 사용하여 즐겨찾기의 이름을 입력합니다.
4. 즐겨찾기를 저장하려면 즐겨찾기 저장 [7]을 누릅니다. 언제든지 변경 취소 [6]를 눌러 변경 사항을 취소할 수 있습니다.
 - 즐겨찾기 페이지로 돌아가기 전에 사전 설정값 저장을 확인하는 팝업창이 열립니다.

4.2.8.2 공장 사전 설정값

응용분야	비뇨기부인과		개복술		정형외과	
	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
조명	80%	80%	100%	100%	60%	60%
초점 직경	소	소	중	대	중	중
AIM	—	—	활성화	활성화	—	—
자동 레이저	—	—	—	—	—	—
컴포트 라이트	활성화	활성화	활성화	활성화	활성화	활성화
Endo	—	—	—	—	—	—

도표 16: 공장 출하 시 사전 설정된 Maquet PowerLED II 라이트헤드 즐겨찾기

응용분야	이비인후과		성형외과		심장외과	
	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
조명	60%	60%	100%	100%	100%	100%
초점 직경	소	소	중	대	중	대

도표 17: 공장 출하 시 사전 설정된 Maquet PowerLED 라이트헤드 즐겨찾기(계속)

응용분야	이비인후과		성형외과		심장외과	
	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700	PWDII 500	PWDII 700
AIM	활성화	활성화	활성화	활성화	활성화	활성화
자동 레이저	—	—	—	—	—	—
컴포트 라이트	활성화	활성화	활성화	활성화	활성화	활성화
Endo	—	—	—	—	—	—

도표 17: 공장 출하 시 사전 설정된 Maquet PowerLED 라이트헤드 즐겨찾기(계속)

응용분야	조명	초점 직경	색온도
비뇨기과/산부인과	80 %	소	4,500
개복술	100%	대	3,900
정형외과	60%	중	5,100
이비인후과	60%	소	4,500
성형외과	100%	소	5,100
심장외과	100%	소	3,900

도표 18: 공장 출하시 미리 설정된 라이트헤드 즐겨찾기

응용분야	확대/축소	WB	대비
개복술	50 %	자동	높음
정형외과	50%	자동	중
성형외과	20 %	자동	기본
심장외과	50%	자동	높음

도표 19: 공장에서 사전 저장된 즐겨찾기(Volista에만 해당)

4.3 조명장치의 위치 설정

4.3.1 이동형 조명장치 이동



경고!

감전 위험

플러그를 잘못 뽑으면 전원 케이블이 손상되어 충전부가 드러날 수 있습니다.
전원 플러그를 당겨서 뽑지 마십시오.



경고!

부상 위험

이동형 조명장치는 잘못 조작하면 넘어질 수 있습니다.

이동형 조명장치는 밀어서 옮깁니다. 지형이 경사지지 않은 한 절대 당겨서 옮기지 마십시오.



경고!

사용상의 위험

위치를 잘못 지정하면 이동형 조명장치가 제멋대로 움직일 수 있습니다.
장치의 안정성을 보장하기 위해 위치 지정 단계를 준수하십시오.



경고!

부상 위험

이동형 조명장치는 그 위에 몸을 기대면 넘어질 수 있습니다.
절대로 이동형 조명장치에 몸을 기대지 마십시오.

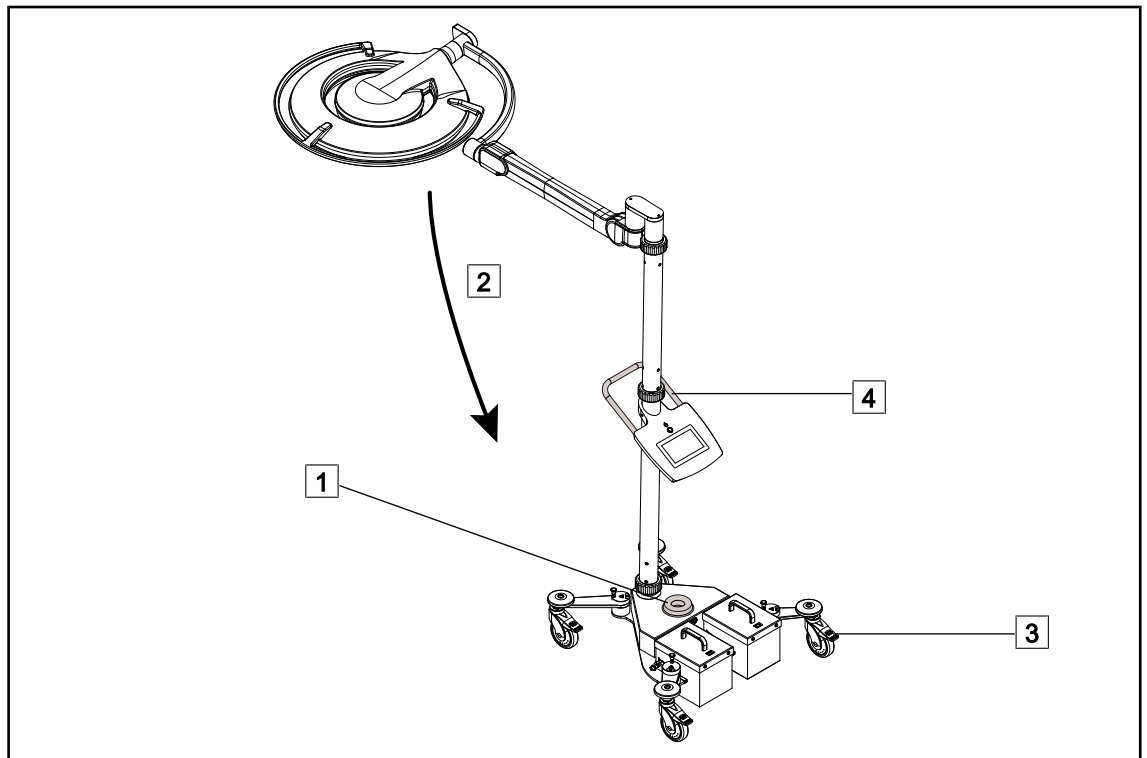


그림 52: 조명장치 이동

1. 이동형 조명장치가 주전원에 더 이상 연결되어 있지 않은지 확인합니다.
2. 받침대[1]에 있는 케이블 릴 주위의 주전원 연결 케이블을 감습니다.
3. 스프링 암[2]을 최대한 접어서 장치의 유격을 제한합니다.
4. 이동형 조명장치를 옮기기 전에 캐스터 브레이크[3]를 들어 올려 바퀴의 잠금을 해제합니다.
5. 하부 폴[4]에 위치한 손잡이로 장치를 이동시켜 밀어서 굴립니다.
6. 장치의 설치가 완료되면 캐스터 브레이크[3]를 눌러 장치를 지면에 고정시킵니다.

4.3.2 멸균 재사용 핸들 장착

**경고!****감염 위험**

멸균 재사용 핸들은 장치에서 멸균할 수 있는 유일한 요소입니다. 멸균팀이 다른 표면을 접촉할 경우 감염의 위험이 있습니다. 멸균 담당자가 아닌 다른 사람이 멸균 재사용 핸들을 만지면 감염의 위험이 있습니다.

수술 중에는 멸균팀이 멸균 재사용 핸들을 통해 장치를 조작해야 합니다. HLX 핸들의 경우 잠금 버튼이 멸균되어 있지 않습니다. 멸균 담당자가 아닌 사람은 멸균 재사용 핸들을 만지면 안 됩니다.

4.3.2.1 라이트헤드의 STG PSX 멸균 재사용 핸들 설치 및 제거

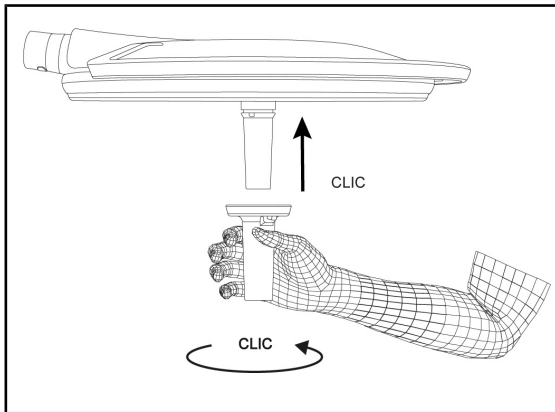


그림 53: STG PSX 멸균 재사용 핸들 설치

라이트헤드에 멸균 재사용 핸들 설치

1. 핸들을 검사하고 균열과 오물이 없는지 확인합니다.
2. 핸들을 브래킷에 끼워 넣습니다.
 - '딸깍' 소리가 납니다.
3. 두 번째 '딸깍' 소리가 날 때까지 핸들을 돌립니다.
4. 핸들이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
 - 이제 핸들이 잠겨 사용할 준비가 되었습니다.

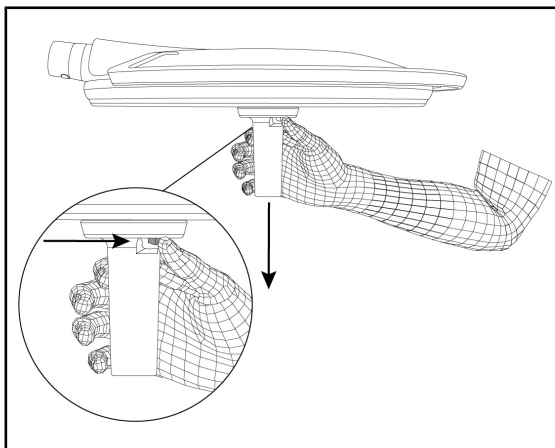


그림 54: STG PSX 멸균 재사용 핸들 제거

라이트헤드의 멸균 재사용 핸들 제거

1. 잠금 버튼을 누릅니다.
2. 핸들을 제거합니다.

4.3.2.2 라이트헤드의 STG HLX 멸균 재사용 핸들 설치 및 제거

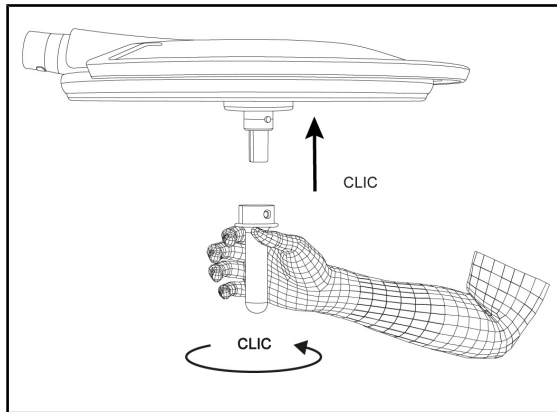


그림 55: STG HLX 멸균 재사용 핸들 설치

라이트헤드에 멸균 재사용 핸들 설치

1. 핸들을 검사하고 균열과 오물이 없는지 확인합니다.
2. 핸들을 브래킷에 끼워 넣습니다.
3. 핸들을 돌아가지 않을 때까지 돌립니다.
 - 잠금 버튼이 하우징에서 빠져 나옵니다.
4. 핸들이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
 - 이제 핸들이 잠겨 사용할 준비가 되었습니다.

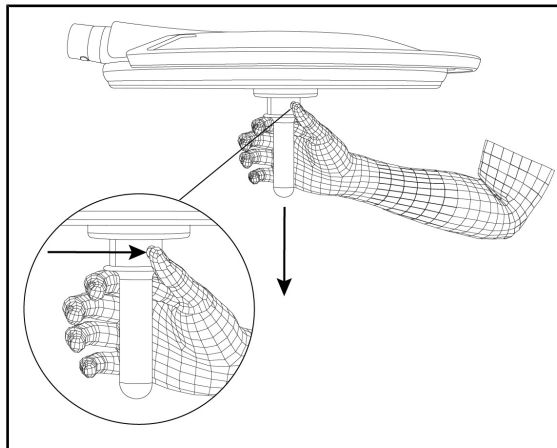


그림 56: STG HLX 멸균 재사용 핸들 제거

라이트헤드에서 멸균 재사용 핸들 제거

1. 잠금 버튼을 누릅니다.
2. 핸들을 제거합니다.

4.3.2.3 DEVON®/DEROYAL®** 핸들 설치 및 제거



지침

DEVON/DEROYAL 핸들과 함께 제공된 지침을 참조합니다.

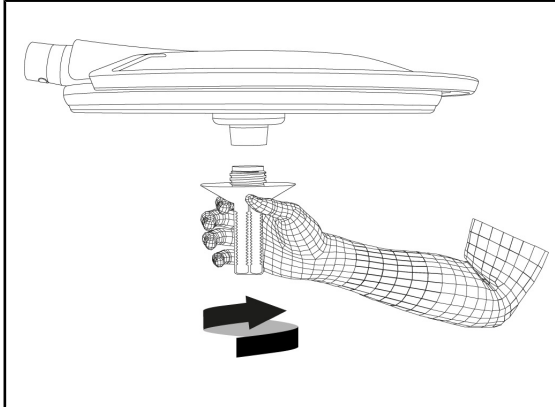


그림 57: DEVON/DEROYAL 핸들 브래킷

라이트헤드에 DEVON/DEROYAL 핸들 설치

1. 핸들이 스토퍼에 도달할 때까지 브래킷에 끼워 넣습니다.
➤ 이제 핸들을 사용할 준비가 되었습니다.

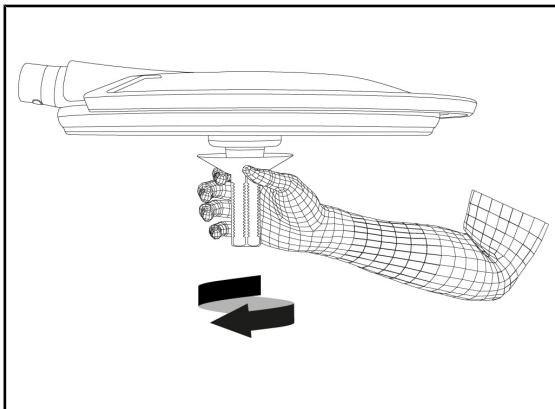


그림 58: DEVON/DEROYAL 핸들 브래킷

카메라에서 카메라용 멸균 재사용 핸들 제거

1. 핸들 브래킷에서 핸들을 돌려서 풉니다.

4.3.2.4 STG PSX VZ 멸균 재사용 핸들 설치 및 제거

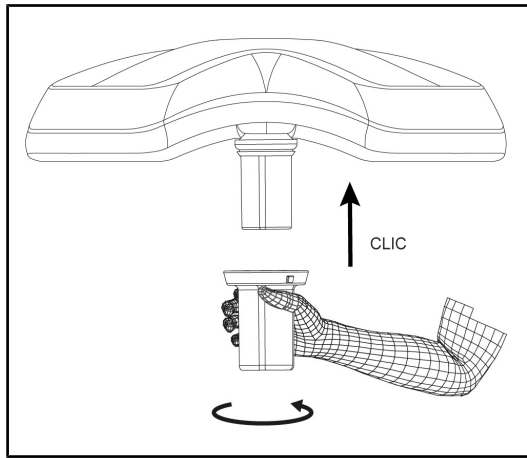


그림 59: STG PSX VZ 멸균 재사용 핸들 설치

라이트헤드의 카메라용 멸균 재사용 핸들 설치

1. 핸들을 검사하고 균열과 오물이 없는지 확인합니다.
2. 카메라에 핸들을 삽입합니다.
 - ‘딸깍’ 소리가 납니다.
 - 이제 핸들이 잠겨 사용할 준비가 되었습니다.

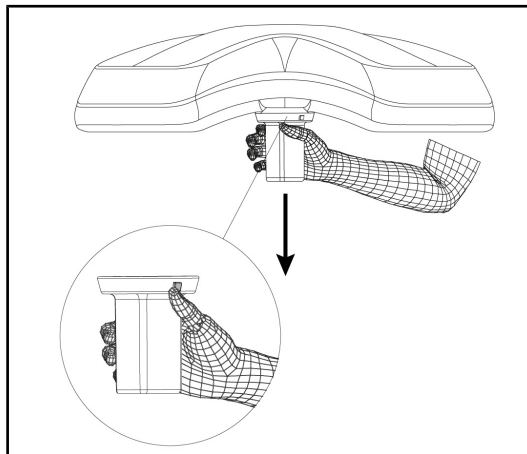


그림 60: STG PSX VZ 멸균 재사용 핸들 제거

라이트헤드의 카메라용 멸균 재사용 핸들 제거

1. 잠금 버튼을 누릅니다.
2. 핸들을 제거합니다.

4.3.3 라이트헤드 조작

**경고!****감염/조직 반응 위험**

기기와 다른 장비의 충돌로 인해 시술야에 입자가 떨어질 수 있습니다.

환자가 도착하기 전에 장치의 위치를 미리 설정합니다. 장치가 충돌하지 않도록 조심스럽게 옮깁니다.

**경고!****감염 위험**

멸균 재사용 핸들은 장치에서 멸균할 수 있는 유일한 요소입니다. 멸균팀이 다른 표면을 접촉할 경우 감염의 위험이 있습니다. 멸균 담당자가 아닌 다른 사람이 멸균 재사용 핸들을 만지면 감염의 위험이 있습니다.

수술 중에는 멸균팀이 멸균 재사용 핸들을 통해 장치를 조작해야 합니다. HLX 핸들의 경우 잠금 버튼이 멸균되어 있지 않습니다. 멸균 담당자가 아닌 사람은 멸균 재사용 핸들을 만지면 안 됩니다.

라이트헤드 조작

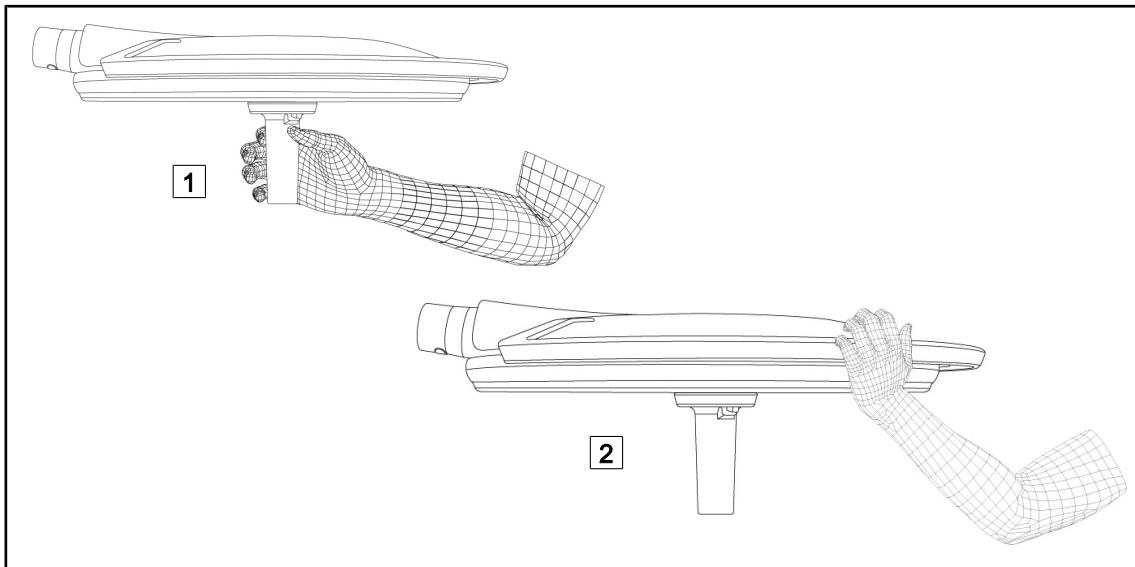


그림 61: 라이트헤드 조작

- 라이트헤드를 옮길 때 여러 가지 방법으로 조작할 수 있습니다.
 - 멸균 담당자의 경우: 라이트헤드 중앙에 전용 멸균 핸들[1]을 사용합니다.
 - 멸균 담당자가 아닌 경우: 라이트헤드 또는 외부 핸들[2]을 직접 잡습니다.

조명 회전 각도

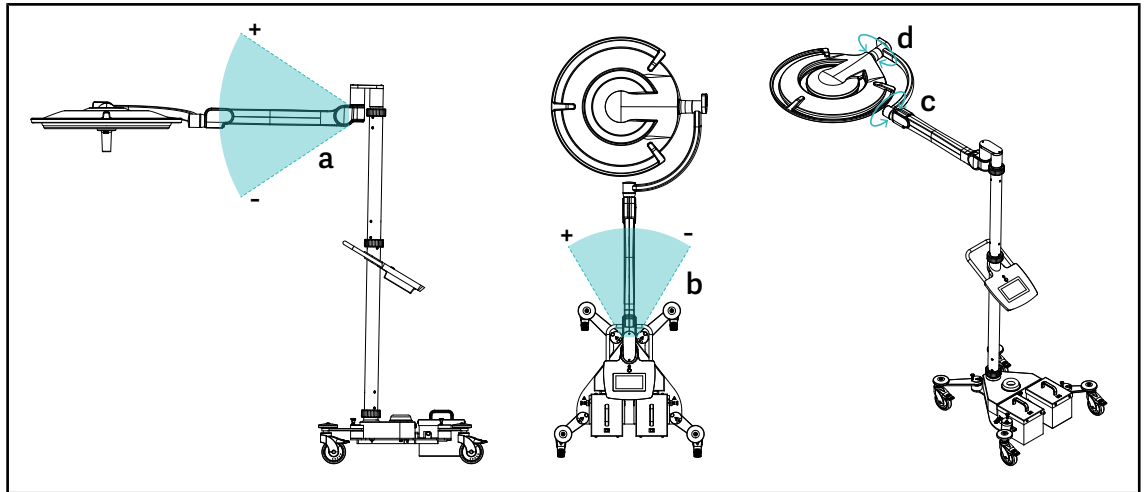


그림 62: Maquet Rolite 회전 각도

a	b	c	d
+20° / -70° (PWDII / Volista VSTII) +45° / -45° (Volista VCSII)	+15° / -15°	360°	260° (PWDII) 330° (Volista)

도표 20: Maquet Rolite 회전 각도

조명 과잉

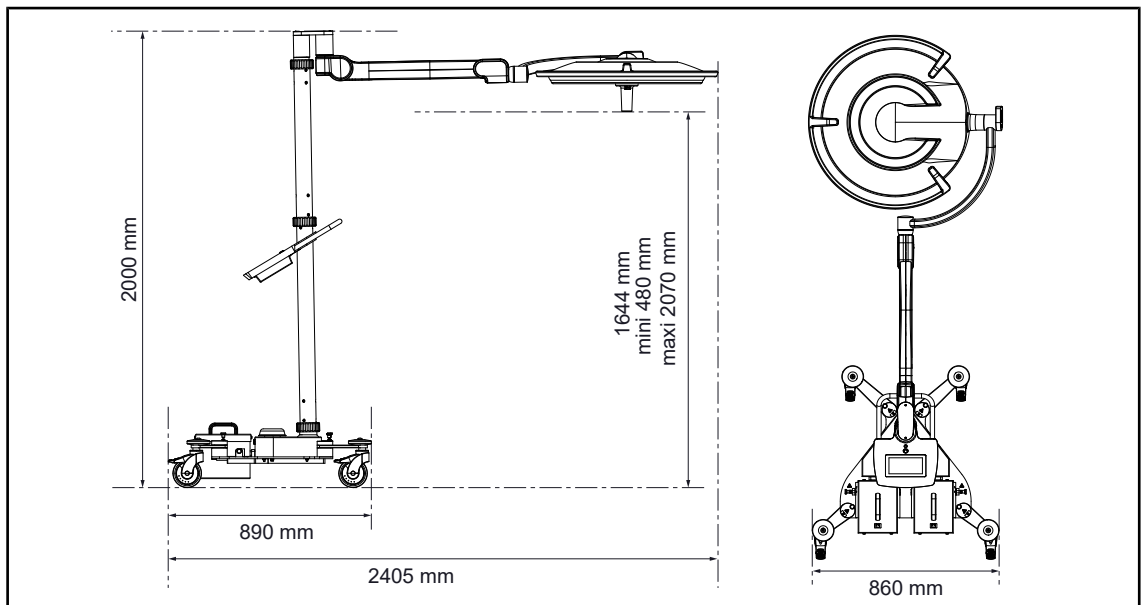


그림 63: Maquet Rolite 조명 과잉

4.3.4 위치 설정 보조 레이저(Maquet PowerLED II에만 해당)

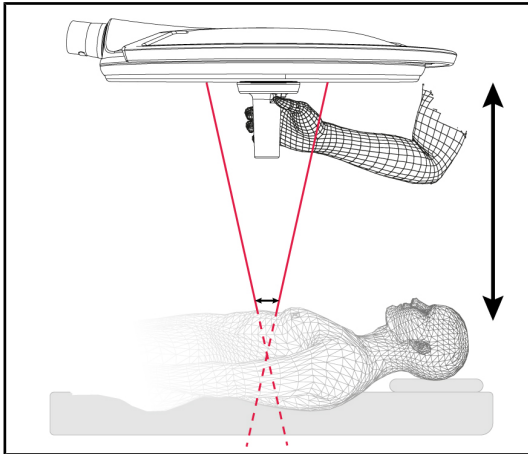


경고!

부상 위험

눈이 레이저에 장시간 노출되면 눈 부상을 입을 수 있습니다.

환자의 눈을 보호하지 않은 상태에서 레이저 빔이 환자의 눈을 향하도록 하지 마십시오. 사용자는 레이저를 직접 쳐다보지 말아야 합니다.



라이트헤드의 최적 위치를 정의하기 위해 위치 지정 보조 장치를 작동시킬 수 있습니다(아래 참조). 두 개의 레이저가 조명 초점 단계에 나타납니다. 라이트헤드를 아래로 내리거나 위로 올려 두 개의 광점을 가깝게 합니다.

그림 64: 레이저 포지셔닝

4.3.4.1 라이트헤드 키패드에서



그림 65: 키보드를 통한 레이저 포지셔닝 보조 장치 활성화

1. 버튼이 깜빡일 때까지 **레이저 1**을 누릅니다.
 - 광도가 감소하고 두 개의 레이저 스폿이 20초 동안 나타납니다.
2. 두 개의 광점이 서로 가까이 오도록 라이트헤드를 배치합니다.
 - 라이트헤드가 조명 영역으로부터 최적 거리에 오도록 합니다.
3. 20초가 경과하기 전에 **레이저 1**을 다시 눌러 수동으로 레이저를 끕니다.

4.3.4.2 터치 스크린을 사용하여

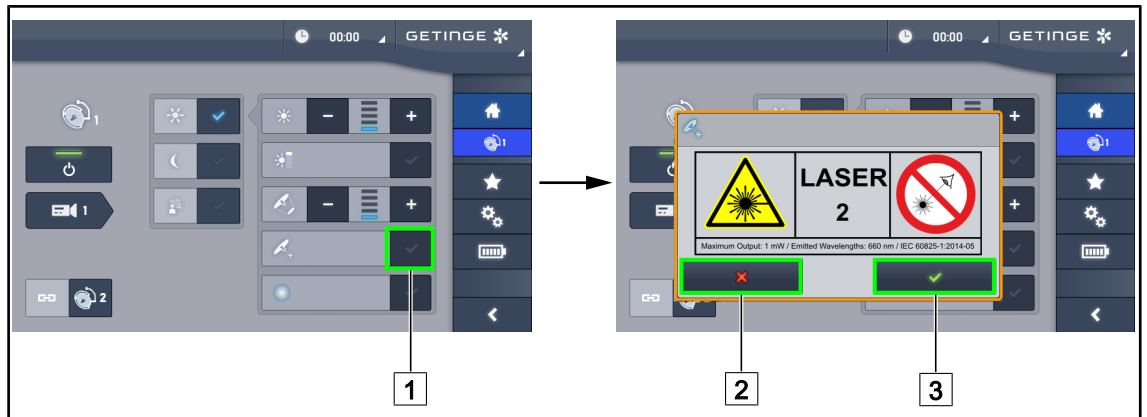


그림 66: 터치 스크린을 통한 레이저 포지셔닝 보조 장치 활성화

1. 라이트헤드 페이지에서 **레이저** [1]를 누릅니다.
➤ 창이 나타납니다.
2. **레이저 활성화** [3]를 눌러 위치 설정 보조 기능을 활성화하거나 **레이저 취소** [2]를 눌러 라이트헤드 페이지로 돌아갑니다.
➤ 광도가 감소하고 두 개의 레이저 스폿이 20초 동안 나타납니다.
3. 두 개의 광점이 서로 가까이 오도록 라이트헤드를 배치합니다.
➤ 라이트헤드가 조명 영역으로부터 최적 거리에 오도록 합니다.

4.3.5 사전 위치 설정의 예

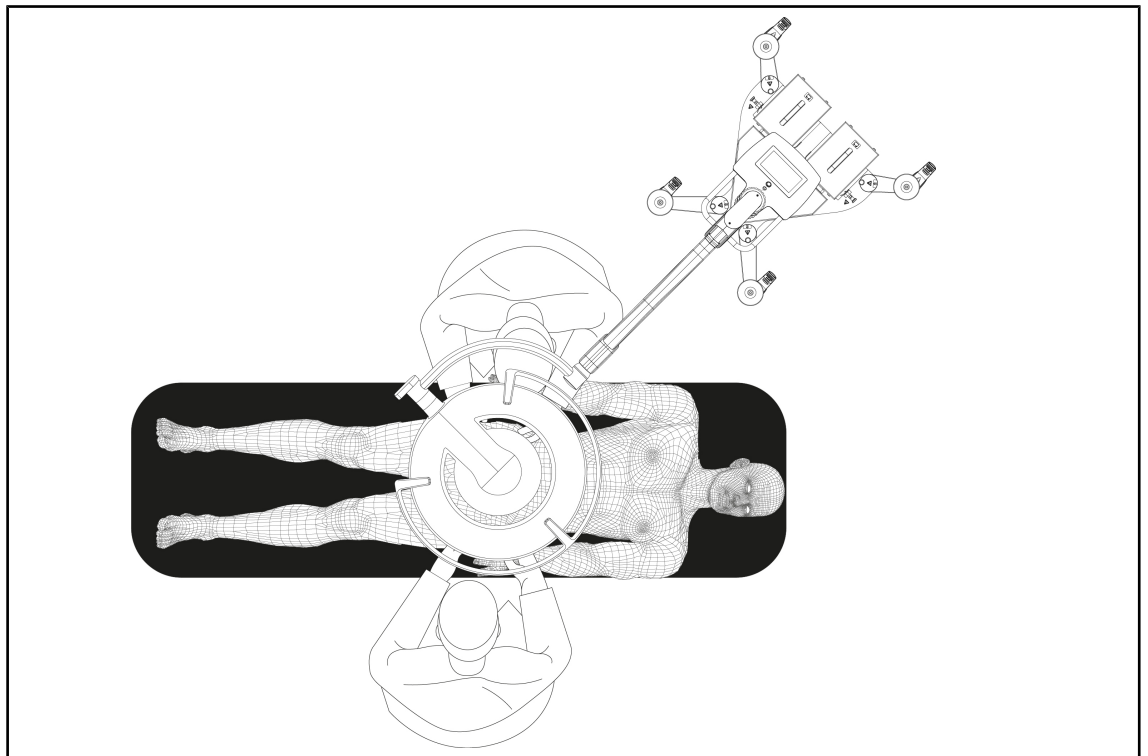


그림 67: Maquet Rolite 사전 위치 설정

4.3.6 이동형 조명장치의 보관

이동형 조명장치를 사용하지 않을 때는 다음 지침을 준수하여 보관하는 것이 좋습니다.

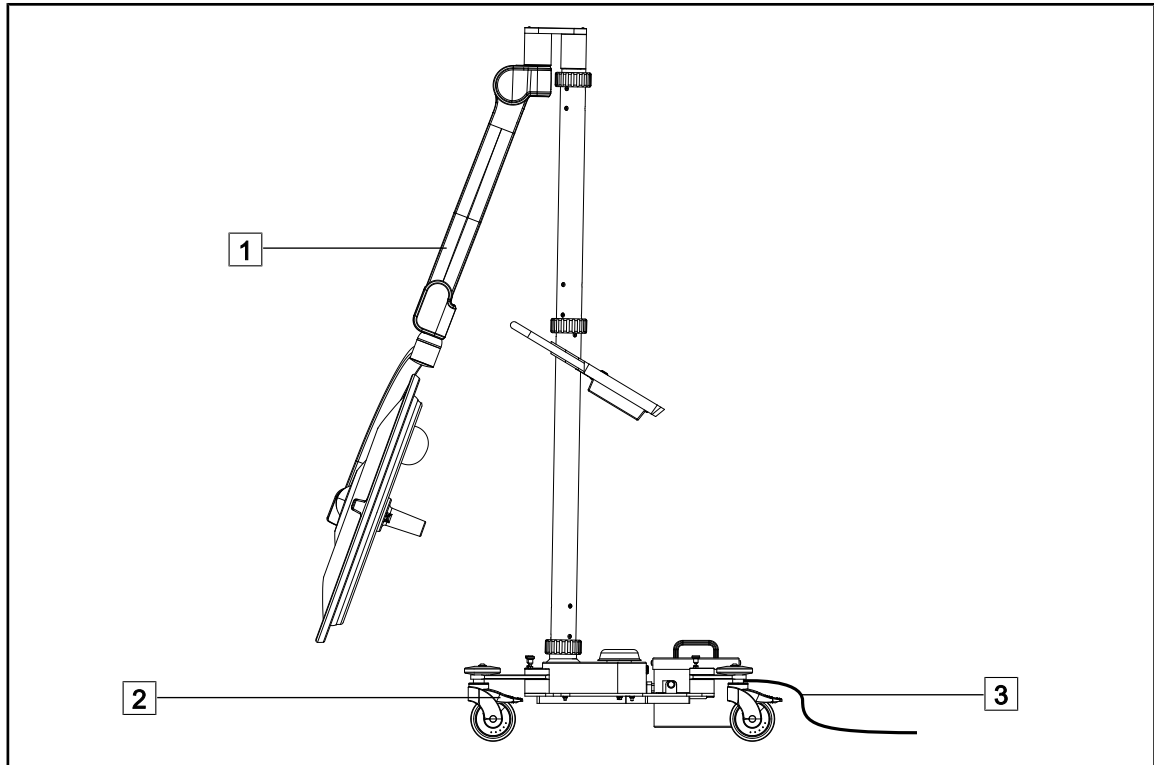


그림 68: 주차 위치

1. 스프링 암을 최대한 내립니다[1].
2. 캐스터 브레이크[2]를 눌러 장치를 바닥에 고정합니다.
3. 배터리가 있으면 케이블[3]을 주전원에 연결하여 충전합니다.



지침

배터리의 충전 시간은 약 14시간으로 추정됩니다.



지침

제품을 보관하면 배터리가 방전됩니다. 장치를 정기적으로 주전원에 연결하여 충전하고 사용하기 전에 배터리 수준을 확인합니다.

4.4 QL+ 장치 설치/제거



경고!

감염 위험
수동 중에 핸들 브래킷이나 카메라를 설치 또는 제거하면 시술야에 입자가 떨어질 수 있습니다.

Quick Lock 장치의 설치 또는 제거는 수술 영역 밖에서 이루어져야 합니다.

4.4.1 Maquet PowerLED II 라이트헤드에 장치 장착

핸들 브래킷의 경우

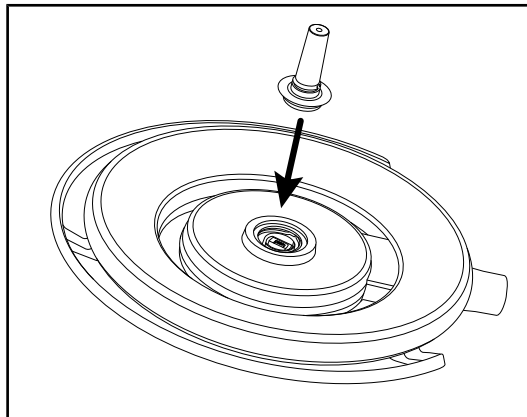


그림 69: QL+ 장치 설치

1. QL 장치가 잠길 때까지 라이트헤드 중앙의 하우징에 삽입합니다.
 2. 라이트헤드를 움직여 QL 장치가 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
- QL+ 장치가 설치되었습니다.

LMD의 경우

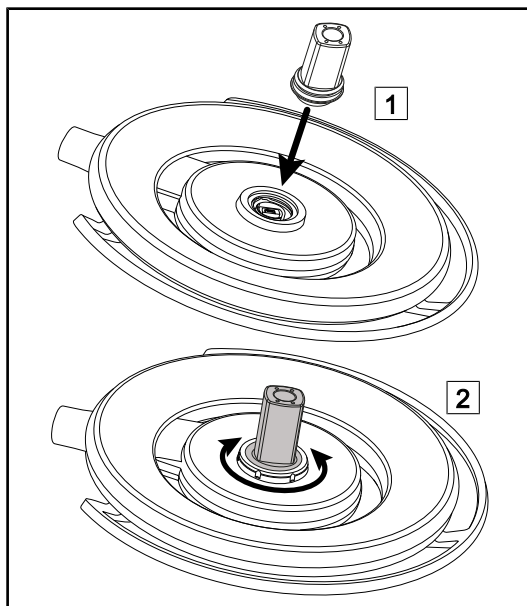


그림 70: QL+ 장치 설치

1. QL 장치를 라이트헤드 [1] 중앙의 하우징에 삽입합니다.
 2. '딸깍' 소리가 날 때까지 부속품을 돌립니다 [2].
 3. 라이트헤드를 움직여 QL 장치가 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
- QL+ 장치가 설치되었습니다.

4.4.2 장치 분해



지침

핸들 브래킷을 제거하려면 라이트헤드를 뒤집어 밑면이 천장을 향하도록 합니다.

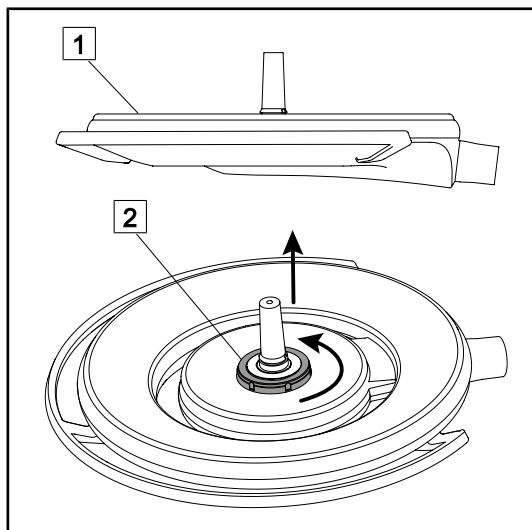


그림 71: Quick Lock 장치 제거

1. 라이트헤드를 뒤집어 밑면이 천장[1]을 향하도록 합니다.
2. 라이트헤드가 뒤집어지면 잠금 인터페이스 [2]를 시계 반대 방향으로 돌린 후 잠금 인터페이스 [2]를 잡고 Quick Lock 장치를 제거합니다.
 - Quick Lock 장치가 제거되었습니다.

4.5 QL 장치 설치/제거



경고!

부상 위험

핸들 브래킷이나 카메라가 없으면 충전부에 액세스할 수 있습니다.

자격을 갖춘 기사가 Quick Lock 부속품을 설치/제거하기 전에 먼저 장치의 전원을 차단합니다.



경고!

감염 위험

수동 중에 핸들 브래킷이나 카메라를 설치 또는 제거하면 시술야에 입자가 떨어질 수 있습니다.

Quick Lock 장치의 설치 또는 제거는 수술 영역 밖에서 이루어져야 합니다.

4.5.1 장치의 위치 사전 설정

4.5.1.1 카메라와 LMD QL에

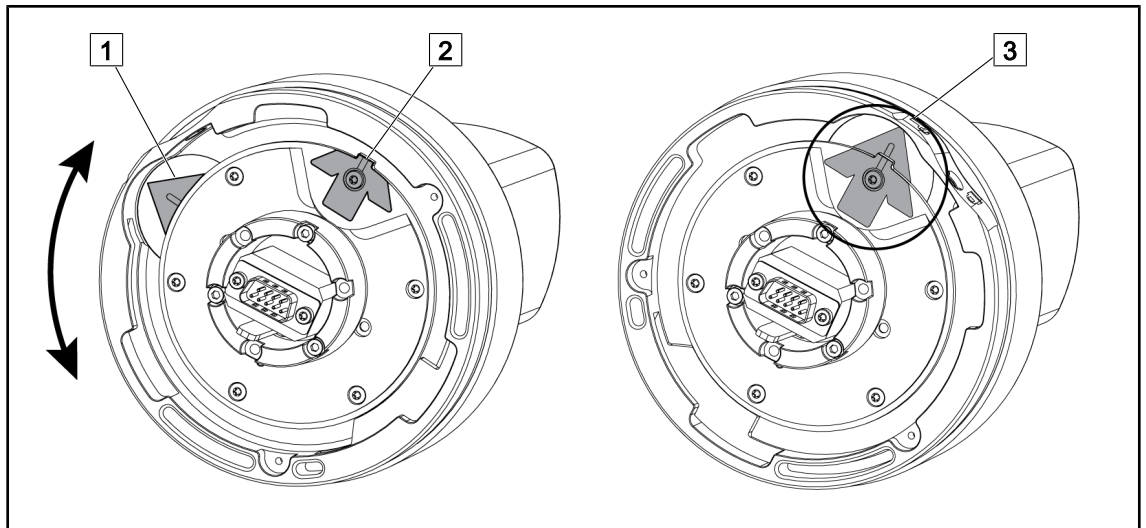


그림 72: Quick Lock 카메라의 사전 위치 설정

1. 받침대[1]를 돌려 끝부분[2]에 연결하고 녹색 화살표[3]를 형성하도록 합니다.

➤ 카메라를 배치할 준비가 되었습니다.

4.5.1.2 라이트헤드에서

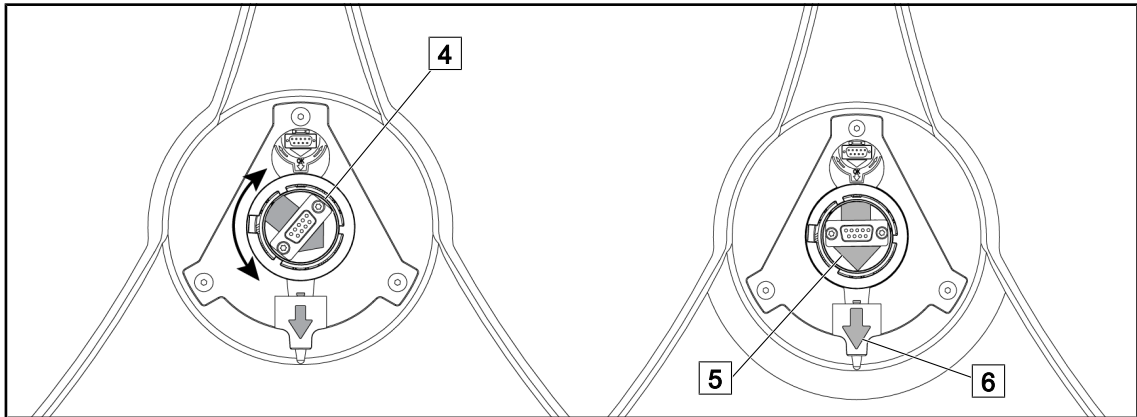


그림 73: 라이트헤드의 사전 위치 설정

1. 라이트헤드의 중앙에서 두 개의 녹색 화살표(5)와 (6)가 정렬되도록 커넥터(4)의 방향을 맞춥니다.
➤ 라이트헤드가 카메라를 받을 준비가 되었습니다.

4.5.2 라이트헤드에 장치 장착

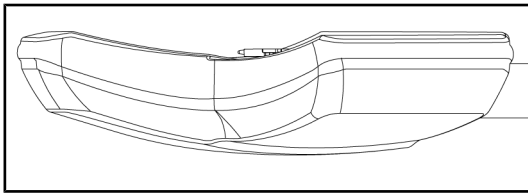


그림 74: 라이트헤드의 위치

1. 라이트헤드의 밑면이 천장을 향하도록 합니다.
➤ 라이트헤드에 카메라를 설치하는 것이 간단해집니다.

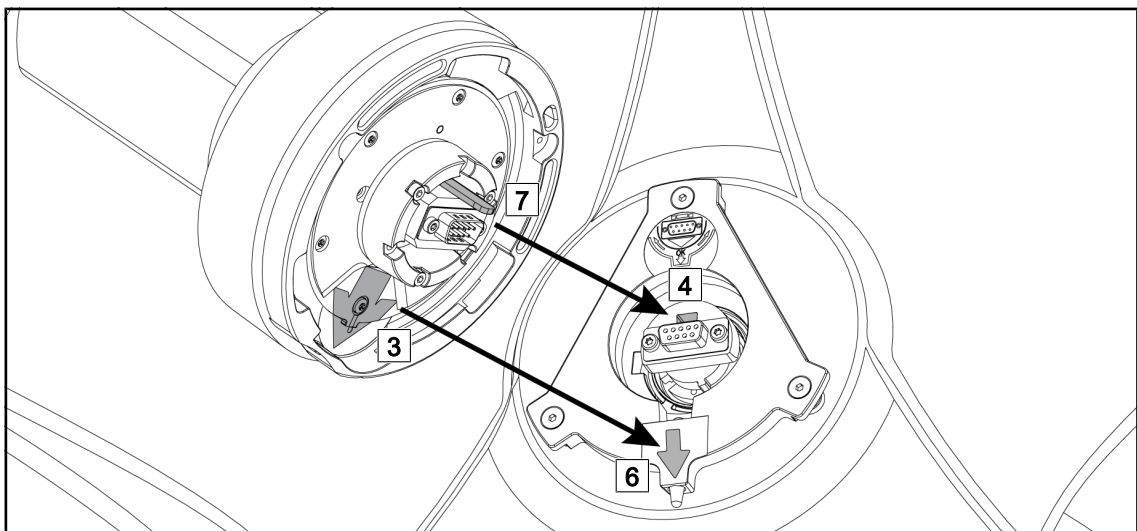


그림 75: Quick Lock 장착 방법

1. 러그(7)가 있는 카메라를 홈(4) 앞에 놓습니다.
2. 두 개의 화살표(3)과 (6)를 서로 마주보게 배치합니다.

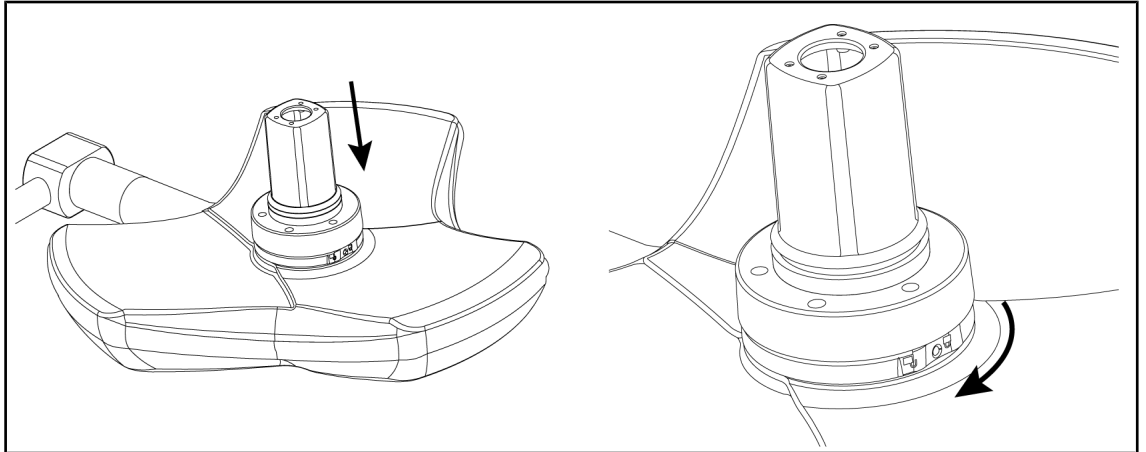


그림 76: 라이트헤드에 카메라 배치

1. 카메라 받침대가 하면의 스토퍼에 일정하게 도달할 때까지 라이트헤드에 카메라를 삽입합니다.
2. 카메라의 받침대를 양손으로 잡고 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌립니다.

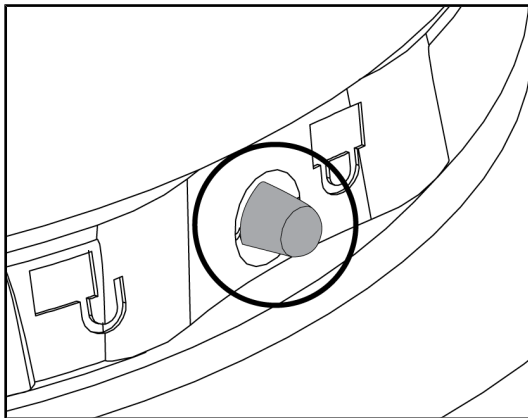


그림 77: 라이트헤드에 카메라 잠금

1. 카메라가 제대로 설치되었고 잠금 버튼이 홈에서 나와 있는지 확인합니다.
 2. 핸들로 라이트헤드를 이동하며 장치가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
 3. 카메라 전체가 330°로 잘 회전하는지 확인합니다.
- 장치가 설치되었습니다.

4.5.3 장치 분해

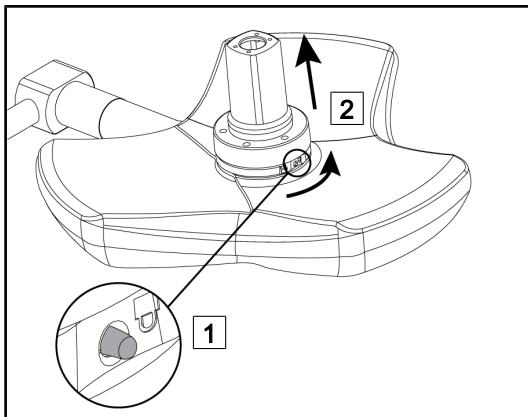


그림 78: 라이트헤드 제거

1. 잠금 버튼에 압력을 가합니다.
 2. 버튼을 누른 채 1 양손으로 장치의 하단을 잡고 시계 반대 방향으로 돌립니다.
 3. Quick Lock 카메라를 위로 잡아당겨 제거합니다 2.
- 장치가 제거되었습니다.

4.5.4 Quick Lock 핸들 브래킷

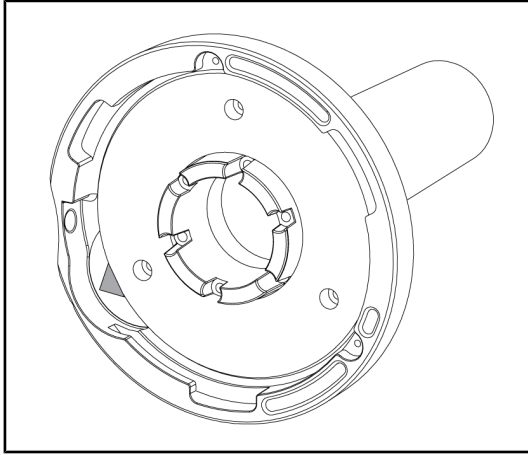


그림 79: Quick Lock 핸들 브래킷

1. 위치 설정 단계는 카메라와 동일합니다.
2. 녹색 화살표가 일렬로 정렬되어야 하고, 커넥터는 정확하게 제 위치에 있어야 합니다.

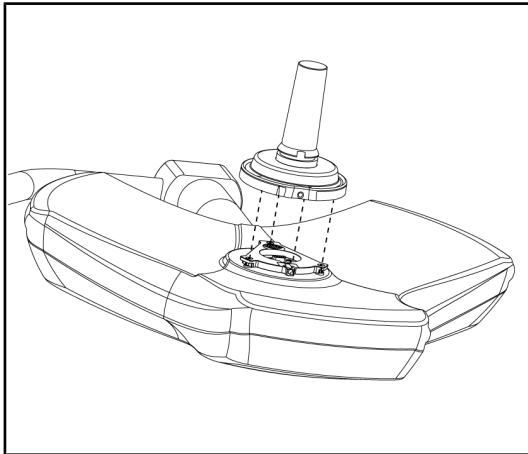


그림 80: 핸들 소개

1. 녹색 화살표를 일렬로 정렬시켜 핸들을 삽입합니다(핸들에 러그가 없음).
 2. 카메라와 마찬가지로 핸들의 하단을 시계 방향으로 돌리며 걸쇠가 제대로 맞물렸는지 확인합니다.
- 핸들 브래킷이 설치되었습니다.

4.6 카메라 사용

4.6.1 무선 비디오 시스템(Volista 라이트헤드에만 해당)



지침

시스템을 최적 상태로 사용하기 위해 동일한 구성으로 두 대의 카메라를 사용하지 말고 수신기에서 3m 이상 떨어진 곳에 카메라를 배치하지 마십시오.

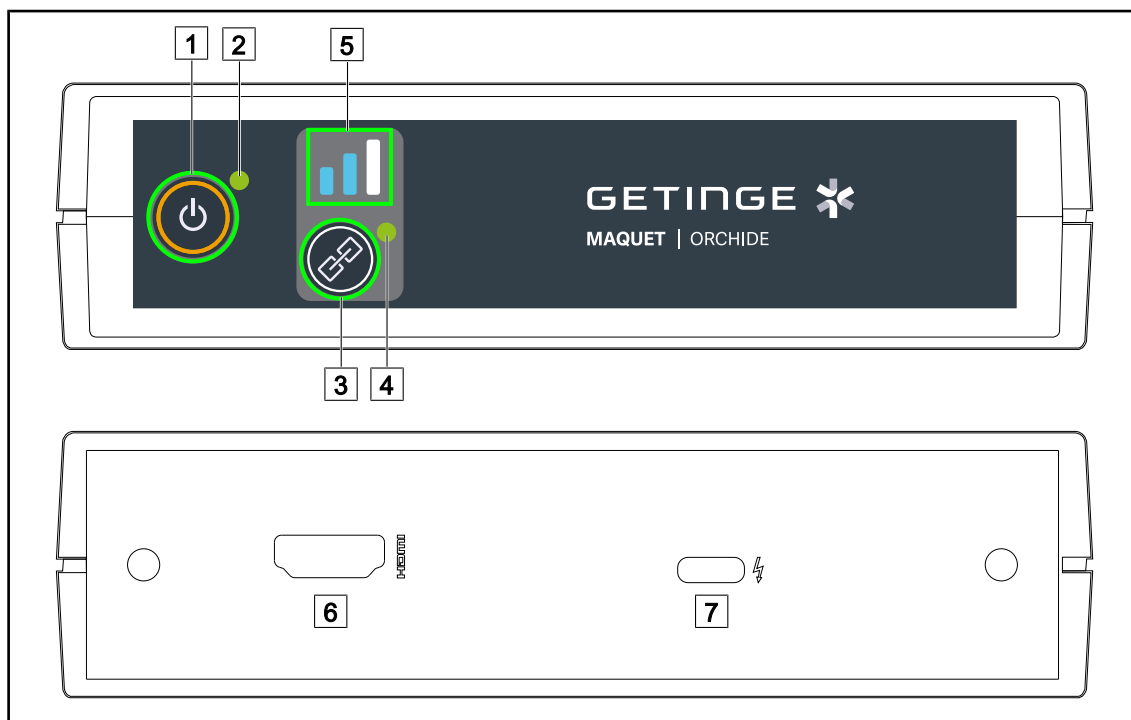


그림 81: 무선 비디오 시스템 수신기

- | | |
|-------------|------------|
| 1 ON/OFF 버튼 | 5 신호 표시등 |
| 2 전원 표시등 | 6 HDMI 단자 |
| 3 페어링 버튼 | 7 USB-C 단자 |
| 4 페어링 표시등 | |

수신기 켜기/끄기

- ON/OFF 1를 누르면 전원 표시등 2에 녹색 불이 들어오며 수신기가 켜집니다.
- 수신기를 끄려면 전원 표시등 2이 꺼질 때까지 ON/OFF 1를 누릅니다.

5분 동안 사용하지 않으면 수신기가 대기 모드로 전환되고 전원 표시등 2이 깜박입니다. 카메라가 감지되는 즉시 자동으로 다시 켜집니다.

카메라 자동 페어링(기본적으로 자동 모드 활성화)

- 카메라와 수신기의 전원을 켭니다.
- 카메라를 검색하는 동안 페어링 표시등 4이 빠르게 깜박입니다.
- 페어링 중에 페어링 표시등 4이 천천히 깜박입니다.
- 페어링 표시등 4에 녹색 불이 계속 켜져 있으면 카메라가 페어링된 것입니다.
- 페어링 표시등 4에 빨간색 불이 켜지면 페어링에 실패한 것입니다. 이 경우, 카메라가 켜져 있는지 확인하고 페어링 버튼을 사용하여 페어링을 다시 시작합니다.

	이미지 손실 위험		약한 신호
	중간 신호		양호한 신호

도표 21: 신호 강도

수술 환경의 요소(인력, 기타 장치, 수술실 구성)가 신호 강도에 영향을 미칠 수 있습니다. 카메라 및/또는 수신기를 이동하면 신호 강도를 높일 수 있습니다.



지침

시스템에는 두 가지 페어링 모드가 있습니다.

- 자동: 수신기와 전원이 켜져 있고 사용 가능한 모든 카메라가 자동으로 페어링됩니다.
- 수동: 전원이 켜져 있고 사용 가능한 모든 새 카메라와의 페어링은 페어링 버튼을 통해 절차를 시작한 후에만 이루어집니다.

카메라 페어링

- 수신기를 수동 모드로 둔 상태에서 페어링 표시등[4]이 녹색으로 빠르게 깜박일 때까지 **페어링** [3]을 누릅니다.
- 카메라가 발견되면 페어링 중에는 페어링 표시등[4]이 느리게 깜박이다가 페어링이 완료되면 녹색으로 계속 켜집니다.

페어링 모드 변경: 수동 또는 자동

- 수신기가 이미 카메라와 페어링되어 있어야 합니다.
- 신호 표시등[5]의 막대가 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 **페어링** [3]을 누릅니다. 깜박이는 막대가 왼쪽의 가장 작은 막대이면 수신기가 수동 페어링 모드에 있고, 오른쪽의 가장 큰 막대이면 수신기가 자동 페어링 모드에 있습니다.



그림 82: 자동/수동 모드



지침

수동 모드에서는 카메라가 두 대 중 한 대의 전원이 꺼지더라도 자동으로 전환되지 않습니다. **페어링** [3]을 눌러 활성 카메라로 전환하십시오.

공장 설정 복원

수신기를 공장 설정으로 복원하려면 **ON/OFF 버튼** [1]을 5초간 누르십시오.

4.6.2 카메라 제어

4.6.2.1 라이트헤드 키패드에서

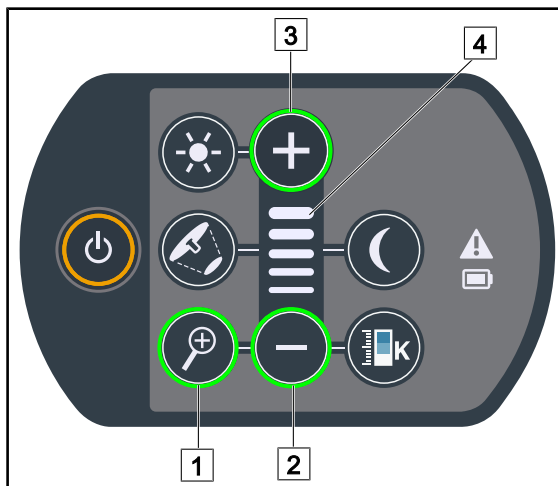


그림 83: 카메라 키패드 제어

카메라 줌 조정

1. 카메라 줌 [1]을 누릅니다.
2. 줌 레벨을 변경하려면 플러스 [3]와 마이너스 [2]를 누릅니다.
 - 카메라의 줌 레벨은 선택한 기능의 수준 표시기에 따라 달라집니다[4].

4.6.2.2 터치 스크린에서



지침

터치 스크린에서는 조명과 관계없이 카메라를 켜거나 끌 수 있습니다.



그림 84: 카메라 켜기

홈 페이지에서 카메라 켜기

1. 카메라 활성 구역 [1]을 누릅니다.
 - 버튼에 녹색 불이 들어오고 이미지가 화면에 나타납니다.
2. 카메라 활성 구역 [1]을 다시 눌러 카메라 페이지로 이동합니다.

라이트헤드 페이지에 카메라 켜기

1. 라이트헤드 페이지에서 카메라 단축키 [2]를 누릅니다.
 - 그러면 카메라 페이지가 표시되고 카메라가 켜집니다.

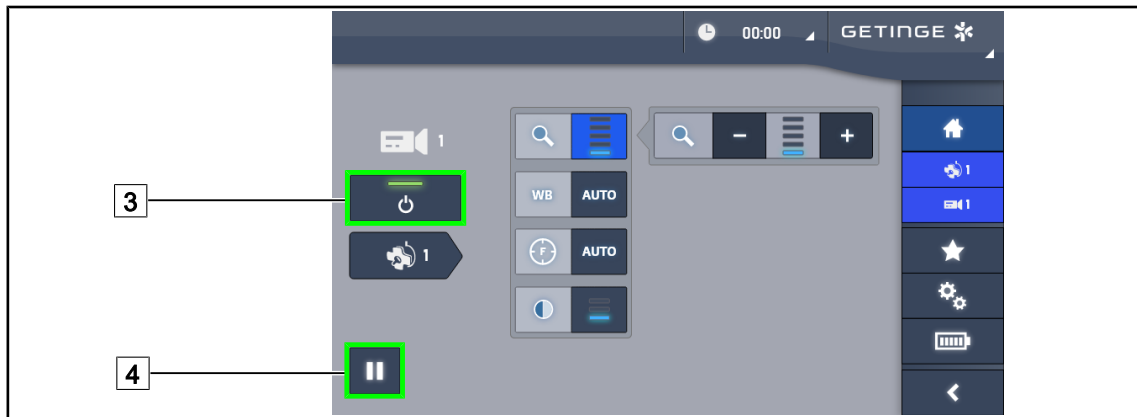


그림 85: 카메라 페이지

카메라 끄기

1. 카메라를 끄려면 카메라 페이지에서 **카메라 ON/OFF** [3]을 누릅니다.
 > 버튼과 카메라가 꺼집니다.

카메라 일시 중지

1. 카메라를 일시 중지시키려면 **카메라 일시 중지** [4]를 누릅니다.
 > 버튼에 파란색 불이 들어오고 전송된 이미지가 고정됩니다.
2. 비디오를 다시 시작하려면 **카메라 일시 중지** [4]를 누릅니다.



그림 86: 줌 조정

확대/축소

1. **줌** [5]을 눌러 줌 조정 메뉴로 이동합니다.
2. **줌 증가** [6] 또는 **줌 감소** [7]를 눌러 화면 이미지의 크기를 실시간으로 조정합니다.



그림 87: 화이트 밸런스

자동으로 화이트 밸런스 조정

1. 화이트 밸런스 [8]를 누릅니다.
2. 화이트 밸런스가 자동으로 이루어지게 하려면 자동 밸런스 [9]를, 화이트 밸런스가 3200K에서 이루어지게 하려면 인공 조명 [10]을, 화이트 밸런스가 5800K에서 이루어지게 하려면 일광 조명 [11]을 누릅니다.
 - 선택한 버튼에 파란색 불이 들어오고 화이트 밸런스가 적용됩니다.

수동으로 화이트 밸런스 조정

1. 화이트 밸런스 [8]를 누릅니다.
2. 카메라 아래에 균일한 화이트 받침대를 놓습니다.
3. 수동 밸런스 [12]를 눌러 카메라 아래에 놓은 받침대의 화이트 밸런스를 맞춥니다.
 - 선택한 버튼에 파란색 불이 들어오고 화이트 밸런스가 적용됩니다.

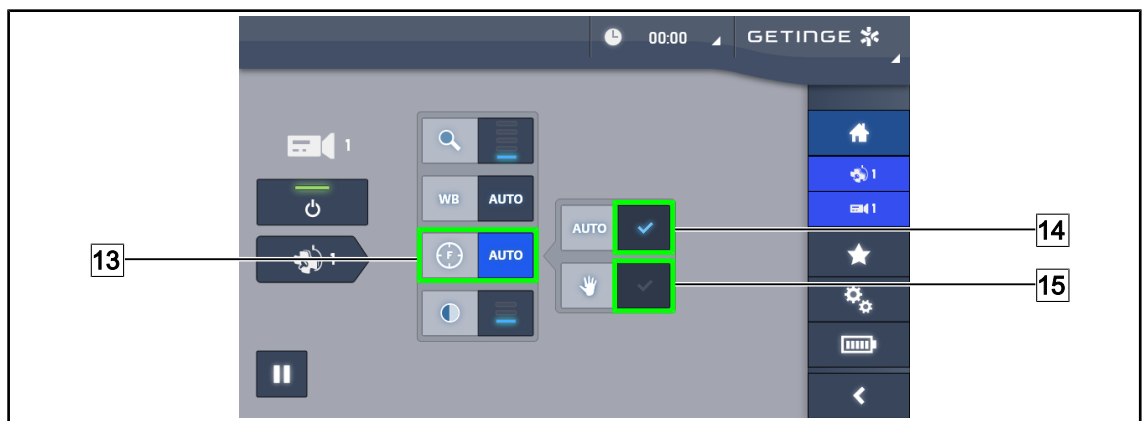


그림 88: 초점 조정

자동 초점 조정

1. 초점 조정 메뉴로 이동하려면 초점 [13]을 누릅니다.
2. 자동 초점 [14]을 누릅니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 초점이 자동으로 맞춰집니다.

수동 초점 조정

1. 초점 조정 메뉴로 이동하려면 **초점 [13]**을 누릅니다.
2. **자동 초점 [14]**을 누릅니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 초점이 자동으로 맞춰집니다.
3. 카메라를 원하는 거리에 둡니다.
4. **수동 초점 [15]**을 누릅니다.
 - 버튼에 파란색 불이 들어오고 카메라의 초점이 고정됩니다.



그림 89: 대비 조정

대비 조정

1. 대비 조정 메뉴로 이동하려면 **대비 [16]**를 누릅니다.
2. **대비 증가 [17]** 또는 **대비 감소 [18]**를 눌러 3개의 대비 수준 중 하나를 선택합니다[9].

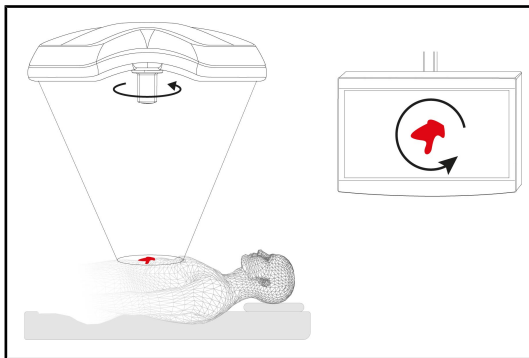
4.6.3 카메라의 방향 조정

그림 90: 카메라의 방향 조정

관찰자의 위치에 따라 화면에서 이미지의 방향 최적화

1. 카메라에 핸들을 삽입합니다. 라이트헤드의 카메라용 멸균 재사용 핸들 설치 및 제거
2. 핸들을 사용하여 카메라를 돌립니다.
 - 화면의 이미지가 회전합니다.

4.7 설정 및 기능



그림 91: 터치 스크린 설정 페이지

화면 밝기 조정으로 이동

1. 메뉴 표시줄에서 **설정** [1]을 누릅니다.
➤ 설정 페이지가 나타납니다(위 참조)
2. **화면 밝기** [2]를 누릅니다.
➤ 밝기 조정 페이지가 나타납니다.

날짜/시간 설정 및 스톱워치/타이머 기능에 액세스

1. 메뉴 표시줄에서 **설정** [1]을 누릅니다.
➤ 설정 페이지가 나타납니다(위 참조)
2. **날짜/시간** [3]을 누릅니다.
➤ 날짜/시간 및 스톱워치/타이머 기능 설정 페이지가 나타납니다.

Tilt 핸들 설정에 액세스

1. 메뉴 표시줄에서 **설정** [1]을 누릅니다.
➤ 설정 페이지가 나타납니다(위 참조)
2. **Tilt 핸들** [4]을 누릅니다.
➤ Tilt 핸들 설정 페이지가 나타납니다.

구성 정보로 이동

1. 메뉴 표시줄에서 **설정** [1]을 누릅니다.
➤ 설정 페이지가 나타납니다(위 참조)
2. **정보** [5]를 누릅니다.
➤ 구성 정보 페이지가 나타납니다.

4.7.1 화면 밝기

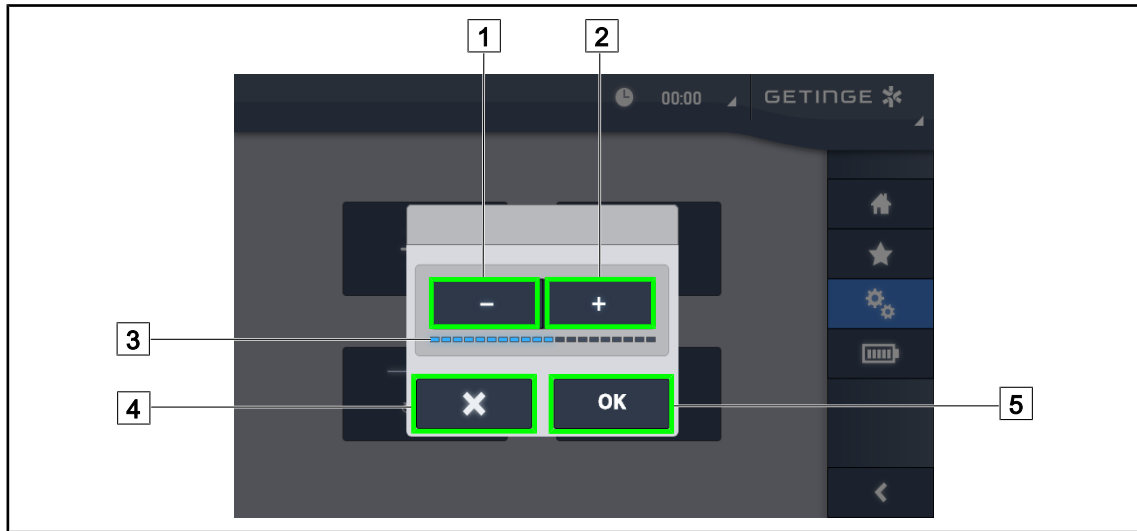


그림 92: 화면 밝기 조정

1. 플러스 [2]를 눌러 터치 스크린의 밝기를 증가시키거나 마이너스 [1]를 눌러 화면의 밝기를 감소시킵니다.
 > 밝기 수준 표시등 [3]에 따라 화면의 밝기가 달라집니다.
2. 확인 [5]을 눌러 밝기 변경 사항을 확인하거나 취소 [4]를 눌러 현재 변경 사항을 취소합니다.
 > 설정된 밝기가 저장되고 적용됩니다.

4.7.2 날짜, 시간 및 스톱워치/타이머 기능

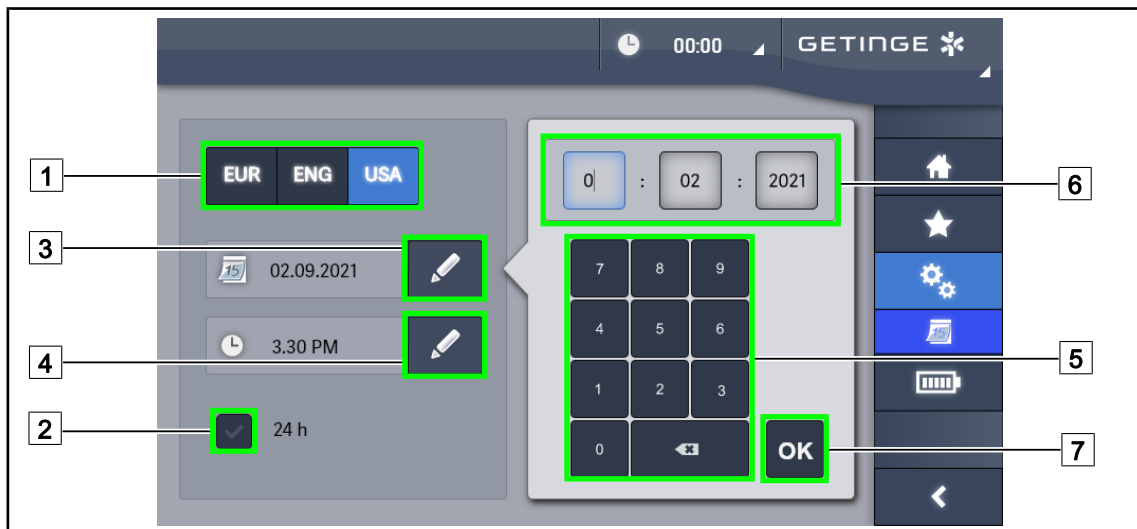


그림 93: 날짜 및 시간 조정

날짜 및 시간 형식 지정

1. 원하는 날짜 표시 형식을 선택하려면 날짜 형식 [1]을 누릅니다. 날짜의 형식을 유럽식, 영국식 또는 미국식으로 구성할 수 있습니다.
 > 선택한 형식의 바탕색이 파란색으로 바뀝니다.

- 원하는 시간 표시 형식을 선택하려면 **시간 형식** [2]을 누릅니다.

➤ 버튼이 활성화되면 24시간 형식이 선택되고, 활성화되지 않으면 12시간 형식이 선택됩니다.

날짜 변경

- 날짜 편집** [3]을 누릅니다.

➤ 입력 창이 열립니다.

- 변경하고자 하는 필드(일, 월 또는 연도)를 누릅니다[6].

➤ 선택한 필드가 파란색으로 둘러 싸여 있습니다.

- 키패드[5]를 사용하여 원하는 값을 입력하고 **확인** [7]을 눌러 변경 사항을 확인합니다.

➤ 입력 창이 사라지고 변경 사항이 적용됩니다.

시간 변경

- 시간 편집** [4]을 누릅니다.

➤ 입력 창이 열립니다.

- 변경하고자 하는 필드(시 또는 분)를 누릅니다[6].

➤ 선택한 필드가 파란색으로 둘러 싸여 있습니다.

- 키패드[5]를 사용하여 원하는 값을 입력하고 **확인** [7]을 눌러 변경 사항을 확인합니다.

➤ 입력 창이 사라지고 변경 사항이 적용됩니다.

4.7.3 TILT 핸들

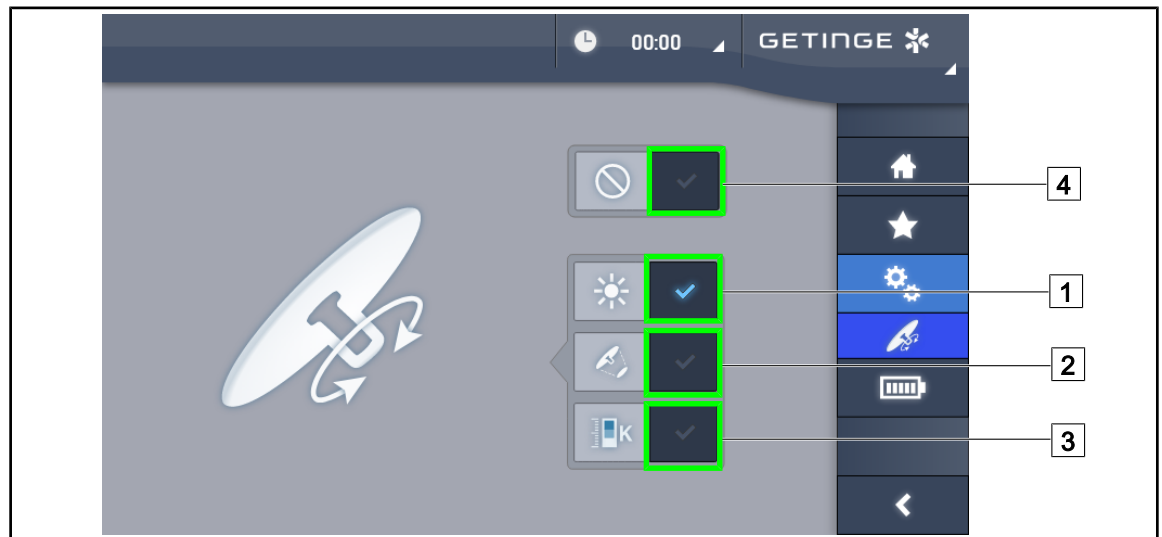


그림 94: Tilt 핸들 설정(Volista에만 해당)

Tilt 핸들 설정

- Tilt 핸들이 라이트헤드의 광도를 조정하도록 하려면 **조도** [1]를 누릅니다.
- Tilt 핸들이 라이트헤드의 광초점 직경을 조정하도록 하려면 **초점 직경** [2]을 누릅니다.
- Tilt 핸들이 라이트헤드의 조명 온도를 조정하도록 하려면 **색온도** [3]를 누릅니다.
- 비활성화** [4]를 누르면 Tilt 핸들이 비활성화되고 조명 매개 변수가 조정되지 않습니다.

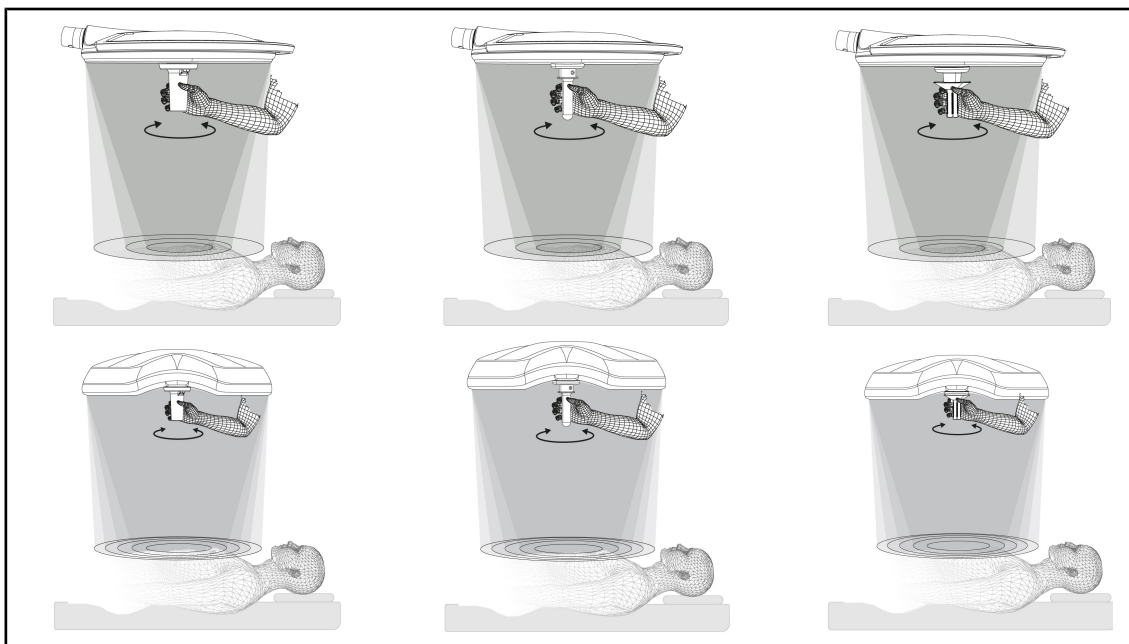


그림 95: TILT 핸들 세트

TILT 핸들로 초점 직경(또는 Volista에서만 선택한 매개변수) 조정

1. 핸들을 돌려 초점을 늘리거나 줄입니다.



지침

TILT 핸들에는 스토퍼가 없습니다.

4.7.4 정보

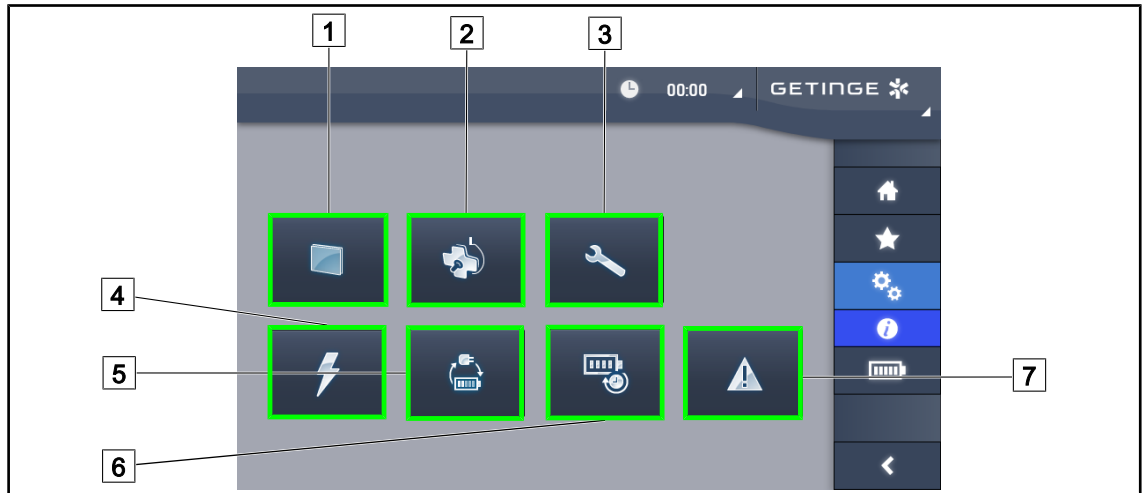


그림 96: 정보 페이지

- | | |
|----------|-----------------|
| 1 터치 스크린 | 5 비상전원 공급장치로 전환 |
| 2 라이트헤드 | 6 배터리 수명 |
| 3 유지보수 | 7 결함 |
| 4 전원 | |

번호	가능한 조치
1	소프트웨어 버전과 업데이트 날짜, 터치 스크린 참조번호, 일련번호 및 설치 날짜로 이동하려면 터치 스크린 을 누릅니다.
2	설치된 라이트헤드에 대한 다음과 같은 정보로 이동하려면 라이트헤드 를 누릅니다: 제품 번호, 일련번호, 사용 가능한 옵션 및 사용 시간.
3	유지보수를 수행한 날짜와 Getinge 연락처 정보로 이동하려면 유지보수 를 누릅니다.
4	정전 기록으로 이동하려면 전원 공급 을 누릅니다.
5	비상전원 공급장치 전환 시험 기록으로 이동하려면 비상전원 공급장치 전환 을 누릅니다.
6	배터리 자율성 시험 기록으로 이동하려면 배터리 자율성 을 누릅니다.
7	결함 기록으로 이동하려면 결함 을 누릅니다.

도표 22: 전체 정보 메뉴

4.8 비상 배터리

4.8.1 표시등

표시등	명칭	의미
	주황색 배터리 표시등	비상전원 공급장치로 전환
	적색 표시등 점멸	전원 차단 임박

도표 23: 라이트헤드 키패드의 비상전원 공급장치 작동 표시등

표시등	명칭	의미
	전체 주황색 배터리	비상전원 공급장치로 전환
	일부 주황색 배터리	남아 있는 자율성
	적색 표시등 점멸	전원 차단 임박

도표 24: 터치 스크린의 비상전원 공급장치 작동 표시등

4.8.2 배터리 시험 실시



경고!

부상 위험

배터리 자율성 시험을 하면 배터리가 완전히 방전됩니다.

배터리 자율성 시험 후 곧바로 작동시키지 마십시오. 배터리가 충전될 시간을 줍니다.

4.8.2.1 터치 스크린에서



그림 97: 배터리 시험

비상전원 공급장치 전환 시험 시작

1. 조명 끄기
2. 메뉴 표시줄에서 **설정** [1]을 누릅니다.
➤ 배터리 시험 페이지가 나타납니다.
3. 시험을 시작하려면 **배터리 시험** [2]을 누릅니다.
➤ 시험에 성공하면 마지막 비상전원 공급장치 [6] 전환 시험 날짜가 업데이트되고 녹색 체크 표시 [10]가 나타납니다. 하지만 시험에 실패하면 빨간색 십자 기호 [4]와 유지보수 정보 [5] 버튼이 나타납니다.
4. 시험에 실패하면 Getinge 기술서비스로 문의하기 전에 **유지보수 정보** [4]를 눌러 유지보수 정보 페이지로 이동합니다.

배터리 자율성 시험 시작

1. 조명 끄기
2. 메뉴 표시줄에서 **설정** [1]을 누릅니다.
➤ 배터리 시험 페이지가 나타납니다.
3. 시험을 시작하려면 **자율성 시험** [3]을 누릅니다.
➤ 시험에 성공하면 마지막 배터리 자율성 시험 날짜 [7]과 배터리 자율성 기간 [8]이 업데이트되고 녹색 체크 표시 [10]이 나타납니다. 하지만 시험에 실패하면 빨간색 십자 기호 [4]와 유지보수 정보 [5] 버튼이 나타납니다.
4. 시험에 실패하면 Getinge 기술서비스로 문의하기 전에 **유지보수 정보** [4]를 눌러 유지보수 정보 페이지로 이동합니다.



지침

언제든지 빨간색 십자 기호 [5]를 눌러 자율성 시험을 중단할 수 있습니다.

5 문제 해결

5.1 알람 표시등

5.1.1 라이트헤드 및 벽면 키패드의 표시등

표시등	명칭	의미
	표시등 꺼짐	결함 없음
	주황색 표시등	결함(예: 카드 불량, 통신 결함, 기타 결함)이 있는 경우의 구성; 비상전원 공급장치의 수준이 너무 낮음.

도표 25: 경고 표시등

표시등	명칭	의미
	표시등 꺼짐	전원장치의 구성
	주황색 표시등	비상전원 공급장치의 구성
	적색 표시등 점멸	비상전원 공급장치의 구성 배터리가 거의 다 방전되어 몇 분 후 기기가 꺼질 수 있습니다.

도표 26: 배터리 표시등

5.1.2 터치 스크린의 표시등

표시등	명칭	의미
	완전히 충전된 배터리	섹터 구성, 주전원에만 표시
	주황색 표시등	비상전원 공급장치의 구성 막대 수는 배터리 레벨을 나타냅니다.
	적색 표시등 점멸	비상전원 공급장치의 구성 배터리가 거의 다 방전되어 몇 분 후 장치가 꺼질 수 있습니다.
	배터리 충전 표시등	충전 중의 구성

도표 27: 배터리 표시등

표시등	명칭	의미
—	표시등 꺼짐	결함 없음
	경고 표시등	결함이 있는 경우의 구성

도표 28: 경고 표시등

표시등	명칭	의미
—	표시등 꺼짐	일일 유지보수
	유지보수 표시등	예정된 연례 유지보수

도표 29: 유지보수 표시등

5.2 가능한 이상 및 고장

기계적 결함

문제	가능한 원인	시정 조치
멸균 재사용 핸들이 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어가지 않음	잠금장치가 손상되었습니다	핸들을 교체합니다
장치를 조작하는 것이 너무 어려움	기계적 잠금	Getinge 기술서비스로 문의하십시오

도표 30: 기계적 오작동 및 고장

전자/광학

문제	가능한 원인	시정 조치
라이트헤드가 켜지지 않음	정전	해당 시설의 기술 부서에 문의합니다
	기타 원인	Getinge 기술서비스로 문의하십시오
라이트헤드가 꺼지지 않음	통신 문제	Getinge 기술서비스로 문의하십시오
하나 이상의 LED가 작동하지 않음	LED 카드나 표시등에 결함이 있습니다	Getinge 기술서비스로 문의하십시오
조명이 깜박거림	LED 카드나 표시등에 결함이 있습니다	Getinge 기술서비스로 문의하십시오
컨트롤 키가 반응하지 않습니다	키패드에 결함이 있습니다	Getinge 기술서비스로 문의하십시오
	통신 문제	Getinge 기술서비스로 문의하십시오
	장치에서 이 기능을 사용할 수 없습니다	A

도표 31: 문제 해결

터치 스크린의 오류 메시지는 다음과 같이 구성됩니다:

PWD2 A B C D에서

A	결함이 있는 라이트헤드(700 또는 500)
B	결함이 있는 라이트헤드의 주소(1, 2 또는 3)
C	결함 유형
D	결함이 있는 구성 요소

터치 스크린의 오류 메시지는 다음과 같이 구성됩니다:

A: B (C)

A	관련 부품(예: Volista 600 1, PowerSupply,...)
B	결함 유형(예: 통신 실패, 옵션 실패 등)
C	결함이 있는 요소(예: Power 2, Backup,...)

터치 스크린의 오류 메시지 예: Volista 600 1: 옵션 실패(백업)



지침

이상의 모든 경우에 Getinge 기술서비스로 문의하십시오.

6 7 - 세척/소독/멸균



경고!

감염 위험

세척 및 멸균 절차는 보건시설과 현지 규정에 따라 매우 상이합니다.

사용자는 병원의 위생 전문가에게 문의해야 합니다. 권장 제품을 사용하고 권장 방법을 준수해야 합니다.

6.1 장치의 세척 및 살균



경고!

장비 손상 위험

기기를 세척할 때 기기 내부로 액체가 침투하면 기기의 작동에 나쁜 영향을 미칠 수 있습니다.

많은 양의 물로 기기를 세척하거나 기기에 용제를 직접 분사하지 마십시오.



경고!

감염 위험

일부 클리닝 제품이나 절차는 기기를 감싸고 있는 외피를 손상시킬 수 있으며, 손상된 외피가 수술 도중 시술야에 입자 형태로 떨어질 수 있습니다.

글루타르알데히드, 페놀, 요오드 등이 포함된 용액은 사용을 금합니다. 훈증 방식은 장치를 소독하는 데 적합하지 않으므로 사용을 금합니다.



경고!

화상 위험

장치의 일부 부품은 사용 후에 뜨거워집니다.

세척을 하기 전에 먼저 전원이 꺼져 있고 장치가 식었는지 확인합니다.

세척, 소독 및 안전에 대한 일반 지침

기기의 세척 및 소독에 필요한 조치는 표준 사용 조건에서 낮은 수준의 소독으로 충분합니다. 이 기기는 감염 위험이 낮고 치명적이지 않은 장비로 분류됩니다. 하지만 감염 위험에 따라 중간 수준의 소독과 높은 수준의 소독을 고려할 수도 있습니다.

주무 기관은 위생 및 소독 문제에 대한 국가 요구 사항(표준 및 지침)을 따라야 합니다.

6.1.1 기기 세척

1. 멸균 재사용 핸들을 제거합니다.
2. 계면활성제에 적신 헝겊으로 기기를 세척하고 희석도, 적용 시간 및 적용 온도에 관한 제조자의 권장사항을 준수합니다. 세제와 인산염 같은 활성성분이 포함된 약알칼리성 일반 세척제(비누액)를 사용합니다. 연마제는 표면을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
3. 물에 살짝 적신 천으로 세제를 제거하고 마른 천으로 물기를 닦아냅니다.

6.1.2 기기 소독

형겅에 살균소독액을 함침시켜 제조사의 권장사항을 준수하며 기기에 균일하게 발라줍니다.

6.1.2.1 사용 가능한 소독제

- 소독제는 살균제가 아닙니다. 소독제는 묻어 있는 미생물을 양적으로 그리고 질적으로 감소시켜 줍니다.
- 반드시 다음과 같은 활성성분들이 결합된 표면 소독제만 사용해야 합니다.
 - 제4암모늄(그람음성균 억제, 그람양성균 살균, 피막 바이러스에 다양하게 작용하고 노출 바이러스에 작용하지 않음, 병균의 진행 억제, 포자 박멸 없음)
 - 구아디닌 유도체
 - 알코올

6.1.2.2 허용된 활성성분

종류	활성성분
낮은 수준의 소독	
제4암모늄	▪ 디데실디메틸암모늄 클로라이드 ▪ 알킬디메틸벤질암모늄 클로라이드 ▪ 디옥틸디메틸암모늄 클로라이드
비구아니드	▪ 염산폴리헥사메틸렌비구아니드
중간 수준의 소독	
알코올	▪ 프로판-2-올
높은 수준의 소독	
산(酸)	▪ 설파민산(5%) ▪ 말산(10%) ▪ 에틸렌디아민테트라아세트산(2.5%)

도표 32: 사용할 수 있는 활성성분 목록

시험을 거친 상용 제품의 예

- ANIOS®사 제품**: Surfa'Safe®**
- 기타 제품: 20% 또는 45% 이소프로필 알코올

6.2 Maquet Sterigrip 멸균 재사용 핸들의 세척 및 살균

6.2.1 세척 준비

핸들을 사용한 후에는 오물이 말라 붙지 않도록 즉시 알데히드가 포함되지 않은 세척소독액에 넣어 담가둡니다.

6.2.2 수동 세척 시

1. 핸들을 세제에 15분 동안 담가둡니다.
2. 부드러운 솔과 보풀이 일지 않는 천으로 닦습니다.
3. 오물이 남아 있지 않도록 핸들의 청결 상태를 확인합니다. 오물이 남아 있으면 초음파 세척 과정을 이용합니다.
4. 깨끗한 물로 완전히 헹구어 세제를 완전히 제거합니다.
5. 자연 건조시키거나 마른 천으로 핸들을 닦습니다.



지침

무효소 세제를 사용하는 것이 좋습니다. 효소 세제는 장치를 손상시킬 수 있습니다. 장치를 장시간 담가 두어서는 안 되며 세척을 마친 후 물로 깨끗이 씻어야 합니다.

6.2.3 세척소독기를 이용한 세척 시

핸들은 세척소독기에서 최대 93°C로 소독하고 행굴 수 있습니다. 권장 주기 사례:

단계	온도	시간
예비 세척	18~35°C	60초
세척	46~50° C	5분
중화	41~43° C	30초
세척 2	24~28° C	30초
행굴	92~93° C	10분
건조	공기 건조	20분

도표 33: 세척소독기를 이용한 세척 주기의 예

6.2.4 Maquet Sterigrip 핸들의 살균

**경고!****감염 위험**

권장 멸균 주기를 초과한 멸균 재사용 핸들은 홀더에서 떨어질 수 있습니다.

상기 멸균 매개 변수에 따라 STG PSX 멸균 재사용 핸들은 50회 이상, STG HLX 멸균 재사용 핸들은 350회 이상 사용에 대해 품질을 보장하지 않습니다. 이 권장 주기를 준수하시기 바랍니다.

**지침**

Maquet Sterigrip 멸균 재사용 핸들은 가압 증기 멸균기에서 멸균하도록 설계되었습니다.

1. 핸들에 오물과 균열이 없는지 확인합니다.
 - 핸들에 오물이 묻어 있으면 핸들을 세척 주기로 보냅니다.
 - 핸들에 하나 이상의 균열이 있으면 핸들을 사용할 수 없으므로 현행 프로토콜에 따라 폐기해야 합니다.
2. 아래 설명된 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 핸들을 멸균기 트레이에 놓습니다.
 - 멸균 포장재로 씹니다(이중 포장 또는 그에 상응하는 포장).
 - 종이 또는 비닐 재료의 멸균 봉지에 씹니다.
 - 포장이나 파우치를 사용하지 말고 잠금 버튼을 아래로 향하도록 합니다.
3. 현행 규정에 따라 멸균과정을 감시하기 위한 생물지표 및/또는 화학지표를 넣고 함께 포장합니다.
4. 멸균기 제조업체의 지침에 따라 멸균 주기를 시작합니다.

살균 사이클	온도 (°C)	시간 (분)	건조 (분)
ATNC (Prion) 선진공	134	18	—

도표 34: 증기 멸균 주기의 예

7 유지보수

조명장치의 처음 성능과 신뢰도를 보존하기 위해서는 다음과 같은 방식으로 연 1회 유지보수 및 검사를 실시해야 합니다. 보증 기간 중 Getinge 기사 또는 Getinge 공인 대리점을 통해 유지보수 및 점검 작업을 실시해야 합니다. 보증 기간 이후에는 Getinge 기사, Getinge 공인 대리점 또는 Getinge에서 교육을 받은 병원 기사를 통해 유지보수 및 점검 작업을 실시해야 합니다. 필요한 기술 교육을 받기 위해서는 판매업체에 연락하여 주십시오.

예방적 유지보수	매년 실시
----------	-------

일부 부품은 기기의 수명 기간 동안 교체해야 합니다. 자세한 내용은 유지보수 설명서를 참조하십시오. 유지보수 설명서에는 수술조명장치의 신뢰도와 성능을 보존하고 안전한 사용을 보장하기 위해 실시해야 할 모든 전기, 기계 및 광학 점검과 주기적으로 교체해야 할 마모 부품이 언급되어 있습니다.



지침

유지보수 설명서는 현지 Getinge 대리점에서 구할 수 있습니다. 현지 Getinge 대리점의 연락처 정보를 찾으려면 다음 페이지를 방문하십시오:
<https://www.getinge.com/int/contact/find-your-local-office>.

8 기술적 특성

8.1 광학 특성

8.1.1 Maquet PowerLED II 라이트헤드의 광학 특성



지침

1m(39.4인치)의 기준 거리(D_{REF})에서 측정한 값.

특성	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	허용오차
중앙 조명($E_{c,MI}$)	15,000~160,000lx		—
최대 중앙 조명($E_{c,MI}$) ²	160,000lx		0/- 10%
최대 중앙 조명($E_{c,Ref}$) ³	150,000lx		± 10%
명시야 직경 d_{10}	13 / 20 / 27 cm	13 / 20 cm	± 2 cm
광 분포 d_{50}/d_{10}	0,56		± 0,06
조도 깊이 60% 이상	24 / 43 / 44 cm	38 / 53 cm	± 10%
색온도	고정: 3800 K / 4300 K		± 400K
연색지수(Ra)	96		± 4
특별연색지수(R9)	90		±10
특수 연색지수(R13)	96		± 4
특별연색지수(R15)	95		± 5
최대 스펙트럼 조도(E_{Total}) ²	550 W/m ²		± 10%
레벨 8 이하에서의 스펙트럼 조도	< 350 W/m ²		—
복사 에너지 ²	3.4 mW/m ² /lx		± 0.4
자외선(UV) 조도 ²	≤ 0,7 W/m ²		—
FSP 시스템	예		—
주변 조명 모드에서의 조도	< 500lx		—

도표 35: IEC 60601-2-41 표준에 따른 Maquet PowerLED II 라이트헤드의 광학 데이터

² 95cm/37.4인치(± 10%)의 최대 조도 거리(D_{MI})에서 측정

³ 160,000lx로 제한

잔류 조도 ⁴	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	허용오차
마스크 1개가 있는 경우	77%	56%	± 10
마스크 2개가 있는 경우	56%	46%	± 10
공동 시뮬레이션 활성화	87%	100%	± 10
마스크 1개가 있는 경우, 공동 시뮬레이션 활성화	64%	56%	± 10
마스크 2개가 있는 경우, 공동 시뮬레이션 활성화	45%	46%	± 10

도표 36: Maquet PowerLED II 700 및 Maquet PowerLED II 500 라이트헤드의 잔류 조도

AIM 모드의 특성 ⁴	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500	허용오차
명목조도(AIM 활성화)	130,000lx		± 10%
오프셋 마스크 1개	100%	100%	± 10
마스크 2개가 있는 경우의 음영 희석	100%	75%	± 10

도표 37: AIM 모드의 특성

레이저 특성	값
파장	650nm
빔의 확산	0.58mrad
최대 송출 전력	1mW

도표 38: 레이저 특성

광생물학적 위험 요인

**경고!****부상 위험**

이 제품은 유해할 수 있는 광방사선을 방출합니다. 안구 손상이 발생할 수 있습니다. 사용자는 수술조명장치에서 방출되는 빛을 응시해서는 안 됩니다. 수술 중 환자의 얼굴을 덮어 눈을 보호해야 합니다.

**경고!****부상 위험**

이 제품은 사용자 또는 환자에게 해를 끼칠 수 있는 광방사선을 방출합니다.

이 제품에서 방출되는 광방사선은 IEC 60601-2-41에 정의된 광생물학적 위험을 줄이기 위한 노출 제한을 충족합니다.

⁴ 가장 큰 초점 직경에서 측정된 광측정치

8.1.2 VSTII 라이트헤드의 광학 특성



지침

1m(39.4인치)의 기준 거리(D_{REF})에서 3,900K 및 4,500K로 측정한 값.

특성	VSTII 600 및 400 라이트헤드	허용오차
중앙 조명($E_{c,MI}$)	10,000lx~160,000lx	—
최대 중앙 조명($E_{c,MI}$) ⁵	160,000lx	0/- 10%
최대 중앙 조명($E_{c,Ref}$) ⁶	150,000lx	± 10%
명시야 직경 d_{10}	20~25cm	± 15%
광 분포 d_{50}/d_{10}	0,57	± 0,07
조도 깊이 60% 이상	52 - 58cm	± 10%
색온도	고정: 3,900K 가변: 3,900K / 4,500K / 5,100K ⁷	± 400K
연색지수(Ra)	95	± 5
특수 연색지수(R9)	90	+10/-20
특수 연색지수(R13)	95	± 5
특수 연색지수(R15)	95	± 5
최대 스펙트럼 조도(E_{Total}) ⁵	550 W/m ²	± 10%
레벨 4 이하에서의 스펙트럼 조도	< 350W/m ²	—
복사 에너지 ⁵	3.3 mW/m ² /lx	± 0.5
자외선(UV) 조도 ⁵	≤ 0.7W/m ²	—
FSP 시스템	예	—
주변 조명 모드에서의 조도	< 500lx	—

도표 39: IEC 60601-2-41:2021 표준에 따른 Volista VSTII 라이트헤드의 광학 데이터

잔류 조도	VSTII 600	VSTII 400	허용오차
마스크 1개가 있는 경우	55%	42%	± 10
마스크 2개가 있는 경우	50%	45%	± 10
공동 시뮬레이션 활성화	100%		± 10
마스크 1개가 있는 경우, 공동 시뮬레이션 활성화	55%	42%	± 10
마스크 2개가 있는 경우, 공동 시뮬레이션 활성화	50%	45%	± 10

도표 40: IEC 60601-2-41:2021 표준에 따른 Volista VSTII 라이트헤드의 잔류 조도

⁵ NIR이 활성화된 경우를 제외하고 95cm/37.4인치(± 10%)의 최대 조도 거리(D_{MI})에서 측정

⁶ 160,000lx로 제한

⁷ VisioNIR 옵션이 활성화된 경우 5,300K.

**지침**

R9는 650nm이 넘는 스펙트럼의 한쪽 끝에만 영향을 미쳐 눈의 감도가 떨어집니다. 따라서 50 포인트 이상이면 의사의 색 구분에 영향을 미치지 않습니다. R9의 증가는 필연적으로 복사 에너지의 증가를 동반합니다.

최대 조도 거리(D_M)에서 근적외선 형광 영상 관련 영역의 스펙트럼 조도

	VSTII 표준 모드	VSTII VisioNIR 모드
710-800nm 대역의 스펙트럼 조도	$\leq 35 \text{ W/m}^2$	$\leq 1.25 \text{ W/m}^2$
800-870nm 대역의 스펙트럼 조도	$\leq 2.1 \text{ W/m}^2$	$\leq 0.03 \text{ W/m}^2$

도표 41: 근적외선의 스펙트럼 조도

잔류 조도 AIM 활성화 ⁸	VSTII 600/400	허용오차
최대 중앙 조명($E_{C,Ref}$)	130,000lx	$\pm 10\%$
오프셋 마스크 1개가 있는 경우의 음영 희석	86%	± 10
마스크 2개가 있는 경우의 음영 희석	58%	± 10

도표 42: AIM이 활성화된 경우의 잔류 조도

광생물학적 위험 요인**경고!****부상 위험**

이 제품은 유해할 수 있는 광방사선을 방출합니다. 안구 손상이 발생할 수 있습니다. 사용자는 수술조명장치에서 방출되는 빛을 응시해서는 안 됩니다. 수술 중 환자의 얼굴을 덮어 눈을 보호해야 합니다.

**경고!****부상 위험**

이 제품은 사용자 또는 환자에게 해를 끼칠 수 있는 광방사선을 방출합니다.

이 제품에서 방출되는 광방사선은 IEC 60601-2-41에 정의된 광생물학적 위험을 줄이기 위한 노출 제한을 충족합니다.

⁸ 작은 초점에서 측정

8.1.3 VCSII 라이트헤드의 광학 특성



지침

1m(39.4인치)의 기준 거리(D_{REF})에서 측정한 값.

특성	VCSII 600 및 400 라이트헤드	허용오차
중앙 조명($E_{c,MI}$)	10,000lx~160,000lx	—
최대 중앙 조명($E_{c,MI}$) ⁹	160,000lx	0/- 10%
최대 중앙 조명($E_{c,Ref}$) ¹⁰	150,000lx	± 10%
명시야 직경 d_{10}	20~25cm	± 15 %
광 분포 d_{50}/d_{10}	0.57	± 0.07
조도 깊이 60% 이상	52~58cm	± 10%
색온도	고정: 4,200K 가변: 3,900K / 4,200K / 4,500K	± 400K
연색지수(Ra)	95	± 5
특별연색지수(R9)	90	+10 /-20
특수 연색지수(R13)	96	± 4
특별연색지수(R15)	95	± 5
최대 스펙트럼 조도(E_{Total}) ⁹	550W/m ²	± 10%
레벨 4 이하에서의 스펙트럼 조도	< 350W/m ²	—
복사 에너지 ⁹	3.3 mW/m ² /lx	± 0.5
자외선(UV) 조도 ⁹	≤ 0.7W/m ²	—
FSP 시스템	예	—
주변 조명 모드에서의 조도	< 500lx	—

도표 43: IEC 60601-2-41:2021 표준에 따른 Volista VCSII 라이트헤드의 광학 데이터

잔류 조도 ¹¹	VCSII 600	VCSII 400	허용오차
마스크 1개가 있는 경우	62%	55%	± 10
마스크 2개가 있는 경우	50%	46%	± 10
공동 시뮬레이션 활성화	100%		± 10
마스크 1개가 있는 경우, 공동 시뮬레이션 활성화	62%	55%	± 10
마스크 2개가 있는 경우, 공동 시뮬레이션 활성화	50%	46%	± 10

도표 44: IEC 60601-2-41:2021 표준에 따른 Volista VCSII 라이트헤드의 잔류 조도

⁹ 95cm/37.4인치(± 10%)의 최대 조도 거리(D_{MI})에서 측정

¹⁰ 160,000lx로 제한

¹¹ 4,200K에서 측정

광생물학적 위험 요인



경고!

부상 위험

이 제품은 유해할 수 있는 광방사선을 방출합니다. 안구 손상이 발생할 수 있습니다. 사용자는 수술조명장치에서 방출되는 빛을 응시해서는 안 됩니다. 수술 중 환자의 얼굴을 덮어 눈을 보호해야 합니다.



경고!

부상 위험

이 제품은 사용자 또는 환자에게 해를 끼칠 수 있는 광방사선을 방출합니다.

이 제품에서 방출되는 광방사선은 IEC 60601-2-41에 정의된 광생물학적 위험을 줄이기 위한 노출 제한을 충족합니다.

8.2 전기적 특성

8.2.1 Maquet PowerLED II

전기적 특성	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500
입력 전압	100-240 Vac, 50/60 Hz	
전력	185 VA	
라이트헤드의 소모 전력	110 VA	80 VA
라이트헤드 입력	20~28Vdc	
LED 개수	100	56
LED의 평균 수명	TM-21:2012 표준에 따라 60,000시간 TM-21:2016 표준에 따라 55 000시간	
배터리 충전 시간	14시간	
배터리 수명	최소 8시간	
배터리 유형	납축전지	

도표 45: Maquet PowerLED II의 전기적 특성 표

8.2.2 Volista VSTII

특성	Volista VSTII 600	Volista VSTII 400
입력 전압	100-240 Vac, 50/60 Hz	
전력	185 VA	
라이트헤드의 소모 전력	90 VA	60 VA
라이트헤드 입력	20~28Vdc	
LED의 평균 수명	TM-21:2012 표준에 따라 60,000시간 TM-21:2016 표준에 따라 55 000시간	
배터리 충전 시간	14시간	
배터리 수명	최소 8시간	
배터리 유형	납축전지	

도표 46: Volista VSTII 라이트헤드의 소모 전력

8.2.3 Volista VCSII

특성	Volista VCSII 600	Volista VCSII 400
입력 전압	100-240 Vac, 50/60 Hz	
전력	185 VA	
라이트헤드의 소모 전력	70 VA	70 VA
라이트헤드 입력	20~28Vdc	
LED의 평균 수명	TM-21:2012 표준에 따라 60,000시간 TM-21:2016 표준에 따라 55 000시간	
배터리 충전 시간	14시간	
배터리 수명	최소 8시간	
배터리 유형	납축전지	

도표 47: Volista 라이트헤드의 소모 전력

8.3 기계적 특성

8.3.1 Maquet PowerLED II

기계적 특성	Maquet PowerLED II 700	Maquet PowerLED II 500
단일 포크 라이트헤드의 무게	16.8 kg	12,3 kg
라이트헤드의 직경(핸들 포함)	797 mm	637 mm

도표 48: 기계적 특성 표

8.3.2 Volista

Volista VCSII의 경우

특성	Volista VCSII 600	Volista VCSII 400
단일 포크 라이트헤드의 무게	13.5kg	11.5kg
라이트헤드의 직경	700mm	630 mm

도표 49: VCSII 조명장치의 기계적 특성

Pour Volista VSTII

특성	Volista VSTII 600	Volista VSTII 400
단일 포크 라이트헤드의 무게	14kg	13kg
라이트헤드의 직경	700mm	630mm

도표 50: VSTII 조명장치의 기계적 특성

8.4 카메라와 수신기의 기술적 특성

카메라의 기술적 특성

특성	OHDII FHD QL AIR05
센서	1/3" Cmos
픽셀 수	~2.48 메가 픽셀
비디오 표준	1080p
이미지 재생률	50/60fps
형식	16:9
셔터 속도	1/30 ~ 1/30000초
광시야각(대각선)	68°
LRF 시야각(대각선)	6.7°
신호/잡음	> 50dB
광학 줌(초점 비율)	x10
디지털 줌	x6

도표 51: 카메라의 기술적 특성

특성	OHDII FHD QL AIR05
전체 줌	x60
초점(광각에서 LRF까지)	f = 5.1 ~ 51mm
하면에서 1m 거리의 가시 영역(LxH)(광각에서 LRFRkwI)	865 x 530mm ~ 20 x 12mm
안티 플리커	예
초점 조정(포커스) ¹²	자동/초점 고정
화이트 밸런스 ¹²	자동/실내/실외/수동
대비 개선 ¹²	예(3단계)
Freeze(이미지 고정) ¹²	예
사전 설정 ¹²	6
전송 유형	무선
RS32 인터페이스	예
평균 핸들 미포함 무게	850 g
평균 핸들 미포함 크기(ØxH)	132 x 198 mm

도표 51: 카메라의 기술적 특성

AIR05 수신기의 기술적 특성

특성	AIR05 수신기
비디오 출력	HDMI 1.4
무게(홀더 미포함/포함)	400g / 1,200g
수신기 치수	155 x 105 x 40mm
전송 주파수	60GHz
입력 전압	5V 2A

도표 52: AIR05 수신기의 기술적 특성

8.5 기타 특성

감전에 대한 보호	클래스 I
유럽, 캐나다, 대한민국, 일본, 브라질, 호주, 스위스 및 영국의 의료기기 분류	클래스 I
미국, 중국 및 대만의 의료기기 분류	클래스 II
전체 기기의 보호 수준	IP 20
라이트헤드 보호 수준	IP 44
EMDN 코드	Z12010702
GMDN 코드	36843

도표 53: 규정 및 규제 특성

¹² 터치스크린을 통해서만

8.6 전자파 적합성(EMC) 선언



주의!

기기의 오작동 위험

이 장치를 다른 장치와 함께 사용하면 장치의 작동 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

장치와 다른 장치의 정상적인 작동을 사전에 관찰하지 않고 장치를 다른 장치 옆에서 사용하거나 다른 장치와 함께 쌓아 두지 마십시오.



주의!

기기의 오작동 위험

이 장치의 제조업체가 제공하거나 지정한 것이 아닌 부속품, 변환기 및 케이블을 사용하는 경우 전자기 방출이 증가하거나 장치의 내성이 저하되어 부적절한 작동이 발생할 수 있습니다.

제조업체가 공급 또는 지정한 부속품과 케이블만 사용하십시오.



주의!

기기의 오작동 위험

지정된 장치 또는 케이블 옆에서 휴대용 RF 통신기기(안테나 케이블 및 외장 안테나 포함)를 사용하면 장치의 작동 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

장치와 30cm 이내에서는 휴대용 RF 통신기기를 사용하지 마십시오.



주의!

기기의 오작동 위험

장치 부근에서 고주파 발전기(예: 전기 메스)를 사용하면 장치의 작동 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

오작동이 발생하면 교란이 사라질 때까지 라이트헤드의 위치를 변경하십시오.



주의!

기기의 오작동 위험

부적절한 환경에서 이 장치를 사용하면 장치의 작동 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

전문 의료기관 이외의 곳에서는 이 장치를 사용하지 마십시오.



지침

전자파 장애로 인해 조명이 일시적으로 소실되거나 장치가 일시적으로 깜박일 수 있으며, 전자파 장애가 종료되면 다시 초기 매개 변수로 돌아갑니다.

테스트 유형	테스트 방법	주파수 범위
주 포트에서 행하는 방출 측정	EN 55011 GR1 CL A ¹³	0.15 - 0.5 MHz
		0.5~5MHz
		5~30MHz

도표 54: 전자파 적합성(EMC) 선언

¹³ 이 장치는 방출 특성상 산업 지역 및 병원 환경에서 사용할 수 있습니다(CISPR 11에 Class A로 정의됨). 주거 환경(일반적으로 CISPR 11에 Class B로 정의된 제품 필요)에서 사용하는 경우 이 장치는 무선 주파수 통신 서비스에 대해 적절한 보호를 제공하지 못할 수 있습니다. 사용자는 장치의 위치 또는 방향 변경과 같은 시정 조치를 취해야 할 수 있습니다.

테스트 유형	테스트 방법	주파수 범위
복사 전자기장 측정	EN 55011 GR1 CL A ¹³	30~230MHz
		230~1000MHz

도표 54: 전자파 적합성(EMC) 선언

테스트 유형	테스트 방법	테스트 수준: 건강 환경
정전기 방전 내성	EN 61000-4-2	접촉: $\pm 8\text{kV}$ Air : $\pm 2; 4; 8; 15\text{kV}$
복사 RF 전자기장에 대한 내성	EN 61000-4-3	80 MHz, 2.7GHz 3 V/m Mod AM 80%/1kHz
		무선 RF 주파수 9 ~ 28V/m Mod AM 80%/1kHz
전기적 빠른 과도현상/버스트에 대한 내성	EN 61000-4-4	AC : $\pm 2\text{kV} - 100\text{kHz}$ IO >3m : $\pm 1\text{kV} - 100\text{kHz}$
전원공급장치의 과전압에 대한 내성	EN 61000-4-5	$\pm 0.5; 1\text{kV Diff}$ $\pm 0.5\text{ kV}, \pm 1\text{ kV}, \pm 2\text{ kV}$ 일반 모드
전자기장으로 인한 전도 장애에 대한 내성	EN 61000-4-6	150kHz, 80MHz 3 Veff Mod AM 80%/1kHz
		ISM 6 Veff Mod AM 80%/1kHz
전압 강하 및 순시 정전에 대한 내성	EN 61000-4-11	0% Ut, 10ms (0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315°) 0% Ut, 20ms 70% Ut, 500ms 0% Ut, 5s
고조파 전류 방출	EN 61000-3-2	클래스 A
공공 저전압 전원공급장치의 전압 및 플리커 변동	EN 61000-3-3	적합성

도표 55: 전자파 적합성(EMC) 선언

8.6.1 FCC PART 15(미국에만 해당)

FCC 규격 제15부에 따라 시험한 결과, 본 기기는 A 범주 디지털 장치에 대한 제품 기준에 적합한 것으로 밝혀졌습니다. 이러한 기준은 본 기기를 상업지역에서 사용할 때 발생할 수 있는 유해한 간섭으로부터 피해를 적정 수준으로 막기 위해 마련되었습니다. 본 기기는 전자파 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 본 기기를 관련 지시사항에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선통신에 유해한 간섭이 발생할 수 있습니다. 본 기기를 주거지역에서 사용하는 경우 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이러한 경우 기기의 사용자가 자기 부담으로 해결해야 합니다.

9 폐기물 관리

9.1 포장 제거

기기의 사용과 관련된 모든 포장은 재활용이 가능하도록 환경 친화적인 방식으로 처리해야 합니다.

9.2 제품

이 기기는 가치 제고, 재활용 또는 재생을 위한 분리수거 대상 품목이므로 생활쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다.

더 이상 사용하지 않는 기기의 처리에 대한 모든 정보는 현지 Getinge 대리점에 문의하십시오.

더러워진 멸균 재사용 핸들을 생활쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다.

9.3 전기 및 전자 부품

제품의 수명 기간 동안 사용된 모든 전기 및 전자 부품은 현지 기준에 따라 환경 친화적인 방식으로 처리해야 합니다.

*MAQUET ROLITE, POWERLED II, VOLISTA, VOLISTA VISIONIR, AIM, COMFORT LIGHT, LASER POSITIONING, FSP, POWERLED, ROLITE, MAQUET, GETINGE 및 GETINGE GROUP은 Getinge AB, 해당 부서 또는 자회사의 등록상표입니다.

**DEVON은 Covidien LP, 해당 부서 또는 자회사의 등록상표입니다.

**DEROYAL은 Covidien LP, 해당 부서 또는 자회사의 등록상표입니다.

**SURFA'SAFE는 ANIOS 연구소, 해당 부서 또는 자회사의 등록상표입니다.

**ANIOS는 ANIOS 연구소, 해당 부서 또는 자회사의 등록상표입니다.

GETINGE 



Maquet SAS · Parc de Limère · Avenue de la Pomme de Pin · CS 10008 ARDON ·
45074 ORLÉANS CEDEX 2 · France
전화: +33 (0) 2 38 25 88 88 팩스: +33 (0) 2 38 25 88 00

IFU 01831 KO 09 2025-08-04

CE