



Esterilizadora a baixa temperatura (vH₂O₂)

Getinge Poladus 150

Alto desempenho
para um fluxo de
trabalho contínuo

Getinge Poladus 150

Baixa temperatura, alto desempenho.

A Getinge Poladus 150 oferece a segurança e a qualidade que a sua instituição precisa ao esterilizar instrumentais cirúrgicos sensíveis ao calor. Esta esterilizadora a baixa temperatura por peróxido de hidrogênio vaporizado vH2O2 confiável e fácil de usar maximiza o rendimento para departamentos de reprocessamento de materiais. Oferece alta rotatividade de instrumentais devido a uma combinação de ciclos rápidos, grande capacidade de carregamento e resultados precisos e consistentes.

A Getinge Poladus 150 garante que cada ciclo ofereça desempenho de esterilização com a qualidade que você espera.



Getinge Poladus 150

Alto desempenho para um fluxo de trabalho contínuo

+ Operação intuitiva

A interface de usuário exclusiva e design amigável permitem sua operação por usuários com qualquer nível de experiência.



Desempenho de esterilização

Garanta que os endoscópios de canal único e duplo estejam prontos para a próxima cirurgia, graças aos ciclos rápidos, confiáveis e consistentes.



Separação real de áreas

A barreira de contaminação cruzada funciona como vedações diferenciais de pressão de ar para prevenir IRAS em suas instalações.



Fluxo de trabalho contínuo

Um sistema abrangente de ferramentas de monitoramento, indicadores, serviço e treinamento sob demanda garante que sua esterilizadora esteja fornecendo os resultados de que você precisa.



Intuitiva e fácil de usar


Faz de você o especialista

A Getinge Poladus 150 apresenta uma interface inovadora e fácil de usar. O design intuitivo reflete outros produtos da Getinge, requer menos treinamento e pode ser facilmente operada por funcionários em todos os níveis de experiência.


Telas grandes e de alta resolução são fáceis de monitorar, mesmo à distância. As informações críticas de status são exibidas de forma clara e organizada.



Seleção do programa e tempo restante

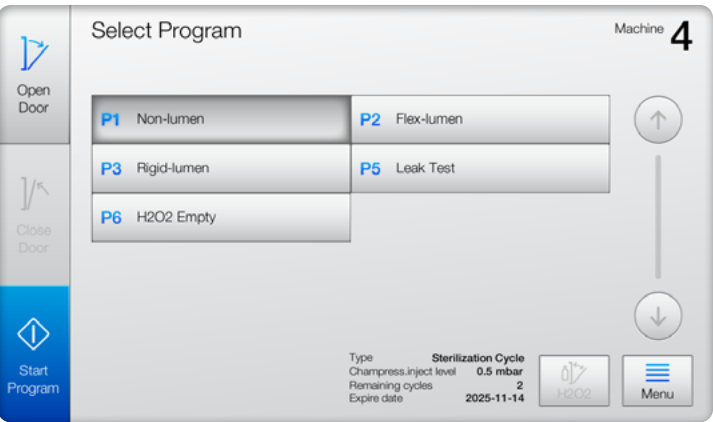


As opções de menu claras facilitam a seleção do programa correto.

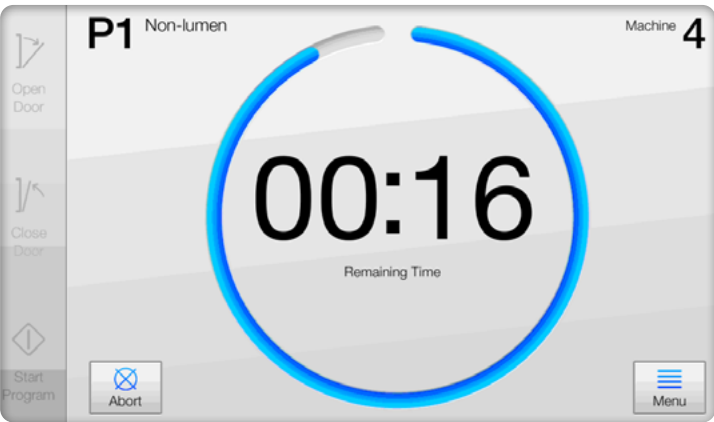


Telas grandes de 10 polegadas facilitam a visualização do tempo restante do processo.

Status em resumo

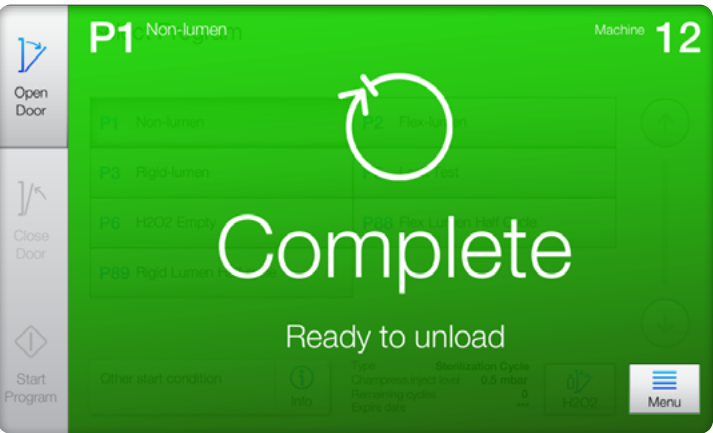

A interface do usuário fornece informações claras e organizadas - apenas o que você precisa em qualquer estágio específico e nada mais.

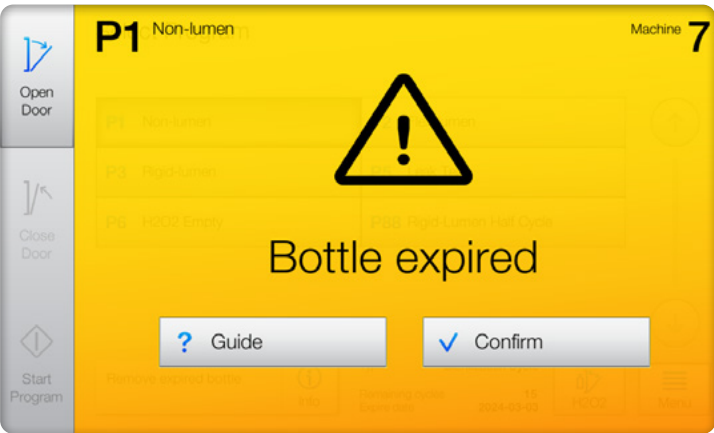

Ajuda clara e fácil de entender para resolução de problemas ou acesso a recursos avançados, disponíveis diretamente na interface do usuário.

Ergonomia e segurança

Para uma operação suave

Ergonomia em todos os detalhes

Uma boa ergonomia de materiais não apenas protege a saúde e o bem-estar dos operadores, mas também pode minimizar movimentos desnecessários e permitir fluxos de trabalho mais contínuos e suaves.

- Altura de carregamento confortável
- Conforto e segurança no carregamento do agente esterilizante
- Compartimento automatizado de agente esterilizante
- Interruptor de pé para operação com as mãos livres
- Leitor RFID (para identificação do usuário)



Instrumentos CMI sensíveis ao calor

Tempo de processo curto para alto rendimento

A Getinge Poladus 150 permite esterilizar de forma rápida e eficiente uma ampla variedade de instrumentais para cirurgias minimamente invasivas.

Ela esteriliza com eficiência uma grande variedade de instrumentais cirúrgicos, incluindo instrumentais não-canulados, canulados flexíveis e canulados rígidos, garantindo o máximo de segurança e conformidade.

Confiabilidade excepcional

O tempo de atividade consistente e os tempos de serviço reduzidos garantem que os instrumentais cirúrgicos estejam esterilizados e prontos quando necessário.


Não-canulado



Peso da carga: 14 kg (7 kg por prateleira)

Instrumentais não-canulados

Canulado flexível

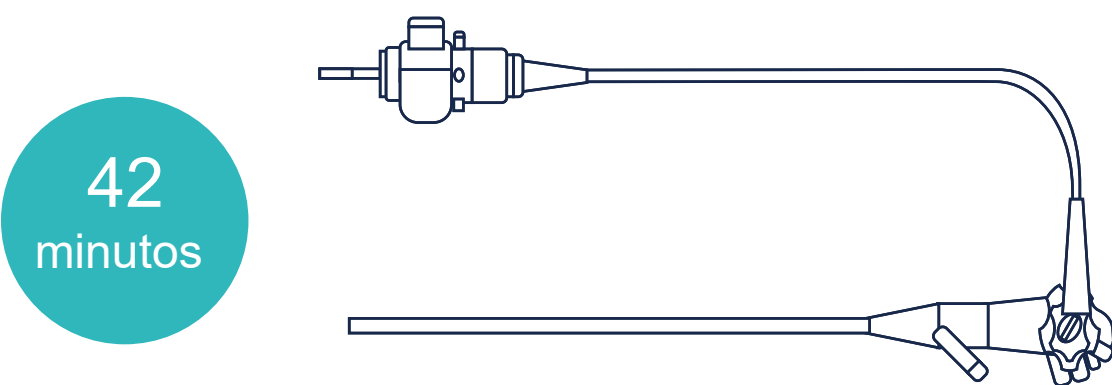

Exemplos de carregamento:

A Prateleira 1: 1x endoscópio | Prateleira 2: 7 kg de carga

B Prateleira 1: 1x endoscópio | Prateleira 2: 1x endoscópio

Endoscópios flexíveis* (canal único):

≥ 1,2 mm x ≤ 1.150 mm (adicionalmente, máx. 7 kg de instrumentais não-canulados na outra prateleira)

Endoscópios flexíveis** (canal duplo):

≥ 0,8 mm x ≤ 990 mm

Tubos de PTFE*:

≥ 1,0 mm x ≤ 1.200 mm

Canulado rígido



Peso da carga: 10 kg (5 kg por prateleira)

Carga máxima: 14 lúmens rígidos (7 por prateleira)

Endoscópios rígidos (canal único):

≥ 1 mm x ≤ 530 mm

Endoscópios rígidos (canal duplo):

≥ 0,8 / 1,4 mm x ≤ 523 mm

Lúmen de aço inoxidável:

≥ 0,7 mm x ≤ 500 mm

Barreira de Contaminação Cruzada (CCB)

Reduzindo o risco de IRAS

As barreiras de contaminação cruzada CCBs (Cross-Contamination Barriers) são cruciais para mitigar o risco de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) em CMEs. Essas barreiras funcionam como vedações diferenciais de pressão de ar que evitam a contaminação cruzada em diferentes zonas do local de instalação, mantendo as diferenças de pressão de ar necessárias.

A Getinge Poladus 150 pode ser colocada na mesma CME que outras esterilizadoras, seja um modelo de porta única ou embutido em uma parede como um modelo de passagem de porta dupla.



Conecte-se Gerenciamento do ciclo de vida do equipamento

Obtenha acesso fácil aos dados necessários para garantir o tempo de atividade e o desempenho da sua esterilizadora Getinge Poladus 150. O Getinge FleetView oferece insights fáceis: a qualquer hora, em qualquer lugar.

Conecte suas esterilizadoras e lavadoras-desinfectoras

O Getinge FleetView é o seu portal web pessoal que oferece acesso sob demanda aos dados dos equipamentos conectados a partir do seu computador, tablet ou smartphone. Esta ferramenta online altamente segura e criptografada fornece dados de desempenho em tempo real e histórico e armazenamento em nuvem. Obtenha informações atualizadas sobre pedidos de peças de reposição, orientação de manutenção preventiva e regimes de solução de problemas.

→ Saiba mais sobre o FleetView



Conecte-se Gerenciamento e rastreabilidade

A Getinge Poladus 150 se integra ao Getinge T-DOC, a solução de gerenciamento de processos e rastreabilidade de materiais da Getinge. O Getinge T-DOC captura e armazena dados de ciclo em tempo real e permite relatórios sobre o desempenho dos equipamentos conectados. Essa valiosa fonte de informações ajuda os gerentes de CME e administradores hospitalares a corrigir problemas rapidamente, melhorar o planejamento da produção e verificar a conformidade. Nossa solução se expande de acordo com suas necessidades para garantir rastreabilidade completa, utilização otimizada de instrumentais e dispositivos e entrega pontual para cirurgias.



Garanta a conformidade
com registro de dados em
tempo real e
armazenamento



Saiba mais sobre o T-DOC



Obtenha resultados precisos e consistentes com uma linha completa de consumíveis

A Getinge fornece uma linha completa de consumíveis projetados para melhorar cada uma das etapas do seu fluxo de trabalho na CME. Eles são testados em nossos equipamentos para atender aos padrões de desempenho relevantes e garantir resultados de alta qualidade. Você pode ter certeza de que seus instrumentais cirúrgicos estão limpos e esterilizados com os produtos Getinge Assured. Esses indicadores garantem a eficácia e a segurança do reprocessamento de instrumentais.

Agente esterilizante H₂O₂

O agente esterilizante usa peróxido de hidrogênio de alta pureza para garantir um desempenho repetível e confiável.




Indicadores biológicos

Os indicadores de resultado rápido dão a garantia de que as condições corretas foram alcançadas dentro das esterilizadoras.



Indicadores químicos

Os indicadores químicos fornecem garantia de esterilidade em cada nível do pacote de instrumentais, com mudanças de cor consistentes em todo o portfólio para reduzir a confusão.

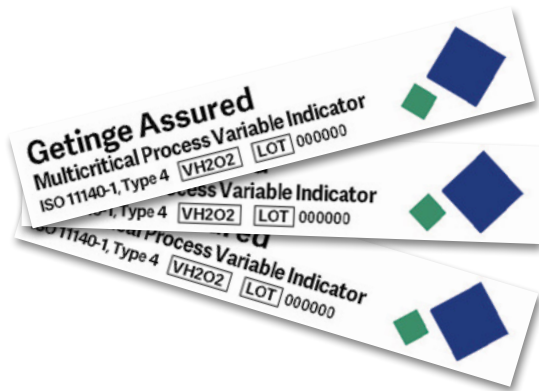

Embalagem e selagem

Os rolos e pacotes de esterilização de tamanho padrão feitos com DuPont™ Tyvek® fornecem uma barreira estéril eficaz com filme de 9 camadas para proteção extra.



Serviços Getinge

Cuidando de quem se importa

Os serviços da Getinge ajudam você a obter o melhor tempo de atividade possível do esterilizador a baixa temperatura Getinge Poladus 150.

Oferecemos serviços de saúde de todos os ângulos. Combine seus requisitos de serviço para garantir uma maior qualidade de atendimento, aumentar a segurança do paciente, melhorar o tempo de atividade do equipamento, aumentar a satisfação da equipe e otimizar o uso de recursos.

Como seu parceiro de serviços, trabalhamos com você para identificar oportunidades para melhorar os resultados:

- Criação de valor para o negócio
- Soluções de suporte digital
- Soluções financeiras
- Manutenção preventiva
- Treinamento da equipe

Confie na Getinge para oferecer valor comprovado e parcerias sólidas que tornam seu hospital mais forte, seguro e eficiente.



Dados técnicos

Especificações	
Dimensões externas (L x A x P)	785 x 1.797 x 920 mm
Altura de carregamento da prateleira superior	1.198 milímetros
Altura de carregamento da prateleira inferior	1.008 milímetros
Altura de carregamento do compartimento de H2O2	1.180 milímetros
Tamanho da câmara de porta única (L x A x P)	475 x 421 x 761 mm
Tamanho da câmara de porta dupla (L x A x P)	475 x 421 x 769 mm
Volume da câmara (porta única / porta dupla)	152 litros / 154 litros



Essas informações são destinadas a um público internacional fora dos EUA.

Essas informações destinam-se exclusivamente a profissionais de saúde ou outros públicos profissionais e são apenas para fins informativos, não são exaustivas e, portanto, não devem ser consideradas como uma substituição das Instruções de Uso, manual de serviço ou aconselhamento médico. A Getinge não se responsabiliza por qualquer ação ou omissão de qualquer parte com base neste material, e a confiança é exclusivamente por conta e risco do usuário.

Qualquer terapia, solução ou produto mencionado pode não estar disponível ou permitido em seu país. As informações não podem ser copiadas ou usadas, no todo ou em parte, sem permissão por escrito da Getinge.

Fabricantes:
Desinfecção Getinge AB · Ljungadalsgatan 11 · 352 46 Växjö · Suécia · +46 10 335 06 00 · info@getinge.com **Getinge IT Solutions ApS** · Umidade 21 · 2100 Copenhaga · Dinamarca · +45 33 33 88 55 · info@getinge.com **Garantia de esterilidade Getinge** · 74 Inverness Drive East · Englewood, CO 80112 · Estados Unidos · +1 303-660-4201 · info@getinge.com **Maquet GmbH** · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Alemanha · +49 7222 932-0 · info@getinge.com

REGISTRO ANVISA 80259119030 © 2025 Getinge | Getinge e são marcas comerciais ou marcas registradas da Getinge
AB, suas subsidiárias ou afiliadas · | Todos os direitos reservados · DMS-0007053-rev1 04/2025
Getinge Brasil · Av. Manuel Bandeira, 291 - Bloco B - Cj 33 e 34 - V. Leopoldina · São Paulo · SP · Brasil ·
+55 11 2608 7400

www.getinge.com/br

